



Čtyřkolové hliníkové chodítko



TRA03

Návod k použití a údržbě



**Pozor: Toto zařízení může být sestaveno pouze kompetentní osobou.
Hliníkový rolátor nosnost 136 kg
Nepřekračujte uvedenou nosnost – mohlo by dojít k ohrožení uživatele.**

PŘED POUŽITÍM

- Opatrně odstraňte všechny obaly. Nepoužívejte žádné nože nebo jiné ostré nástroje, protože by mohly poškodit povrch výrobku.
- Zkontrolujte, zda výrobek není viditelně poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo máte podezření na závadu, výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Vaše chodítko bylo navrženo tak, aby vám pomáhalo při chůzi a přenosu malých nákupů pomocí dodané tašky. Taška byla navržena speciálně pro tento rolátor, používejte prosím pouze tašku dodanou s chodítkem. Nepoužívejte ani nekombinujte tašky a/nebo košíky od jiných výrobců.

Pokud chodítko nepoužíváte, můžete jej jednoduše složit a uložit, do doby než jej budete opět potřebovat. Chodítko je navrženo pro použití v interiéru i venku.

VLASTNOSTI

- Výškově stavitelné rukojeti
- Viditelná brzdová lanka
- Citlivý brzdový systém pro provozní i parkovací brzdu
- Přední kola odnímatelná jedním tlačítkem
- Možnost aretace předních kol
- Skládací rám pro velmi kompaktní velikost při skladování
- Nosnost: 300 LB / 136 KG


SPECIFIKACE

Celková délka (mm)	714
Celková šířka (mm)	658
Výška madla (mm)	820-945
Sedačka Š x H (mm)	450x250
Přední kola (mm)	203
Zadní kola (mm)	203
Čistá hmotnost (kg)	7,3
Hrubá hmotnost (kg)	8,9

NÁVOD K SESTAVENÍ

Opatrně odstraňte veškerý obalový materiál, včetně kartonových trubek zakrývajících trubkovou část sestavy brzdy. Důkladně zkontrolujte výrobek, zda není poškozený nebo nemá zjevné závady.

● Části chodítka

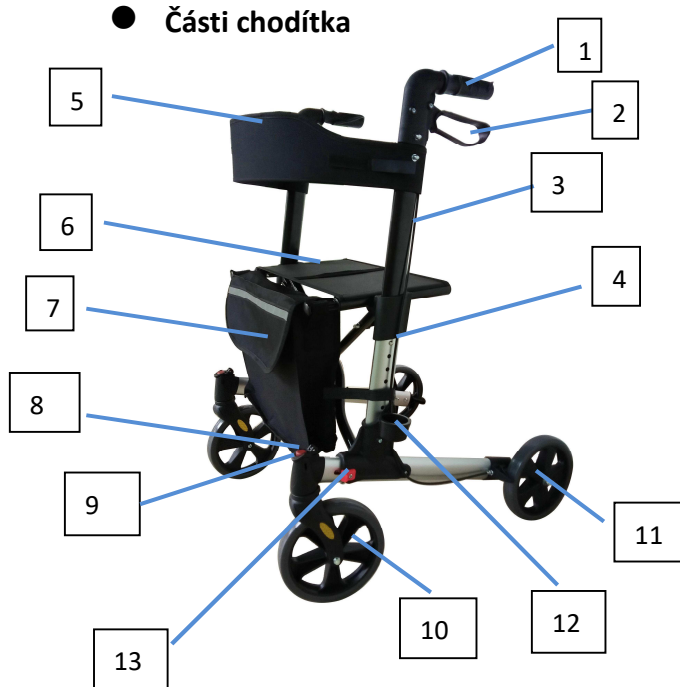

1. Madlo
2. Brzdová páka
3. Nastavitelná trubka
4. Aretační kolík
5. Zádová opěrka
6. Sedačka
7. Nákupní taška
8. Tlačítko pro sundání předních kol
9. Aretace předních kol pro přímý směr
10. Přední kolo
11. Zadní kolo
12. Odnímatelný držák hole
13. Zámek složeného chodítka



POSTUP MONTÁŽE



Obr. 1



Obr. 2

Krok 1:

Vložte přední kolo do otvoru umístěného na přední straně rámu, dokud nevyskočí tlačítko, jak je znázorněno na obr. 1. Přední kolo je nyní nainstalováno. Opakujte pro druhé přední kolo.

Pro demontáž kola, postupujte v opačném pořadí, stiskněte tlačítko a vytáhněte přední kolo, jak je znázorněno na obr. 2.




Obr. 3

Krok 2:

Přípevněte rukojeti stisknutím pojistného kolíku na trubce rukojeti a jejím zasunutím do otvoru na hlavním rámu. Opakujte na druhé straně. (Obr. 3)

Při nasazování sestavy rukojeti se ujistěte, že rukojeť směřuje k zadním kolům. Ergonomické madlo rukojeti by mělo směřovat dovnitř.

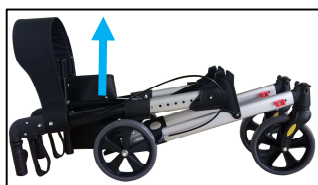

Obr. 4



Obr. 5

Krok 3:

Zvedněte současně obě rukojeti a poté je zatlačte dolů, jak je znázorněno na obr. 4, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

Pro složení chodítka vytáhněte tlačítko zámku složení na obou stranách nahoru a rukojeti pokládejte proti směru hodinových ručiček, dokud nebudou u zadních kol, jak je znázorněno na obr. 5.



Obr. 6

Krok 4:

Upravte výšku rukojetí tak, aby vyhovovala uživateli. Stiskněte pojistné kolíky na obou svislých rámech a posuňte rukojeť nahoru nebo dolů. V požadované poloze, uvolněte zajišťovací kolíky. Při dalším posunu se automaticky uzamkne v nejbližší možné výšce. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované výšky. Ujistěte se, že jsou obě rukojeti zajištěny ve stejné výšce (obr. 6).



Obr. 7



Obr. 8

Krok 5:

Rozložte chodítko zatlačením na obě strany rámu sedačky, jak je znázorněno na obr. 7. Chodítko je nyní rozložené.

Pro složení vytáhněte sedačku nahoru za černou rukojeť na sedačce, jak je znázorněno na obr. 8. Chodítko lze pak zcela složit.



Obr. 9.1



Obr. 9.2

Krok 6 :

Přední kola se mohou volně otáčet (obr. 9.1).


Otočte aretaci směru kol dozadu pro zafixování přímého směru kol (obr. 9.2).



Obr. 10

Krok 7:

Připevněte tašku k háku na rámu sedačky, jak je znázorněno na obr. 10. Nákupní tašku lze při používání snadno odejmout.

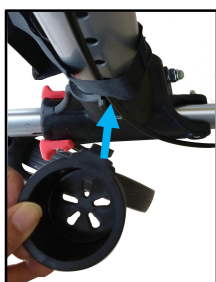

Obr. 11

Krok 8:

Vložte držák hole do drážky, která se nachází na levém bočním rámu poblíž zámku složeného chodítka (obr. 11).




Obr. 12

DŮLEŽITÉ

Před použitím se ujistěte, že jsou všechny zajišťovací kolíky zcela zasunuty, jak je znázorněno na obr. 12.

OVLÁDÁNÍ BRZD

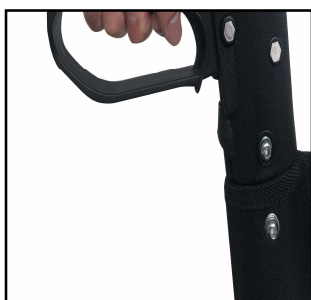

Obr. 13

1. Chcete-li zastavit, jemně stiskněte obě brzdy současně, jak je znázorněno na obr. 13, tím se chodítko zpomalí a zastaví.



Obr. 14


2. Brzdy na vašem chodítku mají možnost zajištění v parkovací poloze, jak je znázorněno na obr. 14. Pro zajištění brzd stiskněte současně obě brzdy směrem dolů. Ucítíte velmi jemné cvaknutí brzd. Brzdy se zajistí v parkovací poloze.

3. Chcete-li brzdy uvolnit, jednoduše zatáhněte za brzdou směrem vzhůru, uslyšíte lehké cvaknutí, jak se brzda odpojí.

NASTAVENÍ BRZD

Brzdový systém chodítka vyžaduje pravidelné seřizování.

Pro seřízení brzd povolte matici B a poté zašroubujte / odšroubujte matici A. Po seřízení matici B znovu utáhněte. Pokud je potřeba další seřízení, povolte aretační šroub a poté pomocí kleští stáhněte lanko přibližně o milimetr dolů. Znovu utáhněte aretační šroub. Brzdy lze dále nastavit povolením matice B a zašroubováním / odšroubováním matice A jako dříve (obr. 15).

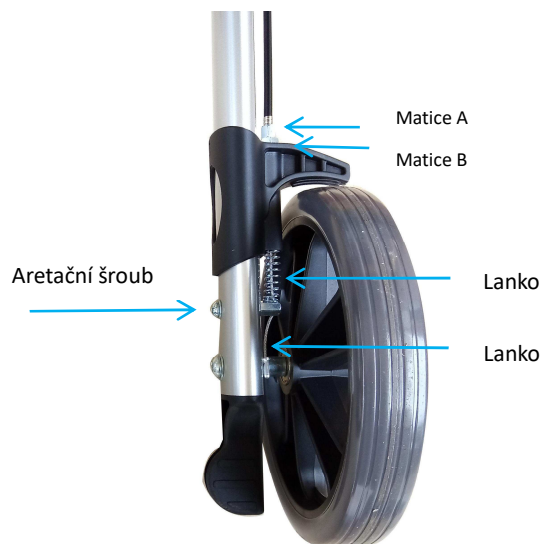

Obr. 15

OPĚTOVNÉ VYDÁNÍ

Pokud se chystáte chodítka vydat novému uživateli, zkontrolujte bezpečnost všech součástí.

To zahrnuje:

- Ohnuté nebo poškozené trubky nebo praskliny ve spojích trubek.
- Uvolněné nebo opotřebované třmeny.
- Zvětšené otvory aretačních šroubů.
- Uvolněná madla.
- Uvolněná nebo opotřebovaná kola a upevňovací prvky kol (u připevněných kol).
- Hladké, opotřebované nebo poškozené objímky (gumové násadce).

V případě potřeby vyměňte všechny opotřebované, chybějící nebo poškozené díly. Máte-li jakékoli pochybnosti, chodítka nevydávejte ani nepoužívejte, ale okamžitě kontaktujte svého dodavatele se žádostí o servis.

PÉČE A ÚDRŽBA & POVINNOSTI UŽIVATELE

1. Používejte chodítko pouze k účelu, ke kterému je určeno, tedy jako pomůcku při chůzi. Chodítko je zamýšleno k použití pouze na standardních chodnících nebo doma. Nemělo by být používáno na nerovném terénu nebo površích s výmoly. Použití chodítka na těchto površích může vážně ohrozit vaši bezpečnost a může chodítko neopravitelně poškodit.
2. Udržujte chodítko čisté, používejte vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem. Za žádných okolností nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi rozpouštědel, protože by mohlo dojít k vážnému poškození chodítka a byla by zneplatnila vaše záruka.
3. Všechny povrchy otřete suchým hadříkem a na všechny kovové spoje použijte prostředek pro vytěsnění vody, např. WD40.
4. Zkontrolujte, zda všechna kola a skládací mechanismus správně fungují a zda se všechna kola volně pohybují. Zvláštní pozornost věnujte předním kolům, ujistěte se, že se volně otáčejí, a že jsou bezpečně připevněna k rámu.



Okamžitě přestaňte chodítko používat, pokud se některé z kol obtížně otáčí, pokud cítíte, že není bezpečně připevněno k rámu, nebo pokud máte podezření na závadu.

5. Měsíční kontroly - zkontrolujte, zda jsou všechny pojistné kolíky řádně zajištěny. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné žádné součásti. Zkontrolujte seřízení brzd. Zkontrolujte kola.
6. Na chodítko nemontujte žádné díly nebo příslušenství vyrobené jinou společností. Pokud tak učiníte, dojde k zneplatnění záruky a může to vážně ohrozit vaši bezpečnost.
7. Pokud je chodítko používáno více uživateli, nebo je vydáno různým uživatelům, doporučujeme, abyste chodítko vizuálně kontrolovali každý den a minimálně každé tři měsíce jej nechali servisovat.

ČIŠTĚNÍ

Čistěte chodítko pomocí neabrazivního čisticího prostředku nebo jemného čisticího prostředku a měkkého hadříku. Abrazivní čističe např. AJAX a/nebo abrazivní čisticí polštářky mohou vážně poškodit výrobek a neměly by se používat. Po čištění se vždy ujistěte, že jste chodítko utřeli do sucha.

ÚDRŽBA

Provádějte bezpečnostní kontrolu výrobku v pravidelných intervalech, nebo pokud máte nějaké obavy.



ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data nákupu. Tuto záruku lze uplatnit na výrobní vady. Nesprávné použití nebo poškození nejsou zárukou kryty. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

Dodávky a servis v ČR zajišťuje:

Ortoservis s.r.o.

Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
tel: 266 313 652
mail: ortoservis@ortoservis.cz



Brno – tel.: 541 240 393, mail: brno@ortoservis.cz
Opava – tel.: 553 775 226, mail: opava@ortoservis.cz
České Budějovice – tel.: 387 432 502, mail: cb@ortoservis.cz

www.ortoservis.cz
