

Návod na použití

Jalosome® Oral Barrier - Gel na léčbu mukozitidy ústní dutiny.

Jalosome® Oral Barrier je zdravotnický prostředek speciálně indikovaný na léčbu: mukozitidy z radioterapie a chemoterapie, aftů, vředů, opakující se aftózní stomatitidy, orální chirurgie, náročných extrakcí, implantologie, traumatických vředů z protéz a ortodontických aparátů. Díky vysokým mukoadhezivním vlastnostem, které tvoří ochrannou bariéru na ústní sliznici, Jalosome® Oral Barrier zmírňuje s tím spojenou bolest.

Ochranný film chrání před vnějšími vlivy, napomáhá hojení ran, udržuje prostředí hydratované a lubrikované.

INDIKACE NA POUŽITÍ:

Přípravek používejte podle potřeby až 3x denně, minimálně 30 minut po aplikaci nepijte a nejezte. Produkt je připravený na použití. Dbejte na to, abyste rovnoměrně pokryli celou ústní dutinu, podnebí, jazyk, vnitřní líce. Odstraňte jakýkoliv přebytek. Jeden 10 ml sáček = 1 dávka.

SLOŽENÍ:

Aqua, Glycerol, Aloe Vera, Hyaluronát sodný, Panthenol, Altea Officinalis, Hydroxypropylmetylcelulóza, Xanthanová guma, Sorbát draselný, Kyselina citrónová, Výtažek z meruněk, Sukralóza. Bezlepkový. Bez laktózy.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte, pokud je pacient přecitlivělý nebo alergický na některou ze složek. V případě abnormálních reakcí přerušete léčbu.

Po otevření balení použijte celý obsah. Výrobek nepoužívejte, pokud uplynula doba použitelnosti. Datum spotřeby je uvedený na obalu a vztahuje se na neporušené balení. Nepoužívejte, pokud se zdá, že obal je poškozený. Balení skladujte při pokojové teplotě na chladném a suchém místě.

Držte mimo dosah dětí.

VÝROBCE: Labomar S.p.A - Via N. Sauro 35 I, Istrana (TV)

Rev 00 2019/05



Distributor pro ČR:

PHARMCARE CZ, s.r.o.

Hamry 984/25

614 00 Brno, Česká republika

Tel: 530 515 577

info@pharmcare.cz

www.pharmcare.cz