

NÁVOD K POUŽITÍ

BrownGuard 100 pás kýlní tříselný typ 01 je vyroben z 3D pleteniny a pružných tahů. Materiály použité na jeho výrobu jsou nedráždivé a neobsahují latex. V tříselném kýlním pásu je integrována pelota, která zabraňuje dalšímu rozvoji tříselné kýly. Tříselný kýlní pás se zapíná na suchý zip. Mechanismus účinku tříselného kýlního pásu je založen na cíleném tlaku prostřednictvím silikonové peloty na oblast třísla, čímž dochází k potřebnému terapeutickému efektu. Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost.

Název zdravotnického prostředku:

BrownGuard 100 pás kýlní tříselný typ 01

Varianty zdravotnického prostředku:

- jednostranný levý, vel. S – XL
- jednostranný pravý, vel. S - XL

Uživatelský profil:

BrownGuard 100 pás kýlní tříselný typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

Určený účel použití zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek brání rozvinutí tříselné kýly.

Indikace:

- zamezení rozvinutí tříselné kýly u inoperabilních pacientů
- zamezení rozvinutí tříselné kýly v předoperačním období
- zabránění uskřínutí a zvětšování tříselné kýly při zvýšení nitrobřišního tlaku

Pokud tříselný kýlní pás používáte poprvé, je vhodné jeho použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, popř. aby byl zdravotní stav lékařem pravidelně kontrolován.

Kontraindikace:

- akutní mokvající kožní projevy
- přecitlivělost na použité materiály
- poruchy odtoku lymfy a nespecifické otoky v oblasti třísel

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití tříselného kýlního pásu a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

Cílová skupina pacientů:

Pacienti s rozvinutou tříselnou kýlou a dále pacienti s výše zmíněnými indikacemi. Tříselný kýlní pás je určen k použití na zdravou, neporušenou pokožku. Tříselný kýlní pás je určen pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví. Použití tříselného kýlního pásu v těhotenství konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Vedlejší účinky:

Vedlejší účinky se mohou projevit především při nesprávně zvolené velikosti. U příliš pevně upnutého tříselného kýlního pásu může dojít k otlakům nebo zhoršení prokrvení vlivem stlačení cév. U vnímavých a přecitlivělých jedinců může dojít k iritaci pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiálem, ze kterého je tříselný kýlní pás vyroben.

Jak zvolit správnou velikost tříselného kýlního pásu:

Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit pouze změřením obvodu v místě označeném na obrázku.

Upozornění:

Jakékoliv náznaky vedoucí k rozvoji tříselné kýly by měl posoudit lékař. Pokud jste problémy s možným vznikem tříselné kýly pozorovali poprvé, poraďte se před používáním tříselného kýlního pásu s Vaším lékařem. Nezačínajte samoléčbu tříselným kýlním pásem, pokud neznáte příčinu nestability v oblasti třísla. Kombinaci s jinými zdravotnickými prostředky je nutné vždy konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.

- k měření používejte krejčovský metr
- měřte vestoje
- požádejte o pomoc druhou osobu
- naměřené hodnoty se v průběhu léčby mohou měnit - ověřte vždy správnou velikost před použitím nového balení tříselného kýlního pásu

velikostní tabulka

obvod boků v cm (bod t)			
S	M	L	XL
70-85	85-100	100-115	115-130



Pokud jsou naměřené hodnoty na rozhraní dvou velikostí, zvolte tu větší. Pokud si s volbou velikosti tříselného kýlního pásu nejste jisti, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo kontaktujte přímo výrobce.

Správně zvolená velikost:

- pociťujete znatelný, nikoliv však nepříjemný tlak v oblasti třísla
- tříselný kýlní pás při chůzi nesjíždí a neshrnuje se
- tříselný kýlní pás v žádném místě neškrtí

Údaje o velikosti a výrobci najdete na etiketě všité u okraje pupečního kýlního pásu.

Aplikace tříselného kýlního pásu:

Část tříselného kýlního pásu s pelotou přiložte na tříselnou kýlu a následně pás pomocí suchého zipu dotáhněte tak, abyste pocítovali přiměřený tlak, a potom dotáhněte pelotu přes rozkrok pomocí pružné pásky. Dbejte na to, aby pás nebyl překroucen. V případě viditelného mechanického poškození tříselný kýlní pás dále nenoste a nejlépe vyměňte za nový.

Ošetřování a údržba:

BrownGuard 100 pás kýlní tříselný typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití jednou osobou. Svou účinnost a bezpečnost si zachovává po dobu 12-ti měsíců od prvního použití při dodržení následujících pravidel:

- tříselný kýlní pás lze prát v pračce (maximální teplota praní 30°C, mírný postup) mýdlovým roztokem nebo speciálním přípravkem pro praní bandáží, v ochranném obalu (prací sáček)
- při praní nechte suché zipy vždy zapnuté
- nepoužívejte aviváž
- nepoužívejte odstřeďování, mokrý tříselný kýlní pás vymačkejte mezi dvěma ručníky
- sušte ve vodorovné poloze mimo přímý zdroj tepla (radiátor, slunce)
- tříselný kýlní pás nežehlete
- maximální možný počet pracích cyklů je 120
- skladujte v suchu a v temnu, nejlépe v originálním obalu
- do tříselného kýlního pásu nijak mechanicky nezasahujte, neopravujte místa poškozená používáním, nenastřihávejte okraje
- tříselný kýlní pás nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, bělicími přípravky

Informace o době použitelnosti (expiraci) zdravotnického prostředku a datum výroby je uvedena na obalu.

Ošetrovací symboly:



Nepoužívat aviváž

Kdy nepoužívat:

Zdravotnický prostředek ihned přestaňte používat, pokud pozorujete zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít souvislost s používáním tříselného kýlního pásu – v takovém případě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Složení:

PA, PU, PES, kov, silikon, plast

Tento zdravotnický prostředek neobsahuje léčivou látku, včetně derivátů lidské krve nebo plazmy, tkáně nebo buňky lidského původu nebo jejich deriváty, tkáně nebo buňky zvířecího původu nebo jejich deriváty.

Likvidace:

Tříselný kýlní pás je možno likvidovat s běžným komunálním odpadem, případně odložit do kontejneru určeného na textil. Ačkoliv je výrobek určen pro použití na zdravou, neporušenou pokožku, není vyloučeno, že během používání došlo ke kontaminaci tělními tekutinami. V takovém případě by měl být tříselný kýlní pás zlikvidován jako infekční materiál. Použitý materiál není toxický, pokud nedojde k jeho hoření. Použitý tříselný kýlní pás nikdy nespalujte.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen:

Výrobce:

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Datum poslední revize textu: 16.09.2024

