

NÁVOD K POUŽITÍ

BrownGuard 100 peřinka abukční typ 01 je vyrobena z pletených materiálů, které jsou prodyšné, nedráždivé a neobsahují latex. Mechanismus účinku spočívá ve fixaci kyčelních kloubů kojence v požadované poloze. Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Použití tohoto zdravotnického prostředku konzultujte vždy s Vaším ošetřujícím lékařem.

Název zdravotnického prostředku:

BrownGuard 100 peřinka abdukční typ 01

Varianty zdravotnického prostředku:

- vel. M – L

Uživatelský profil:

BrownGuard 100 peřinka abdukční typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

Určený účel použití zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek indikovaný u kojenců s lehkou dysplazií kyčelních kloubů nebo jako preventivní pomůcka pro správný vývoj kyčelních kloubů.

Indikace:

- lehká dysplazie kyčelních kloubů u kojenců
- prevence nesprávného vývoje kyčelních kloubů u kojenců

Pokud abdukční peřinku používáte poprvé, je vhodné její použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, příp. aby byl zdravotní stav pravidelně lékařem kontrolován.

Kontraindikace:

- onemocnění nebo poranění kůže v oblasti použití abdukční peřinky
- akutní mokvající kožní projevy
- přecitlivělost na použité materiály

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití abdukční peřinky a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

Cílová skupina pacientů:

Kojenci s výše zmíněnými indikacemi. Abdukční peřinka je určena k použití na zdravou, neporušenou pokožku. Abdukční peřinka je určena pro kojence ve věku do dvanácti měsíců a obě pohlaví.

Vedlejší účinky:

U vnímavých a precitlivělých jedinců může dojít k iritaci pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiálem, ze kterého je abdukční peřinka vyrobena.

Jak zvolit správnou velikost abdukční peřinky:

Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit z velikostní tabulky dle věku kojence.

Upozornění:

Jakékoliv syndromy či nestability v oblasti kojeneckých kyčlí by měl posoudit lékař. Pokud jste problémy v oblasti kyčlí pozorovali poprvé, poraďte se před používáním abdukční peřinky s Vaším lékařem. Nezačínejte samoléčbu abdukční peřinkou, pokud neznáte příčinu problému v oblasti kojeneckých kyčlí.

BrownGuard 100 peřinka abdukční typ 01 – tabulka velikostí		
velikost	M	L
věk kojence	do 3 měsíců	do 12 měsíců
šířka peřinky	20 cm	23 cm

Pokud jsou naměřené hodnoty na rozhraní dvou velikostí, zvolte tu větší. Pokud si s volbou velikosti abdukční peřinky nejste jisti, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo kontaktujte přímo výrobce nebo ošetřujícího lékaře.

Správně zvolená velikost:

- abdukční peřinka fixuje dolní končetiny kojence funkčně a nenásilně v požadované poloze

Aplikace abdukční peřinky:

Abdukční peřinku přiložíme mezi nohy kojence a upneme pomocí suchých zipů kolem pasu. Peřinku dále fixujeme přes ramena kojence pomocí dlouhých pružných popruhů a plastových spon. Suché zipy a ramenní popruhy dotáhněte tak, aby tlak nebyl nepříjemný. Při oblékání by abdukční peřinka neměla být v kontaktu s ostrými předměty (např. šperky) nebo dlouhými nehty. V případě viditelného mechanického poškození peřinku dále nepoužívejte a nejlépe vyměňte za novou.

Ošetřování a údržba:

BrownGuard 100 peřinka abdukční typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití jednou osobou. Svou účinnost a bezpečnost si zachovává po dobu 6-ti měsíců od prvního použití při dodržení následujících pravidel:

- abdukční peřinku pereme ručně při teplotě praní 30°C, mírný postup mýdlovým roztokem nebo šetrným pracím prostředkem určeným pro citlivou kojeneckou pokožku
- při praní nechte suché zipy vždy zapnuté
- nepoužívejte aviváž
- mokrou abdukční peřinku vymačkejte mezi dvěma ručníky
- sušte ve vodorovné poloze mimo přímý zdroj tepla (radiátor, slunce)
- abdukční peřinku nežehlete
- maximální možný počet pracích cyklů je 60
- skladujte v suchu a temnu, nejlépe v originálním obalu
- do abdukční peřinky nijak mechanicky nezasahujte, neopravujte místa poškozená používáním, nenastřihávejte okraje
- abdukční peřinka nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, bělícími přípravky

Zdravotnický prostředek smí být bezpečně používán 36 měsíců od data výroby. Datum výroby i expirace jsou uvedeny na obalu zdravotnického prostředku.

Ošetřovací symboly:



Nepoužívat aviváž

Kdy nepoužívat:

Zdravotnický prostředek ihned přestaňte používat pokud pozorujete zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít souvislost s používáním abdukční peřinky - v takovém případě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Materiálové složení:

PU, PA, PES, plast

Tento zdravotnický prostředek neobsahuje léčivou látku, včetně derivátů lidské krve nebo plazmy, tkáně nebo buňky lidského původu nebo jejich deriváty, tkáně nebo buňky zvířecího původu nebo jejich deriváty.

Likvidace:

Abdukční peřinku je možno likvidovat s běžným komunálním odpadem, případně odložit do kontejneru určeného na textil. Ačkoliv je výrobek určen pro použití na zdravou, neporušenou pokožku, není vyloučeno, že během používání došlo ke kontaminaci tělními tekutinami. V takovém případě by měla být abdukční peřinka zlikvidována jako infekční materiál. Použitý materiál není toxický, pokud nedojde k jeho hoření. Použitou abdukční peřinku nikdy nespalujte.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

Výrobce:

 ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Datum poslední revize textu: 05.12.2024

