

NÁVOD K POUŽITÍ

BrownGuard 700 pás těhotenský typ 01 je vyroben z pružného materiálu a zapíná se na suchý zip. Elastický materiál je prodyšný a umožňuje dobrý odvod potu. Materiály použité na výrobu pásu jsou nedráždivé a neobsahují latex. Mechanismus účinku těhotenského pásu spočívá v redukci zatížení přední části těla způsobené zvyšující se hmotností břicha v těhotenství pomocí integrovaných stabilizačních výztuh v bederní oblasti a nastavitelných tažných pásů v oblasti břicha. Tím dochází k úlevě od tlaku na břišní stěnu, pánev a páteř. K dosažení požadovaného účinku je vždy potřeba zvolit správnou velikost těhotenského pásu.

Název zdravotnického prostředku:

BrownGuard 700 pás těhotenský typ 01

Varianty zdravotnického prostředku:

- bederní výztuhy, dopínací tahy, vel. M – L

Uživatelský profil:

BrownGuard 700 pás těhotenský typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

Určený účel použití zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek určený k podpoře břišní stěny a bederní páteře během těhotenství.

Indikace:

- podpora břišní stěny ve vyšším stadiu těhotenství s důrazem na spodní část břicha
- podpora bederní páteře a snížení bolestivosti zad způsobené posturálními změnami během těhotenství

Pokud těhotenský pás používáte poprvé, je vhodné jeho použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, příp. aby byl zdravotní stav pravidelně lékařem kontrolován.

Kontraindikace:

- podrážděná nebo jinak porušená pokožka
- akutní mokvající kožní projevy
- přecitlivělost na použité materiály

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití těhotenského pásu a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

Cílová skupina pacientů:

Pacientky s indikací podpory břišní stěny a bederní páteře během těhotenství a dále pacientky s výše zmíněnými indikacemi. Těhotenský pás je určen k použití na zdravou, neporušenou pokožku a pro všechny věkové skupiny. Použití těhotenského pásu konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Vedlejší účinky:

Vedlejší účinky se mohou projevit především při nesprávně zvolené velikosti. Při nesprávně zvolené velikosti pásu může dojít k nedostatečné fixaci a tím i k nedostatečnému terapeutickému účinku. Příliš malý pás může tlakem zvýšit u indikovaných stavů nepříjemné bolestivé projevy. U vnímavých a přecitlivělých jedinců může dojít k iritaci pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiálem, ze kterého je těhotenský pás vyroben.

Jak zvolit správnou velikost těhotenského pásu:


Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit pouze změřením obvodu pasu v místě označeném na obrázku.

Upozornění:

Jakékoliv syndromy či nestability v těhotenství v oblasti břicha by měl posoudit lékař. Pokud jste problémy v oblasti břicha pozorovaly poprvé, poraďte se před používáním těhotenského pásu s Vaším lékařem. Nezačínejte samoléčbu těhotenským pásem, pokud neznáte příčinu problému v oblasti břicha.

- k měření používejte krejčovský metr
- požádejte o pomoc druhou osobu
- naměřené hodnoty se v průběhu léčby mohou měnit - ověřte vždy správnou velikost před použitím nového balení těhotenského pásu

velikost	obvod pasu v cm (bod t)
M	90 - 110
L	110 - 130

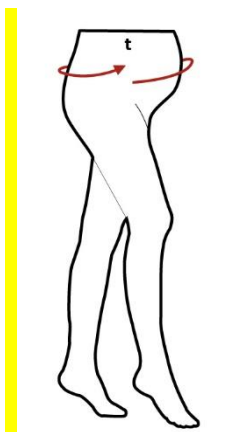

Pokud jsou naměřené hodnoty na rozhraní dvou velikostí, zvolte tu větší. Pokud si s volbou velikosti těhotenského pásu nejste jisti, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo kontaktujte přímo výrobce.

Správně zvolená velikost:

- pociťujete znatelný, nikoliv však nepříjemný tlak v oblasti břicha
- těhotenský pás nesjíždí a neshrnuje se

Aplikace těhotenského pásu:

Těhotenský pás natáhneme přes břicho a zajistíme suchým zipem tak, aby tlak nebyl nepříjemný. Z obou stran dopneme v oblasti břicha tažné pásy na suché zipy a dbáme na správné umístění výztuh podél bederní páteře. Při oblékání by pás neměl být v kontaktu s ostrými předměty (např. šperky) nebo dlouhými nehty. Pokud používáte tělovou kosmetiku, vyčkejte s oblékáním pásu cca 15 min. po aplikaci. V případě viditelného mechanického poškození pás dále nepoužívejte a nejlépe vyměňte za nový.


Ošetřování a údržba:

BrownGuard 700 pás těhotenský typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití jednou osobou. Svou účinnost a bezpečnost si zachovává po dobu 12-ti měsíců od prvního použití při dodržení následujících pravidel:

- těhotenský pás lze prát v pračce (maximální teplota praní 30°C, mírný postup) mýdlovým roztokem nebo speciálním přípravkem pro praní kompresivních punčoch a bandáží, v ochranném obalu (prací sáček)
- při praní nechte suché zipy vždy zapnuté
- nepoužívejte aviváž
- nepoužívejte odstředování, mokrý těhotenský pás vymačkejte mezi dvěma ručníky
- sušte ve vodorovné poloze mimo přímý zdroj tepla (radiátor, slunce)
- těhotenský pás nežehlete
- maximální možný počet pracích cyklů je 60
- skladujte v suchu a temnu, nejlépe v originálním obalu
- do těhotenského pásu nijak mechanicky nezasahujte, neopravujte místa poškozená používáním, nenastřihávejte okraje
- těhotenský pás nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, bělícími přípravky

Zdravotnický prostředek smí být bezpečně používán 36 měsíců od data výroby. Datum výroby i expirace jsou uvedeny na obalu zdravotnického prostředku.

Ošetřovací symboly:

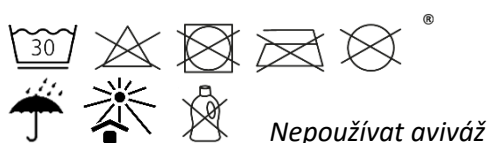

Kdy nepoužívat:

Zdravotnický prostředek ihned přestaňte používat, pokud pozorujete zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít souvislost s používáním těhotenského pásu - v takovém případě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Materiálové složení:

PU, PA, PES, plast

Tento zdravotnický prostředek neobsahuje léčivou látku, včetně derivátů lidské krve nebo plazmy, tkáně nebo buňky lidského původu nebo jejich deriváty, tkáně nebo buňky zvířecího původu nebo jejich deriváty.

Likvidace:

Těhotenský pás je možno likvidovat s běžným komunálním odpadem, případně odložit do kontejneru určeného na textil. Ačkoliv je výrobek určen pro použití na zdravou, neporušenou pokožku, není vyloučeno, že během používání došlo ke kontaminaci tělními tekutinami. V takovém případě by měl být těhotenský pás zlikvidován jako infekční materiál. Použitý materiál není toxický, pokud nedojde k jeho hoření. Použitý těhotenský pás nikdy nespalujte.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

Výrobce: **ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec**

Datum poslední revize textu: 19.12.2024

