

NÁVOD K POUŽITÍ

BrownGuard 700 pás břišní typ 02 je vyroben z pružného materiálu a zapíná se na suchý zip. Pro ještě lepší zpevnění břišní stěny s přídatným dotahem na břiše. Elastický materiál je prodyšný a umožňuje dobrý odvod potu. Materiály použité na výrobu pásu jsou nedráždivé a neobsahují latex. Mechanismus účinku břišního pásu je založen na zpevnění břišní stěny, čímž dochází k potřebnému terapeutickému efektu. Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Při delších klidových přestávkách byste měli pás sundat, neurčí-li Vás ošetřující lékař jinak.

Název zdravotnického prostředku:

BrownGuard 700 pás břišní typ 02

Varianty zdravotnického prostředku:

- dopínací tah, vel. S – XL

Uživatelský profil:

BrownGuard 700 pás břišní typ 02 je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

Určený účel použití zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek určený ke zpevnění břišní stěny.

Indikace:

- podpora po operacích břišní stěny
- prevence vzniku břišních kýl
- podpora břišní stěny při výskytu volných, reponibilních kýl v přední stěně břišní
- diastáza (rozestup) přímých břišních svalů
- plastické operace v oblasti břicha
- podpora břišní stěny u obézních pacientů
- doléčení po operaci venter pendulum (převislé břicho)
- zabránění rozvoje nebo uskřínutí kýl u inoperabilních pacientů

Pokud břišní pás používáte poprvé, je vhodné jeho použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, příp. aby byl zdravotní stav pravidelně lékařem kontrolován.

Kontraindikace:

- podrážděná nebo jinak porušená pokožka
- akutní mokvající kožní projevy
- přecitlivělost na použité materiály

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití břišního pásu a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

Cílová skupina pacientů:

Pacienti s bolestivými a pooperačními syndromy v oblasti břicha a dále pacienti s výše zmíněnými indikacemi. Břišní pás je určen k použití na zdravou, neporušenou pokožku a pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví. V těhotenství použití pásu konzultujte s lékařem.

Vedlejší účinky:

Vedlejší účinky se mohou projevit především při nesprávně zvolené velikosti nebo při používání břišního pásu mimo zátěž. Při nesprávně zvolené velikosti pásu může dojít k nedostatečné fixaci a tím i k nedostatečnému terapeutickému účinku. Příliš malý pás může tlakem zvýšit u indikovaných stavů bolestivé projevy. U vnímavých a přecitlivělých jedinců může dojít k iritaci pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiálem, ze kterého je břišní pás vyroben.

Jak zvolit správnou velikost břišního pásu:

Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit pouze změřením obvodu pasu v místě označeném na obrázku.

Upozornění:

Jakékoliv syndromy či nestability v oblasti břicha by měl posoudit lékař. Pokud jste problémy v oblasti břicha pozorovali poprvé, poraďte se před používáním břišního pásu s Vaším lékařem. Nezačínejte samoléčbu břišním pásem, pokud neznáte příčinu problému v oblasti břicha.

- k měření používejte krejčovský metr
- požádejte o pomoc druhou osobu
- naměřené hodnoty se v průběhu léčby mohou měnit - ověřte vždy správnou velikost před použitím nového balení břišního pásu

velikost	obvod pasu v cm (bod t)
S	65 - 85
M	85 - 105
L	105 - 125
XL	125 - 145



Pokud jsou naměřené hodnoty na rozhraní dvou velikostí, zvolte tu větší. Pokud si s volbou velikosti břišního pásu nejste jisti, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo kontaktujte přímo výrobce.

Tento zdravotnický prostředek neobsahuje léčivou látku, včetně derivátů lidské krve nebo plazmy, tkáně nebo buňky lidského původu nebo jejich deriváty, tkáně nebo buňky zvířecího původu nebo jejich deriváty.

Likvidace:

Břišní pás je možno likvidovat s běžným komunálním odpadem, případně odložit do kontejneru určeného na textil. Ačkoliv je výrobek určen pro použití na zdravou, neporušenou pokožku, není vyloučeno, že během používání došlo ke kontaminaci tělními tekutinami. V takovém případě by měl být břišní pás zlikvidován jako infekční materiál.

Použitý materiál není toxický, pokud nedojde k jeho hoření. Použitý břišní pás nikdy nespalujte.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

Výrobce:

 **ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec**

Datum poslední revize textu: 11.07.2024

