

NÁVOD K POUŽITÍ

BrownGuard 100 bandáž klavikulární typ 01 je bandáž určená k fixaci v oblasti klíční kosti a ke korekci vadného držení těla. Materiály použité na jeho výrobu jsou nedráždivé a neobsahují latex. Mechanismus účinku klavikulární bandáže je založen na zafixování klíční kosti po úrazech a chirurgických výkonech, čímž dochází k potřebnému terapeutickému efektu. Upínací polstrované pásky se obtočí přes ramena a dotáhnou pomocí suchých zipů. Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost.

Název zdravotnického prostředku:

BrownGuard 100 bandáž klavikulární typ 01

Varianty zdravotnického prostředku:

- vel. M – L

Uživatelský profil:

BrownGuard 100 bandáž klavikulární typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

Určený účel použití zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek určený k fixaci klíční kosti.

Indikace:

- fixace klíční kosti po úrazech a chirurgických výkonech
- korekce vadného držení těla (kulatá záda)

Pokud klavikulární bandáž používáte poprvé, je vhodné jeho použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, příp. aby byl zdravotní stav pravidelně lékařem kontrolován.

Kontraindikace:

- podrážděná nebo jinak porušená pokožka
- akutní mokvající kožní projevy
- přecitlivělost na použité materiály

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití klavikulární bandáže a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

Cílová skupina pacientů:

Pacienti po úrazu klíční kosti nebo po chirurgických zákrocích v oblasti klíční kosti. Klavikulární bandáž lze rovněž využít pro korekci vadného držení těla, především pro „kulatá záda“. Není omezení pro použití v těhotenství.

Vedlejší účinky:

Vedlejší účinky se mohou projevit především při nesprávně zvolené velikosti nebo při používání klavikulární bandáže mimo určený účel použití. U vnímavých a přecitlivělých jedinců může dojít k iritaci pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiálem, ze kterého je klavikulární bandáž vyrobena.

Jak zvolit správnou velikost klavikulární bandáže:


Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit pouze změřením obvodu hrudníku dle obrázku.

Upozornění:

Jakékoliv syndromy či nestability v oblasti klíční kosti by měl posoudit lékař. Pokud jste problémy v oblasti klíční kosti pozorovali poprvé, poraďte se před používáním klavikulární bandáže s Vaším lékařem. Nezačínejte samoléčbu klavikulární bandáží, pokud neznáte příčinu problému v oblasti klíční kosti.

- k měření používejte krejčovský metr
- požádejte o pomoc druhou osobu
- naměřené hodnoty se v průběhu léčby mohou měnit - ověřte vždy správnou velikost před použitím nového balení klavikulární bandáže

<i>velikost</i>	<i>obvod hrudníku v cm</i>
<i>M</i>	<i>70 - 100</i>
<i>L</i>	<i>100 - 130</i>

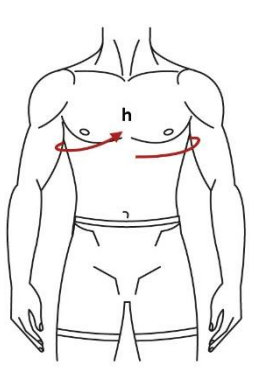

Pokud jsou naměřené hodnoty na rozhraní dvou velikostí, zvolte tu větší. Pokud si s volbou velikosti klavikulární bandáže nejste jisti, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo kontaktujte přímo výrobce.

Správně zvolená velikost:

- klavikulární bandáž nikde netlačí
- v oblasti klíční kosti a ramen pociťujete znatelný, nikoli však nepříjemný tlak

Aplikace klavikulární bandáže:

Upínací polstrované pásky se obtočí přes ramena a dotáhnou pomocí suchých zipů tak, aby plastová výztuha byla umístěna na zádech mezi lopatkami. V případě viditelného mechanického poškození klavikulární bandáž dále nepoužívejte a nejlépe vyměňte za novou.

Ošetřování a údržba:

BrownGuard 100 bandáž klavikulární typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití jednou osobou. Svou účinnost a bezpečnost si zachovává po dobu 12-ti měsíců od prvního použití při dodržení následujících pravidel:

- klavikulární bandáž lze prát v pračce (maximální teplota praní 30°C, mírný postup) mýdlovým roztokem nebo speciálním přípravkem pro praní kompresivních punčoch a bandáží, v ochranném obalu (prací sáček)
- při praní nechte suché zipy vždy zapnuté
- nepoužívejte aviváž
- nepoužívejte odstředování, mokrou klavikulární bandáž vymačkejte mezi dvěma ručníky
- sušte ve vodorovné poloze mimo přímý zdroj tepla (radiátor, slunce)
- klavikulární bandáž nežehlete
- maximální možný počet pracích cyklů je 60
- skladujte v suchu a temnu, nejlépe v originálním obalu
- do klavikulární bandáže nijak mechanicky nezasahujte, neopravujte místa poškozená používáním, nenastříhávejte okraje
- klavikulární bandáž nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, bělícími přípravky

Zdravotnický prostředek smí být bezpečně používán 36 měsíců od data výroby. Datum výroby i expirace jsou uvedeny na obalu zdravotnického prostředku.

Ošetřovací symboly:



Nepoužívat aviváž

Kdy nepoužívat:

Zdravotnický prostředek ihned přestaňte používat pokud pozorujete zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít souvislost s používáním klavikulární bandáže - v takovém případě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Materiálové složení:

PU, PA, PES, kov, plast, bavlna

Tento zdravotnický prostředek neobsahuje léčivou látku, včetně derivátů lidské krve nebo plazmy, tkáně nebo buňky lidského původu nebo jejich deriváty, tkáně nebo buňky zvířecího původu nebo jejich deriváty.

Likvidace:

Klavikulární bandáž je možno likvidovat s běžným komunálním odpadem, případně odložit do kontejneru určeného na textil. Ačkoliv je výrobek určen pro použití na zdravou, neporušenou pokožku, není

vyloučeno, že během používání došlo ke kontaminaci tělními tekutinami. V takovém případě by měla být klavikulární bandáž zlikvidována jako infekční materiál. Použitý materiál není toxický, pokud nedojde k jeho hoření. Použitou klavikulární bandáž nikdy nespalujte.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

Výrobce:

 ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Datum poslední revize textu: 19.12.2024

