



CE

Pooperační obuv

209R1 Model „Apollo“

Obsah

1	Všeobecná doporučení.....	3
2	Oblast použití.....	3 – 4
2.1	Indikace.....	3 – 4
2.2	Kontraindikace	4
3	Technická data.....	4 – 5
3.1	Velikostní tabulka	4
3.2	Příslušenství.....	5
3.3	Materiály.....	5
4	Aplikace	5
5	Technické údaje.....	5
6	Údržba	6
7	Použití.....	6
7.1	Omezení použití	6
7.2	Doba používání	6
8	Garance.....	6 – 7
8.1	Délka garance	6
8.2	Rozsah garance	6 – 7
9	Prohlášení o shodě.....	7
10	Likvidace.....	7

1 Všeobecná doporučení

209R1/...

Vážení zákazníci,

Váš lékař vám předepsal vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku pooperační obuv „Apollo“, která byla vyrobena v souladu s posledními znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje.



Postupujte prosím podle doporučení tohoto návodu. Pomůže vám to k úspěšné léčbě. Váš vyškolený personál v prodejně zp. nebo ošetřující lékař vám rád zodpoví všechny vaše otázky o používání pooperační obuvi „Apollo“.

2 Oblast použití

S výraznou podrážkou ve tvaru kolébky, pooperační obuv „Apollo“ následuje koncept techniky nulového podpatku.

To zajišťuje rozložení a zmírnění tlaku při chůzi a během stojné fáze po celé ploše nohy, čímž se zlepšuje hojení ran v přednoží. Vyjímatelná polstrovaná vložka zmírňuje tlak po celé délce chodidla.

2.1 Indikace

- Pooperační hojení ran v oblasti přednoží, jako např. operace Hallux Valgus.



Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními v oblasti nohy a hlezna jsou otlačky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat nohy, bandáže nebo ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů či otázek, zpomalení či přerušení hojení rány („komplikace“), kontaktujte prosím svého lékaře nebo vyškolený personál v prodejně zp.



Vzhledem ke tvaru podrážky ve tvaru kolébky dochází k rychlé mobilizaci pacienta. U některých chirurgických zákroků, které jsou v blízkosti metatarsálních kostí, je nutné mobilizaci pacienta konzultovat s ošetřujícím lékařem a pokud je to nutné, zvolit jiný druh terapeutické obuvi, jako např. model „Jupiter“ 205R1/...

2.2 Kontraindikace

- Nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy od tlaku
- Nepoužívejte přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku (před aplikací chraňte pokožku ponožkou a poranění obvazem)
- Nepoužívejte při nestabilních zlomeninách či výskytu diabetické osteoartropatie (tj. Charcotova noha)
- Použití pouze s berlemi

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

Měrný bod: velikost obuvi

Velikost obuvi	Vnitřní délka obuvi	Vnitřní šířka obuvi	Obj. číslo
35 – 36	cca. 239 mm	cca. 82 mm	209R1/36
37 – 38	cca. 252 mm	cca. 85 mm	209R1/38
39 – 40	cca. 265 mm	cca. 88 mm	209R1/40
41 – 42	cca. 279 mm	cca. 91 mm	209R1/42
43 – 44	cca. 292 mm	cca. 94 mm	209R1/44
45 – 46	cca. 305 mm	cca. 97 mm	209R1/46
47 – 48	cca. 319 mm	cca. 100 mm	209R1/48
49 – 50	cca. 331 mm	cca. 103 mm	209R1/50

“Apollo” je možné nosit na levé i pravé noze.



Nepoužívejte obuv jako pár.

3.2 Příslušenství

**Polstrovaná vložka, 10 mm,
vyrobená z materiálu EVA,
symetrický tvar**

Svršek přednoží

Velikost obuvi	Obj. číslo	Velikost obuvi	Obj. číslo
35 – 36	209R11/36	35 – 36	209R12/36
37 – 38	209R11/38	37 – 38	209R12/38
39 – 40	209R11/40	39 – 40	209R12/40
41 – 42	209R11/42	41 – 42	209R12/42
43 – 44	209R11/44	43 – 44	209R12/44
45 – 46	209R11/46	45 – 46	209R12/46
47 – 48	209R11/48	47 – 48	209R12/48
49 – 50	209R11/50	49 – 50	209R12/50

3.3 Materiály

Pooperační obuv je vyrobena z následujících materiálů:

Podrážka:	100%	PU	Polyurethan
Polstrovaná vložka:	pěna: 100%	EVA	Ethylen vinyl acetát
	potah: 100%	PES	Polyester
Vrchní materiál a podšívka:	100%	PES	Polyester
Suchý zip:	100%	PA	Polyamid

4 Aplikace

Na pooperační obuv rozepněte všechny suché zipy a umístěte poraněnou nohu do boty na vložku patou na doraz k opatku. Poté zavřete botu a utáhněte všechny suché zipy tak, aby noha nemohla vyklouznout.



5 Technické údaje

Pro individuální léčbu lze upravovat podrážku boty broušením a lepením. Avšak výrobce nebo dodavatel vzhledem k těmto změnám nenese odpovědnost za případné škody nebo následné škody, resp. kontraindikace.

6 Údržba



- Před praním uzavřete všechny suché zipy
- Nesušte na topení

7 Použití

Pooperační obuv "Apollo" vyžaduje individuální nastavení na pacienta dle indikace. Veškeré nastavení musí být provedeno kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání je určena ošetřujícím lékařem.

8 Garance

8.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tento produkt, pooperační obuv "Apollo" 209R1, je garance 3 měsíce.

8.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení. Výrobek byl certifikovánými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození. To samé platí i pro distributora produktu.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený výrobek pooperační obuv "Apollo" 209R1 je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EWG.

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o. Husova
54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz