



CE

Obuv pro odlehčení paty

203R1 Model „Mars“

213R1 Model „Mars S“

Obsah

1	Všeobecná doporučení	3
2	Oblast použití	3 -- 4
2.1	Indikace	4
2.2	Kontraindikace.....	4
3	Technická data	5 – 7
3.1	Velikostní tabulka	5
3.2	Příslušenství.....	6
3.3	Materiály.....	7
4	Aplikace.....	7
5	Technické údaje.....	8
6	Údržba.....	8
7	Použití	8
7.1	Omezení použití	8
7.2	Doba používání	8
8	Garance.....	9
8.1	Délka garance	9
8.2	Rozsah garance	9
9	Prohlášení o shodě	10
10	Likvidace	10

1 Všeobecná doporučení



Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a berte na vědomí zejména bezpečnostní pokyny.

Obrázky jednotlivých typů



Obj. číslo **230R1** "Mars"
polstrovaná podrážka ve
střední části chodidla,
zkrácená konstrukce podrážky
v patní části, vyjímatelná
vločka.



Obj. číslo **213R1** "Mars S"
nová vylepšená konstrukce
podrážky s cíleným
přesunutím těžiště těla na
přední část chodidla,
mediální klenbová vločka.

2 Oblast použití

Hlavním rysem obuvi pro odlehčení paty je rozložení tlaku při chůzi a zmírnění tlaku v patní části, čímž se zlepšuje hojení v oblasti paty. Obuv pro odlehčení paty obepíná kotník a přednoží měkce polstrovaným svrškem boty. Pásky suchého zipu drží nohu v určeném místě a brání sklouzávání nohy z boty. Polstrovaná vložka navíc pomáhá předcházet otlakům v oblasti přednoží. Obuv lze snadno zešíroka otevřít a díky nastavitelným páskům suchého zipu nabízí prostor i pro bandážovanou nohu.

Model "Mars S" má navíc vložku, kterou lze přizpůsobit v závislosti na anatomii mediální klenby, čímž dochází k lepší mediální podpoře a odlehčení paty.

2.1 Indikace

Rány / Poranění v oblasti přednoží způsobená:

- Poranění v oblasti paty způsobená diabetes mellitus
- Uzávěry periferních artérií
- Další rány v oblasti paty
- Pooperační stavy a traumata v oblasti paty



Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními v patní oblasti jsou otlaky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat nohy, bandáže nebo ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů či otázek, zpomalení či přerušování hojení rány (“komplikace“), kontaktujte prosím svého lékaře nebo vyškolený personál v prodejně zp.

2.2 Kontraindikace

- Nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy od tlaku
- Nenoste přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku (před aplikací chraňte pokožku ponožkou a poranění obvazem)
- Nepoužívejte při nestabilních zlomeninách či výskytu diabetické neuro-osteoartropatie (tj. Charcotova noha)
- Alergie na užití materiály

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

„Mars“

Velikost boty	Vnitřní délka boty	Vnitřní šířka obuvi	Obj. číslo
35 – 37	cca. 225 mm	cca. 87 mm	203R1/S
38 – 40	cca. 235 mm	cca. 90 mm	203R1/M
41 – 43	cca. 255 mm	cca. 95 mm	203R1/L
44 – 46	cca. 275 mm	cca. 100 mm	203R1/XL

„Mars S“

Velikost boty	Vnitřní délka boty	Vnitřní šířka obuvi	Obj. číslo
34 – 36	cca. 240 mm	cca. 87 mm	213R1/S
37 – 39	cca. 260 mm	cca. 91 mm	213R1/M
40 – 42	cca. 280 mm	cca. 100 mm	213R1/L
43 – 45	cca. 300 mm	cca. 105 mm	213R1/XL
46 – 48	cca. 320 mm	cca. 109 mm	213R1/XXL

Všechny typy je možné nosit na levé i pravé noze.

3.2 Příslušenství

"Mars"

Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost boty
200310/S	35 – 37
203R10/M	38 – 40
203R10/L	41 – 43
203R10/XL	44 – 46

"Mars S"

Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost boty
213R10/S	34 – 36
231R10/M	37– 39
231R10/L	40 – 42
213R10/XL	43 – 45
213R10/XXL	46 – 48

"Mars S "

Polstrovaná vložka

Objednací číslo	Velikost boty
213R12/ S	34-36
213R12/M	37-39
213R12/L	40-42
213R12/XL	43-45
213R12/XXL	46-48

"Mars"

Ochranný kryt paty se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost boty
203R11/S	35 – 37
203R11/M	38 – 40
203R11/L	41 – 43
203R11/XL	44 – 46

"Mars S"

Ochranný kryt paty se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost boty
213R11/S	34 – 36
213R11/M	37 – 39
213R11/L	40 – 42
213R11/XL	43 – 45
213R11/XXL	46 – 48

Materiál pro individuální úpravu (černý)

Obj. číslo	Popis
-------------------	--------------

20T3/S	Distanční elastická textilie, 140 cm
26T7/S	Oboustranný suchý zip, 135 cm
51T1/14S	Bavlněný lemovaný popruh, 14 mm
60T18F25S	Suchý zip flauš, 25 mm
60T18K25S	Suchý zip háček, 25 mm

3.3 Materiály

Obuv pro odlehčení paty je vyrobena z následujících:

Podrážka:	TR - tvarovaná podrážka
Vložka:	100% EVA Ethylen vinyl acetát
Vrchní materiál a podšívka:	100% PES Polyester
Suchý zip:	100% PA Polyamid

4 Aplikace

Na obuvi pro odlehčení paty rozepněte všechny suché zipy a umístěte poraněnou nohu na polstrování metatarzů. Zatímco zraněná pata je volná, střední část nohy a přednoží se musí opírat o polstrovanou vložku. Poté zavřete botu a utáhněte všechny suché zipy tak, aby noha nemohla vyklouznout. Obuv pro odlehčení paty je možné nosit na levé i pravé noze.

Pouze pro model Mars S - vyjměte z boty tlumící vložku i se suchými zipy. Nyní si můžete prohlédnout mediální klenbovou vložku a upravit ji podle potřeby nebo ji otočit na stranu postiženého chodidla. Poté opět připevněte do boty pomocí pásků ze suchých zipů.

5 Technické údaje



Pro individuální léčbu lze upravovat podrážku boty broušením a lepením. Avšak výrobce nebo dodavatel vzhledem k těmto změnám nenese odpovědnost za případné nebo následné škody, resp. kontraindikace.

6 Údržba



- Před praním uzavřete všechny suché zipy
- Nesušte na topení

7 Použití

Obuv pro odlehčení paty vyžaduje individuální nastavení na pacienta dle indikace. Veškeré nastavení musí být provedeno kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání obuvi pro odlehčení paty je určena ošetřujícím lékařem.

8 Garance

8.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tyto produkty, obuv pro odlehčení paty 203R1 a 213R1 je garance 3 měsíce.

8.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení. Výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými techniky, přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození. To samé platí i pro distributora produktu.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedené výrobky obuvi pro odlehčení přednoží 203R1 a 213R1 jsou v souladu s požadavky směrnice 93/42/EWG.

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz