

Návod k použití (IFU)

alginür® Ag – Stříbrný alginátový antimikrobiální krycí materiál na rány URČENO PRO STŘEDNĚ AŽ SILNĚ EXSUDUJÍCÍ RÁNY

Popis produktu

alginür® Ag je sterilní, netkaná, antimikrobiální, vysoce savá krycí vložka složená z alginátu vápenatého s vysokým obsahem kyseliny guluronové (high G), karboxymethylcelulózy (CMC) a iontového stříbrného komplexu (stříbrno-sodný hydrogen zirkonium fosfát), který uvolňuje stříbrné ionty při kontaktu s exsudátem.

Při absorpci exsudátu dochází k tvorbě gelu, který napomáhá autolytickému debridementu a zároveň udržuje vlhké prostředí pro optimální hojení rány. Gel umožňuje atraumatické odstranění bez poškození nové tkáně.

Produkt vykazuje antimikrobiální účinek proti širokému spektru mikroorganismů běžně přítomných při infekci ran, a to až po dobu **14 dní (in vitro)**.

Stříbrný alginát rovněž pomáhá redukovat zápach infikovaných ran díky svému antimikrobiálnímu působení.

Indikace

alginür® Ag je určen pro ošetření středně až silně exsudujících, povrchových i hlubokých ran, včetně:

- pooperačních ran
- traumatických ran (dermální léze, poranění, chirurgické řezy)
- bércových vředů
- dekubitů
- diabetických vředů
- štěpových a odběrových míst
- kavernózních (dutinných) ran

Díky obsahu alginátu může pomoci při kontrole **mírného krvácení**.

Lze použít i pod **kompresní terapii**.

Použití u **infikovaných ran** nebo **ran se zvýšeným rizikem infekce** je možné pod dohledem kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.

Pouze pro **zevní použití**.

Kontraindikace

- Nepoužívat na **suché nebo mírně exsudující rány**
- Nepoužívat u osob s **alergií na algináty nebo stříbro**
- Není určeno ke **kontrole silného krvácení**

Upozornění a bezpečnostní opatření

- Při použití na suché rány může krytí přilnout – v takovém případě zvlhčete sterilním fyziologickým roztokem před odstraněním.
- Výkonnost může být ovlivněna nadměrným použitím mastí na bázi vazelíny.
- Vyhněte se kontaktu s elektrodami a vodivými gely během měření jako EKG, EEG.
- Krytí je třeba **odstranit před vyšetřením MRI**.
- V případě klinické infekce nenahrazuje stříbro systémovou léčbu.
- U dětí a novorozenců je málo dat o dlouhodobém použití stříbra.
- Produkt je určen pro **krátkodobé použití – maximálně 30 dní**.

Návod k použití

Příprava místa a aplikace

1. Ránu dle potřeby debridujte a vyčistěte dle standardních protokolů.
2. Osušte okolní kůži.
3. Zvolte velikost krytí mírně větší než rána.
4. Zamezte vracení zbylého materiálu do obalu (riziko kontaminace).
5. Pokud je potřeba, materiál můžete přestříhnout tak, aby přesahoval okraje rány.
6. Překryjte sekundárním, **neokluzivním krytím** a zajistěte.

Výměna a odstranění krytí

1. Krytí může zůstat na místě až **7 dní**, v závislosti na stavu rány a množství exsudátu. Zpočátku může být nutná denní výměna.
2. Krytí vyměňte, když sekundární krytí dosáhne své absorpční kapacity, nebo podle potřeby.
3. Jemně odstraňte sekundární krytí.
4. Pokud je rána suchá, krytí navlhčete fyziologickým roztokem před odstraněním.
5. Opatrně vyjměte krytí a zlikvidujte dle místních směrnic.
6. Dle potřeby opláchněte ránu a aplikujte nové krytí.