

Návod k použití (IFU)

nurofoam® sensitive – silikonové pěnové krytí s lemem

nurofoam® sensitive Sacral – anatomicky tvarované silikonové pěnové krytí

Určeno pro rány se středním až silným výtokem exsudátu

Účel použití

Krytí nurofoam® sensitive je určeno k ošetření akutních i chronických ran. Absorbuje přebytečný exsudát, udržuje vlhké prostředí podporující hojení, chrání okolní kůži před macerací a díky jemné silikonové vrstvě minimalizuje bolest i trauma při převazu. Sakrální varianta je anatomicky přizpůsobena oblasti kostrče a lépe distribuuje tlak.

Popis produktu

Sterilní vícevrstvé krytí složené z těchto vrstev:

- **Vnější polyuretanová fólie** – voděodolná, paropropustná, snižuje tření a slouží jako bariéra proti bakteriím.
- **Hydrofilní polyuretanová pěna** – silně absorbuje exsudát a odvádí jej od rány.
- **Perforovaná silikonová kontaktní vrstva** – šetrně přilne k pokožce, nelepí se k rannému lůžku, umožňuje průchod exsudátu a brání vrůstání granulační tkáně.

Výrobek neobsahuje přírodní latex ani jeho deriváty.

Indikace

Používá se pod dohledem zdravotnického pracovníka k ošetření:

- proleženin (včetně prevence v risikových oblastech, zejména sakrální),
- venózních či arteriálních bérkových ulcerací,
- diabetických ulcerací,
- pooperačních ran, oděrek, traumat a povrchových (částečných) popálenin,
- dutinových ran jako sekundární krytí,

- neporušené, ale ohrožené kůže v rámci prevence dekubitů nebo poškození třením.
-

Kontraindikace a omezení

- Nevhodné pro suché či minimálně secernující rány a popáleniny plné tloušťky.
 - Nepoužívejte s oxidujícími roztoky, například s hypochloritem nebo peroxidem vodíku – rozkládají polyuretanovou pěnu.
 - Není určeno k chirurgické implantaci.
 - Krytí znovu nepoužívejte, nestříhejte a nesterilizujte.
-

Upozornění

- Krytí ponechejte nejvýše sedm dní, případně do nasycení pěny; frekvenci výměny určete podle klinického stavu pacienta.
 - Preventivní použití nenahrazuje komplexní program prevence dekubitů (polohování, výživa, hydratace, péče o kůži, mobilita).
 - Nepřekládejte dvě krytí přes sebe a nepoužívejte, je-li primární obal poškozen.
 - Likvidujte podle místních předpisů pro zdravotnický odpad a uchovávejte mimo dosah dětí.
-

Pokyny k použití

1. Ránu vyčistěte dle standardních postupů a okolní kůži pečlivě osušte.
2. Zvolte rozměr, aby pěnový polštářek přesahoval okraj rány nejméně o 2 cm (u sakrální varianty zakryjte celou ohroženou oblast).
3. Odstraňte krycí fólie a přiložte bílou, pěnovou stranou na ránu nebo neporušenou kůži určenou k prevenci.
4. Jemně vyhladte a přitlačte okraje tak, aby silikon dobře přilnul.

5. Krytí pravidelně kontrolujte; při prosáknutí exsudátu k okrajům nebo při poškození jej co nejdříve vyměňte.
6. Při odstraňování pomalu nadzvedněte okraj a sejměte krytí směrem ke středu rány; použité krytí zlikvidujte jako zdravotnický odpad.

Hlášení závažných událostí

Každý závažný incident související s tímto zdravotnickým prostředkem oznamte výrobci a příslušnému dozorovému orgánu členského státu, ve kterém k události došlo.

Výrobce: ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED, Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial estate, Winsford England CW7 3RT

ID číslo: 02666957

