

NÁVOD K POUŽITÍ (IFU)

nürofoam® Sensitive Silicone Non-Border Foam Dressing **URČENO PRO STŘEDNĚ AŽ SILNĚ SECERNUJÍCÍ RÁNY**

Popis produktu

nürofoam® Sensitive Silicone Non-Border Foam Dressing je sterilní pěnové krytí na rány složené z hydrofilní, absorpční polyuretanové pěny navržené pro absorpci exsudátu. Spodní kontaktní vrstva se skládá z perforovaného silikonového gelu, který zajišťuje šetrný kontakt s ranou a minimalizuje trauma při převazu.

Vrchní vrstva krytí tvoří růžová nepropustná polyuretanová membrána, která slouží jako bariéra proti bakteriím. Krytí udržuje vlhké prostředí, které napomáhá hojení rány.

Neobsahuje přírodní latex.

Indikace

nürofoam® Sensitive Silicone Non-Border Foam Dressing je určen pro středně až silně secernující akutní a chronické rány, jako jsou:

- tlakové vředy,
- bérkové vředy,
- diabetické vředy,
- tržné rány,
- odřeniny,
- místa odběru a štěpů,
- pooperační rány,
- popáleniny.

Krytí je vhodné také pro použití jako sekundární krytí na dutinové rány a může být použito pod kompresivní bandáží.

Kontraindikace

- Nepoužívat u pacientů se známou přecitlivělostí na polyuretanovou pěnu nebo silikon.
 - Nepoužívat s oxidačními roztoky jako hypochlorit nebo peroxid vodíku, které mohou poškodit absorpční složku krytí.
 - Nevhodné pro chirurgickou implantaci.
-

Upozornění a opatření

- Nepoužívat na suché nebo jen lehce secernující rány.
 - Nepoužívat na hluboké popáleniny.
 - Nepoužívat znovu ani částečně, mohlo by dojít k narušení sterility a účinnosti.
 - Výrobek není určen k vnitřnímu užití a musí být uchováván mimo dosah dětí a zvířat.
 - Nesmí být překrýván okluzivním krytím, což by mohlo snížit účinnost.
 - Používejte pouze pod dohledem kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.
-

Návod k použití

Příprava místa aplikace a aplikace krytí:

1. V případě potřeby očistěte ránu podle standardních postupů a osušte okolní pokožku.
2. Vyberte velikost krytí tak, aby pěnový polštářek přesahoval okraje rány alespoň o 2 cm.
3. Pokud je nutné, upravte velikost krytí sterilními nůžkami.
4. Umístěte krytí bílou stranou na ránu a přiložte jemným tlakem.
5. Krytí upevněte vhodným způsobem (např. pomocí fixace nebo kompresní bandáže).
6. Nepoužitý materiál zlikvidujte dle lokálních předpisů kvůli riziku kontaminace.

Výměna a odstranění krytí:

1. Krytí může zůstat na místě až 7 dní, v závislosti na stavu pacienta a míře exsudace.
2. V případě potřeby nebo dle doporučení lékaře vyměňte dříve.
3. Krytí šetrně odstraňte a zlikvidujte dle místních předpisů.
4. Před aplikací nového krytí dle potřeby znovu vyčistěte ránu.

Výrobce: ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED, Premier Park, 33 Road One,
Winsford Industrial estate, Winsford England CW7 3RT ID číslo: 02666957

