



NÁVOD K POUŽITÍ

Příslušenství zdravotních kočárků



Výrobce: PATRON Bohemia a.s., Českolipská 3419, 276 01 Mělník, Česká republika
tel.: 315 630 120 / fax: 315 630 199
<http://www.patron.eu> / email: reha.cz@patron.eu

Stříška ochranná

(BASIC, CLASSIC, COMFORT, DIXIE)

Nasazení:

Odepněte klopky v horní části opěradla a úchyty střechy zasuňte do držáků střechy (viz.detail). Boční díly potahu stříšky zapněte pomocí plastových objemek na podvozek, případně odepněte pomocí zipů a uložte do síťové kapsy. Střechu můžete polohovat zatlačením na rám střechy.

Odejmutí:


Zmáčkněte pojistky obou úchytlů střechy a vytáhněte úchyty střechy z držáků střechy. V případě použití bočního potahu odepněte plastové objímky z podvozku.



BASIC, CLASSIC, COMFORT



DIXIE

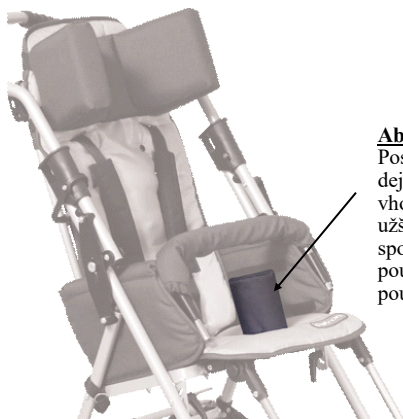

Abdukční klín

Posaďte dítě do kočárku a zjistěte, kde by měl být klín umístěn. Vyneste dítě z kočárku. Na spodní straně sedáku najděte úchytný otvor vhodný pro upevnění klínu. Nasaďte šroub klínu do otvoru tak, aby užší část klínu směřovala k zadové opěrce a maticí ho zajistěte na spodní straně sedáku. V případě užití na kočárku TOM 5 Streeter, použijte dlouhý šroub. V případě užití na kočárku TOM 5 Clipper, použijte šroub krátký.

Opěrka hlavy nastavitelná (pár)

(CLASSIC, COMFORT)

CLASSIC:

V horní části potahu zadové opěrky jsou čtyři otvory s obuvnickým kroužkem (u kočárku BEN je otvorů s obuvnickým kroužkem šest, což umožňuje dvě výškové polohy). Šrouby obou částí opěrky hlavy nasaďte do těchto otvorů a prostrčte je i otvory v plechu zadové opěrky a zajistěte pomocí matic.

COMFORT:

Nejdříve odepněte podhlavník (pomocí suchého zipu) a následně přišroubujte na požadované místo opěru hlavy. Podhlavník připevněte zpět na místo.

Pomocí vodorovných drážek v plechu opěrky hlavy můžete nastavit požadovanou šířku doplňku.



Opěrka hlavy s podporou krční páteře

Postupujte dle pokynů uvedených v předešlé kapitole. Polštářek pro podporu krční páteře upevněte v potřebné výšce pomocí suchých zipů.

U kočárků TOM4 a TOM5 je opěrka hlavy COMFORT.

Opěrka hlavy jednoduchá s boční fixací


(BASIC, CLASSIC)

Posadte dítě do kočárku a zjistěte v jaké výši by měla být opěrka hlavy upevněna. Vyndejte dítě z kočárku. Opěrku hlavy přiložte v určené výšce na zádovou opěrku a zajistěte v zadní části zádové opěrky pomocí popruhů se suchými zipy a plastových oválků. U kočárku BASIC navlékněte gumu.




Opěrka boční nastavitelná (pár)

Posadte dítě do kočárku a zjistěte v jaké výšce by měla být opěrka upevněna. (Dítě by mělo mít opěrku v podpaží.) Vyndejte dítě z kočárku. Na zadní straně zádové opěrky vyhledejte úchytné otvory vhodné pro upevnění opěrky rozepneme zipy a podle jejich umístění prořízněte otvory v širší plechu do potahu kočárku. Plechy provlékněte potahem. Šrouby prostrčte otvory v plechu zádové opěrky a zajistěte maticemi. Pomocí vodorovných drážek v plechu opěrky boční můžete nastavit požadovanou šířku doplňku. Kde nejsou zipy, prořízněte koženkové pásky.

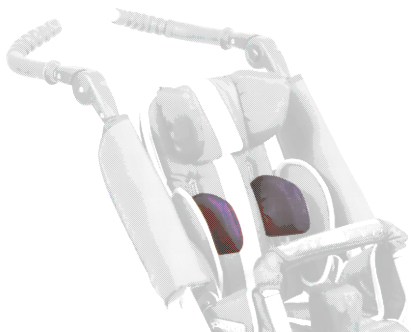

Opěrka kyčelní (pár)

Posadte dítě do kočárku a určete v jaké výšce by měla být opěrka umístěna. Na základě tohoto zjištění nalepte pod potah na přední části zádové opěrky suchý zip. Opěrku připevněte suchým zipem na zip, který jste přilepili.

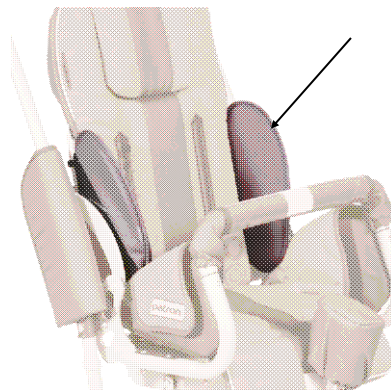

Lumbální

podpora

(š.15cm, š.25cm, 35cm)

Pokud jsou u kočárku v opěradle kožené svislé pásky (u kočárku se zipy, zipy rozepněte), také je prořízněte v předem zjištěné výšce a v šířce 5 cm. Vzniklými otvory provlékněte suchý zip smyčkový (š.5cm, dl.30cm), který je našitý na bederní podpoře. Přizvedněte potah opěradla na bocích a na plech přilepte suchý zip háčkový - 2ks.

Klín zádové opěry

Odlepte potah zádové opěry (pomocí suchých zipů). Klín zádové opěry nalepte do požadované výšky pomocí suchých zipů. Nalepte potah zpět.



Pás fixační 2 bodový

(BASIC, CLASSIC, COMFORT)

Nasazení:

U kočárků CLASSIC a COMFORT provlékněte popruhy mezi zádovou opěrkou a bočnicemi. Zajistěte pomocí spodních brzdových plastových spon, umístěných na zadním plechu zádové opěrky (popruhy při provléknutí do brzdových spon přeložte na polovinu). V případě, že jsou na příslušných místech potahu u kočárků BASIC našité suché zipy, připevněte pás pomocí těchto suchých zipů.

Nastavení a manipulace:

Rozepněte plastovou sponu pásu a posaďte dítě do kočárku. Zapněte spony. Pomocí brzdových spon (nebo suchých zipů) nastavte


délku popruhů tak, aby pás dostatečně fixoval, ale nikde neškrtl. Další manipulaci s pásem provádějte pomocí plastové spony.

Pás fixační 4 bodový


(BASIC, CLASSIC, COMFORT)

Nasazení:

Spodní popruhy u kočárků CLASSIC a COMFORT provlékněte mezi zádovou opěrkou a bočnicemi. Zajistěte pomocí spodních brzdových plastových spon, umístěných na zadním plechu zádové opěrky (popruhy při provléknutí do brzdových spon přeložte na polovinu). Horní (slabší) popruhy provlékněte otvory zádové opěrky, poté pásy provlékněte horními brzdovými plastovými sponami, umístěnými na zadním plechu zádové opěrky. Volné konce popruhů provlékněte zpět sponami, aby vzniklo oko a zajistěte. V případě, že v brzdových plastových sponách budou upevněny dva doplňky, popruhy provlékněte brzdovými plast. sponami jednoduše (podle potřeby lze nastavit úhel jejich otočení). V případě, že jsou na příslušných místech popruhu u kočárků BASIC našité suché zipy, připevněte pás pomocí těchto suchých zipů.

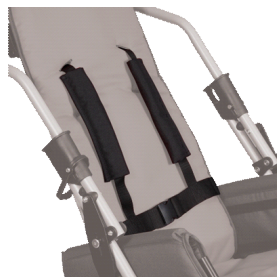

detail

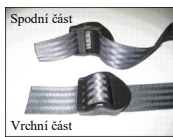

Z této strany je popruh přišitý.

Nastavení a manipulace:

Rozepněte všechny tři plastové spony pásu, posaďte dítě do kočárku a zapněte spony. Pomocí brzdových plastových spon (nebo suchých zipů) nastavte délku popruhů tak, aby pás dostatečně fixoval, ale nikde neškrtl. Další manipulaci s pásem provádějte pomocí plastových spon.



Hrudní pásek ke čtyřbodovému pásu

Hrudní pásek navlékněte na horní (slabší) popruhy fixačního čtyřbodového pásu

Pás fixační pětibodový

(BASIC, CLASSIC, COMFORT)


Nasazení:

V případě, že jsou u kočárku BASIC na příslušných místech popruhu našité suché zipy, připevněte pás pomocí těchto zipů. Spodní popruhy provlékněte mezi zádovou opěrkou a bočnicemi a provlékněte je spodními brzdovými plastovými sponami umístěnými na zadním plechu zádové opěrky, volné konce popruhů provlékněte zpět sponami, aby vzniklo oko a zajistěte. V případě, že v brzdových plastových sponách budou upevněny dva doplňky, popruhy provlékněte brzdovými plast. sponami jednoduše. Horní (slabší) popruhy provlékněte otvory zádové opěrky, poté popruhy provlékněte horními brzdovými plastovými sponami, umístěnými na zadním plechu zádové opěrky. Volné konce popruhů provlékněte zpět sponami, aby vzniklo oko a zajistěte. V případě, že v brzdových plastových sponách budou upevněny dva doplňky, popruhy provlékněte brzdovými plast. sponami jednoduše (otočné - nastavte dle potřeby).

Nastavení a manipulace:

Rozepněte plastovou sponu a posaďte dítě do kočárku. Zjistěte, kde bude umístěn mezinožní pás. Pomocí brzdových plastových spon nastavte délku popruhů tak, aby pás dostatečně fixoval, ale neskřtil. Dítě vyndejte z kočárku. Na plechu sedáku najdete vhodný uchytný otvor k umístění mezinožního pásu a podle umístění prořízněte otvor do příslušného koženkového pásku na potahu sedáku. Otvorem provlékněte kotvu s popruhem (bez šroubu a matice). Nasadte šroub z vrchu do kotvy a otvoru v plechu a zajistěte maticí ve spodu plechu sedáku (v případě, že máte abdukční klín, nemusíte kotvu s popruhem provlékat potahem, ale upevněte jej pod abdukční klín).

detail

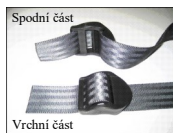

Z této strany je popruh přisítý.



Pás nožní poutací

Nasazení:

Pás upevněte ke stupačce pomocí popruhů se suchým zipem. Popruhy provlékněte otvory ve stupačce a na spodní straně stupačky je zapněte pomocí suchých zipů. Kotníky upevněte do poutacího pásu pomocí popruhu se suchým zipem, který provlékněte kovovou sponou a zajistěte suchým zipem. Dbejte na to aby nohy dítěte byly dostatečně fixovány, ale ne příliš utaženy.

Fixace ramen a hrudníku

(BASIC, CLASSIC, COMFORT, TBX)

Nasazení:


Pokud jsou u kočárku BASIC na horních popruzích plastové žebříčky, použijeme je, stejně tak i suché zipy. Spodní popruhy provlékněte mezi zadovou opěrkou a bočnicemi a provlékněte je spodními brzdovými plastovými sponami umístěnými na zadním plechu zadové opěrky, volné konce popruhů provlékněte zpět sponami, aby vzniklo oko a zajistěte. V případě, že v brzdových plastových sponách budou upevněny dva doplňky, popruhy provlékněte brzdovými plast. sponami jednoduše. Otvory v desce zadové opěrky provlékněte horní popruhy a provlékněte je horními brzdovými plastovými sponami, umístěnými na zadním plechu zadové opěrky. Volné konce popruhů provlékněte zpět sponami, aby vzniklo oko a zajistěte. V případě, že v brzdových plastových sponách budou upevněny dva doplňky, popruhy provlékněte brzdovými plast. sponami jednoduše (pootočením lze nastavit vhodný úhel). Z horních popruhů vyvlékněte průvlečné spony a popruhy provlékněte otvory v potahu a v desce zadové opěrky, nakonec průvlečné spony opět navlékněte (detail).

Nastavení a manipulace:

Rozepněte aktovkové zámky, odklopte fixaci. Posad'te dítě do kočárku, nasad'te fixaci, a zapnutím aktovkových zámků dítěte zajistěte. Nastavte délku všech popruhů tak, aby dítě fixovala, ale neškrtla a zajistěte pomocí brzdových plastových spon. Další manipulaci s fixací provádějte pomocí aktovkových zámků.



detail

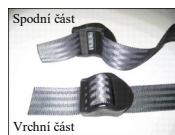

Z této strany je popruh přišitý.

Vesta fixační

(BASIC, CLASSIC, COMFORT, TBX)

Nasazení:


Boční popruhy provlékněte mezi zadovou opěrkou a bočnicemi. Spodní boční popruhy provlékněte spodními brzdovými plastovými sponami umístěnými na zadním plechu zadové opěrky, volné konce popruhů provlékněte zpět sponami, aby vzniklo oko a zajistěte. V případě, že v brzdových plastových sponách budou upevněny dva doplňky, popruhy provlékněte brzdovými plast. sponami jednoduše. Horní boční popruhy provlékněte horními brzdovými plastovými sponami, umístěnými na zadním plechu zadové opěrky. Volné konce popruhů provlékněte zpět sponami, aby vzniklo oko a zajistěte. V případě, že v brzdových plastových sponách budou upevněny dva doplňky, popruhy provlékněte brzdovými plast. sponami jednoduše (pootočením nastavte vhodný úhel). Z horních popruhů vyvlékněte průvlečné spony a popruhy provlékněte otvory v potahu a v desce zadové opěrky, nakonec průvlečné spony opět navlékněte (detail).

Nastavení a manipulace:

Rozepněte zip vesty a aktovkové zámky horních popruhů. Posad'te dítě do kočárku, zapněte zip a aktovkové zámky. Pomocí brzdových plastových spon a průvlečných spon nastavte délku popruhů tak, aby vesta dostatečně fixovala, ale neškrtla. Další manipulaci s vestou provádějte pomocí aktovkových zámků a zipu.



detail

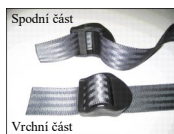

Z této strany je popruh přišitý.

Pás fixační hrudní

Nasazení:

Posaďte dítě do kočárku a zjistěte v jaké výšce by měl být fixační pás upevněn. Vyndejte dítě z kočárku. Fixační pás přiložte v požadované výšce na zádivovou opěrku a zajistěte v zadní části zádivové opěrky popruhy pomocí posuvných spon a suchých zipů.

Manipulace:

Odpojte suché zipy na pásech. Posaďte dítě do kočárku a zapněte pásy pomocí suchých zipů tak, aby dítě dostatečně fixovalo, ale neškrtly.



Kalhotky sedací fixační

Nasazení:

Popruhy se suchými zipy protáhněte mezerou mezi potahem opěradla a sedákem. Popruhy zavléknete za zadní trubku sedátka a zajistěte pomocí suchých zipů. Horní ušší popruhy provlékněte mezi zádivovou opěrkou a bočnicemi a provlékněte je horními brzdovými plastovými sponami, umístěnými na zadním plechu zádivové opěrky. Volné konce popruhů provlékněte zpět sponami, aby vzniklo oko a zajistěte. V případě, že v brzdových plastových sponách budou upevněny dva doplňky, popruhy provlékněte brzdovými plast. sponami jednoduše (lze je otočit podle potřeby).

Nastavení a manipulace:

Rozepněte aktovkové zámky a posaďte dítě do kočárku. Zapněte aktovkové zámky.

Pomocí brzdových spon nastavte délku popruhů tak, aby kalhotky dostatečně fixovaly, ale neškrtly. Další manipulaci provádějte pouze pomocí aktovkových zámků.



Chrániče boční (pár)

-chránič připevněte na uzávěr vodítka pomocí suchých zipů.

TOM5 a JACKO má zipy dělitelné

FLEXI - sada

(vymezovací polštářky)

Sada šesti polštářků umožňuje různé nastavení šíře sedačky.



Kryt proti dešti

Kryt proti dešti natáhněte přes kočárek tak, aby kryl střechu kočárku i jeho podnožku. Skladujte čistý a suchý.



Náložník letní

- náložník navlékněte na podnožku, podvlékněte pod hrazdičkou a připevněte ho pásky se suchým zipem na trubku vodítka.



Náložník zimní

Horní a spodní popruhy zajistěte v zadní části zádové opěrky pomocí suchých zipů.

V náložníku jsou všité koženkové pásy, které po proříznutí umožní použití abdukčního klínu, čtyřbodového pásu, dvoubodového pásu, fixačních kalhotek a fixace ramen a hrudníku.



Stoleček přídatný

Nasazení:

Z kočárku vyjměte hrazdičku a nasadte trubky stolečku do otvorů místo hrazdičky – zajistěte pomocí pérové pojistky.

Hloubkové nastavení:

Uvolněte šrouby pod deskou stolečku, nastavte hloubku a šrouby utáhněte.



TOM4



TOM5



Podstavec pokojový

Pro nasazení sedačky na podstavec se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití kočárku v kapitole “Nasazení sedačky na podvozek”.

Při nastavování polohy zádové opěrky, sedáku, podnožky, ev.celé sedačky musí být vzdálenost mezi předními a zadními koly podstavce dostatečná, aby nedošlo k jeho převrácení !!!

Podstavec pokojový má výsuvné zadní nohy s aretací, nastavitelnou výšku podstavce a čtyři kolečka (dvě kolečka jsou s brzdou).

Taška na doplňky

tašku připevníte na vodítko pomocí popruhu s autopatenty.

Nosnost tašky je 1kg. Přetížení tašky zavěšené na vodítku může narušit stabilitu kočárku.



Košík pod kočárek – textilní

- košík upevníte na trubky podvozku pomocí plastových úchytek.

Maximální povolené zatížení košíku je 3 kg.

Vymezení bočnic opěry zad

Nasazení - vymezení bočnic opěry zad zavléknete za zádovou opěrku a nasadíte z obou stran pomocí čtyř plastových objímek na trubku vodítka. Horní pár objímek nasadíte mezi návlek vodítka a kloub vodítka. Pomocí suchých zipů zajistíte klopky vymezení bočnic. Spodní část vymezení bočnic zajistíte pomocí šňůr. Poloha v sedě - v poloze v sedě je nutné vymezení bočnic zezadu za zádovou opěrku překřížit a zajistit je pomocí provlečení popruhu se suchým zipem, u horní objímky plastovým trojúhelníkem s následným zapnutím suchého zipu.

V zadní části zajistíte pomocí suchých zipů.

Poloha v polosedě - vymezení bočnic zajistíte pomocí provlečení popruhu se suchým zipem plastovým trojúhelníkem s následným zapnutím suchého zipu. V zadní části zajistíte pomocí suchých zipů.

Poloha v leže - nechte vymezení bočnic volně. V případě, že si zakoupíte rovněž stříšku proti slunci, boční potahy stříšky zapněte tak, aby byly mezi bočnicemi kočárku a vymezením bočnic opěrky zad.



Abdukce kolenní - TOM5 a JACKO

Na tyč podnožky nasadíte nástavec s kolenní abdukci a do montážních otvorů na nástavci pomocí imbus šroubů upevníte.

Opěra lýtková s fixací

Na tyč podnožky nasadíte nástavec s lýtkovou opěrou a pomocí imbus šroubů upevníte.

Košík zesílený ocelový

Na zadní osu přišroubujte adaptér pro upevnění košíku. K tomuto adaptéru připevníte pomocí šroubů s plastovou rúžicí košík. Zároveň v přední části upevníte košík pomocí pásek se suchým zipem. Nosnost max 20kg.

Pojistka naklápění zad

Vyšroubujte páčku polohující zádovou opěru. Do drážky, ve které se páčka pohybuje nasadíte pojistku naklápění zad a druhou část navléknete na šroub páčky. Páčku následně našroubujte zpět.


Ochrana adaptéru hrazdičky

Po sundání hrazdičky nasadíte na adaptér plastové ucpávky, pak pružné návleky a zajistíme gumou k plastové matici ze spodku sedačky.

Chránič proti úrazu s polohováním zad

Nasazení:

Chránič připevníte na uzávěr bočního vodítka pomocí suchých zipů. Natáhněte přes záda kočárku protáhněte dírkou přes klíčku (kterou se ovládá poloha zad) a zapněte na druhou stranu bočního uzávěru vodítka pomocí suchých zipů. Popruhem utáhnete chránič zad podle potřeby.

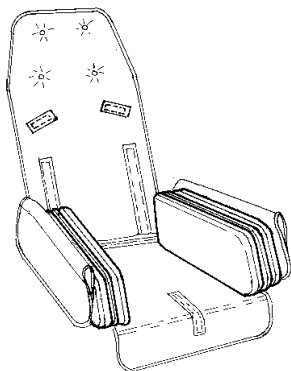

Flexi sada se stehenním vymezením

Nasazení:

Sada čtyř polštářků umožňuje dvě nastavení šíře sedačky.

Nasazují se pomocí suchých zipů které jsou na polštářích i kočárku.

Pánevní fixace TOM 4 Classic, TOM 5 Streter

Pánevní fixaci položte na sedací část kočárku. Následně na zadní straně opěradla odšroubujete šroub, který spojuje opěradlo se sedákem plastovou sponou. Ten zaměníme za delší šroub který je součástí příslušenství. Popruh nasadíte na šroub aby byl obuvnický kroužek pod hlavou šroubu. Poté sešroubujete opěradlo se sedákem. Totéž udělejte na druhé straně.

Přední popruh provlékneme knoflíkovou v potahu mezi sedadlem a bočnicí. Dále Prostrčíme oválným otvorem v plechové bočnici a svedeme ho pod sedadlo. Pod Sedadlem vyšroubujeme přední matice s plastovou hlavou a přední popruh nasadíme na vyčnívající šroub a zpětně našroubujeme matici. Totéž provedeme na druhé straně.

Pánevní fixace u TOM 5 nainstalujeme tak, že si položíme na sedadlo. Silnými popruhy vzad a slabšími dopředu. Zadní popruh protáhneme mezi opěradlem zad a sedákem a svedeme jej pod sedadlo. Pod sedadlem jsou 4 matice s černou plastovou hlavou. postupně jak budeme upevňovat popruhy, demontujeme šroubové spoje a zaměníme původní šrouby za delší z příslušenství. Popruh připevníme na nový šroub a dotáhneme maticí.

Přední popruhy nainstalujeme stejným postupem jako u TOM 4.



Výstelka stupačky měkká

Výstelku položíme na stupačku a v zadní části zajistíme.

U TOM 4 zajistíme pomocí gumiček, které navlékneme na plastové matice.

U TOM 5 zajistíme pomocí suchých zipů, které zapneme kolem vedení podnožky.

Područka měkká T4C/B4P vel. S, M, L - pár

Područku měkkou vezmeme a nasadíme na horní část bočnice suchým zipem dovnitř kočárku a zajistíme sucháčem o bočnici. Pokud máte vymezovací polštářky zajistíme o ně. Totéž udělejte u druhé područky měkké. Područku měkkou nasadíme stejným způsobem na kočárek T4/B4.




Područka COMFORT TOM 5 Streeter vel. S, M – pár

Příslušenství se skládá z páru područek a montážního příslušenství.

Dodržujte pokyny pro instalaci a pro nastavení optimální pozice dle přídatného instruktážního návodu.

Sedačku lze naklápět bez omezení, stejně tak opěradlo zad.

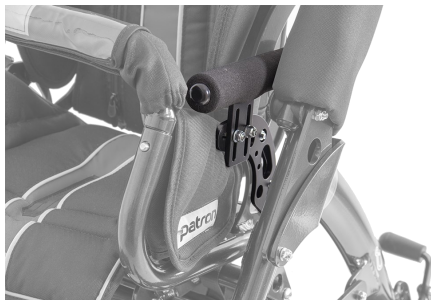

Područka COMFORT TOM 4 Classic / BEN 5 Plus vel. 30, 34, 38, 42, 45 – pár

Příslušenství se skládá z páru područek a montážního příslušenství.

Dodržujte pokyny pro instalaci a pro nastavení optimální pozice dle přídatného instruktážního návodu.

Sedačku lze naklápět bez omezení, stejně tak opěradlo zad.



ÚDRŽBA

- doplňky mohou být opravovány jen zaměstnanci servisních středisek firmy PATRON Bohemia a.s.
- k opravám mohou být použity jen náhradní díly dodávané firmou PATRON Bohemia a.s.
- ujistěte se, že jste dobře obeznámeni s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití
- všechny doplňky lze čistit otíráním vlhkým hadrem, nastavitelné opěrky hlavy, nastavitelné opěrky boční,

kyčelní, abdukční klín, fixační vestu fixaci ramen a hrudníku, fixační kalhotky a hrudní fixační pás lze případně vyprat v pračce při teplotě do 30°C na jemný program

- nikdy doplňky nečistěte prostředky na bázi amoniaku, bělidly a lihovými čistidly
- v případě že byly doplňky vystaveny vlhkému prostředí, nechte je v teple uschnout
- doplňky ukládejte na teplém a suchém místě

	TOM4	BEN4	TOM5	IACKO	DIXIE
Stříška ochranná	X	X	X	X	X
Abdukční klín	X	X	X	X	SE
Opěrka hlavy nastavitelná	X	X	X	X	-
Opěrka hlavy COMFORT	X	-	X	X	-
Opěrka hlavy jednodílná s boční	X	-	X	X	-
Opěrka hlavy BASIC	-	X	-	-	SE
Opěrka hlavy s podporou krční	X	-	-	-	-
Opěrka podpažní nastavitelná	X	-	X	X	-
Opěrka kyčelní	X	X	X	-	-
Lumbální podpora (šíře 25cm, 35cm)	X	X	X	X	-
Pás fixační 2 bodový	X	X	X	X	X
Pás fixační 4 bodový	X	X	X	X	X
Hrudní pásek ke 4 bodovému pásu	X	X	X	X	X
Mezinožní páskový doplněk	X	X	-	-	-
Pás fixační 5 bodový	X	X	X	X	SE
Pás fixační hrudní	X	-	X	-	-
Pás poutací nožní	X	X	X	X	X
Fixace ramen a hrudníku	X	X	X	X	-
Vesta fixační	X	-	X	X	-
Kalhotky sedací fixační	X	X	X	X	-
Boční chrániče proti úrazu	X	X	SE	X	-
Flexi sada polštářků	X	-	-	X	X
Kryt proti dešti	X	X	-	X	X
Náložník letní	X	X	X	X	X
Náložník zimní	X	X	X	X	X
Stolek terapeutický	X	-	X	-	-
Podstavec pokojový	X	-	X	-	-
Taška na doplňky	X	X	X	X	X
Košík pod kočárek-textilní	X	X	X	X	SE
Stupačka pevná zkrácená	X	X	-	-	-
Vymezení bočnic	X	X	X	X	-
Abdukce kolenní	-	-	X	X	-
Fixace pánevní	X	-	X		-
Opěra lýtková s fixací	-	-	X	X	-
Košík zesílený ocelový	-	-	X	X	-
Pojistka naklápění zad	-	-	X	X	-
Ochrana adaptéru	-	-	X	-	-
Letní stříška	X	X	X	X	-
Područky T5S			X		
Područky T4C/B4P	X	X			

PODMÍNKY UŽITÍ

Výstupní kontrola:

Jméno:

Podpis:

Identifikační štítek / Typ výrobku (vypsát):

Podmínky užití:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacce se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
4. Při uplatnění reklamacce musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacce se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněné podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
5. Reklamacce se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním. Reklamacce také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
6. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
7. Reklamační dobu nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

Datum prodeje (den, měsíc, rok):

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:

____. ____.