

## Návod k použití (IFU)

nürofoam® PHMB – neadhezivní pěnové krytí s antimikrobiální složkou

### URČENO PRO STŘEDNĚ AŽ SILNĚ EXSUDUJÍCÍ RÁNY

#### Popis produktu

nürofoam® PHMB neadhezivní pěnové krytí je sterilní, antimikrobiální krytí na rány, které se skládá z hydrofilní, vysoce savé polyuretanové pěny. Vnější vrstva je růžová, voděodolná membrána, která poskytuje bariéru proti bakteriím a vlhkosti z okolí.

Krytí neobsahuje přírodní latex.

Je navrženo tak, aby:

- efektivně absorbovalo exsudát,
- pomáhalo udržovat vlhké prostředí pro hojení,
- snižovalo riziko macerace okolní kůže,
- bránilo adhezi ke spodině rány,
- omezovalo bolest při výměně krytí.

Obsahuje **PHMB (polyhexamethylen biguanid)** – antimikrobiální látku, která se uvolňuje v přítomnosti exsudátu a působí proti širokému spektru mikroorganismů až po dobu 7 dnů (dle in-vitro testování).

---

#### Indikace

Používá se u středně až silně exsudujících akutních a chronických ran, včetně:

- dekubitů (proleženin),
- bércových a diabetických vředů,
- ran po chirurgických zákrocích,
- traumatických ran,
- dárcovských a transplantovaných míst.

Vhodné také pod kompresní terapii.

---

## **Kontraindikace**

Není určeno pro:

- suché nebo málo exsudující rány,
- pacienty s přecitlivělostí na PHMB nebo složky pěny,
- implantaci (chirurgické zavedení do těla).

---

## **Upozornění a opatření**

- Nepoužívejte s oxidačními roztoky (např. peroxid vodíku nebo hypochlorit), mohou degradovat pěnu i PHMB.
- PHMB nenahrazuje systémovou léčbu infekce – pokud je přítomna infekce, kontaktujte lékaře.
- Nepoužívejte opakovaně – hrozí ztráta sterility a účinnosti.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
- Výrobek je určen ke krátkodobému použití – do 30 dnů.
- Likvidujte dle místních předpisů pro klinický odpad.

---

## **Návod k použití**

### **Příprava místa aplikace:**

1. Ránu vyčistěte a podle potřeby debridujte dle běžných postupů.
2. Osušte okolní pokožku.

### **Aplikace krytí:**

1. Vyberte velikost krytí, které přesahuje okraje rány alespoň o 2 cm.

2. Pokud je třeba, zastříhněte na požadovaný tvar sterilními nůžkami.
3. Ujistěte se, že růžová strana směřuje ven, bílá pěna na ránu.
4. Krytí přiložte a zafixujte (např. obvazem nebo páskou – ale nikdy přes celou plochu krytí).
5. Nepoužitý materiál zlikvidujte.

#### **Výměna a odstranění krytí:**

1. Krytí může zůstat na místě až 7 dní v závislosti na množství exsudátu a stavu pacienta.
2. Měňte častěji dle potřeby nebo podle zvyklostí správné praxe.
3. Při výměně krytí jej opatrně odstraňte a zlikvidujte dle pravidel.
4. Pokud je třeba, ránu znovu očistěte před aplikací nového krytí.

**Výrobce:** ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED, Premier Park, 33 Road One,  
Winsford Industrial estate, Winsford England CW7 3RT  
ID číslo: 02666957

