



Varomed
Das Original mit dem V

Návod k použití

PŘI TERAPII/NA OBVAZ



Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali obuv značky Varomed!

Vlastníte tak vysoce kvalitní zdravotnický prostředek, který Vám zpříjemní život.

Před prvním obutím si pečlivě přečtěte pokyny pro péči a použití, abyste mohli mít užitek z obuvi co nejdéle.

1. Obecné informace

Zakoupili jste produkt ze skupiny terapeutických a obvazových bot. Označení najdete přímo na produktu a na krabici od bot.



PŘI TERAPII/NA OBVAZ

Terapeutická obuv na bázi UDI-DI:
4040261therapieUE

1.1 Symboly

Zde Vám vysvětlíme význam používaných symbolů, které užíváme v našem návodu k použití:



Pozor



Chraňte před slunečním zářením



Výrobce



Chraňte před vlhkem



Opakované použití jedním jediným pacientem



Maximální teplota



Nesmí přijít do kontaktu s vodou

1.2 Obecný účel použití

Naše produkty se skládají z následujících materiálů a mají uvedené vlastnosti:

- Přesné **složení materiálu** najdete v přehledu produktů. Všechny vrchní materiály jsou přizpůsobitelné, trvanlivé a odolné vůči povětrnostním vlivům.
- **Široké, tvarově stálé plochy podrážek** pro bezpečný došlap z polyuretanu. Tyto

plochy jsou přizpůsobitelné, trvanlivé a odolné vůči povětrnostním vlivům.

- **Zadní dílec** pro dobré uložení paty (pouze u zavřených modelů s výjimkou modelů 60882 a 60420, u kterých je možnost rozevřít patu)
- **Jednoduché, praktické a individuálně nastavitelné zapínání**
- **Široká možnost otevření** pro snadné nazouvání a vyzouvání
- **Vhodné pro vložky** - Všechny terapeutické boty mají vyjímatelnou stélku a jsou vhodné pro osobní vložky. Montáž provádí pouze vyškolený odborný personál/ortopedický obuvnický technik.
- **Následující ortopedické úpravy mohou provádět vyškolení odborníci:**
 - Svrchní materiál: řezání na míru, v případě potřeby přelepení hrany
 - Zapínání: stříh na míru a prodloužení (kromě modelů se šněrováním)
 - Stélka: vyjímatelná, přizpůsobitelná, vyměnitelná
 - Podrážka: řezání, broušení a lepení
- **Obuv s různou šířkou** pro optimální uzpůsobení individuálnímu tvaru chodidla, pokud toho lze v daném případě konfekční obuví dosáhnout
- Všechny boty z produktové skupiny Te-

rapeutická a obvazová obuv jsou určeny pro nepřetržité použití po dobu kratší než 24 hodin denně, jak uvnitř, tak venku.

1.3 Určení

Terapeutické boty poskytují velký objem, široké otevírání a jsou proto určeny pro uživatele, kteří podstupují konzervativní nebo pooperační léčbu ran s rozsáhlými, případně polstrovanými obvazy nebo bandážemi.

1.4 Indikace

- Omezení mobility (chůze) při poškození kůže a podkožní tkáně v rámci několik týdnů trvající nebo dlouhodobé konzervativní nebo pooperační léčby ran s rozsáhlými, případně polstrovanými obvazy, jejichž léčebný proces umožňuje alespoň částečné zatížení nohy při chůzi.
- Pro umožnění a udržení přiměřené funkce chůze.

1.5 Kontraindikace

- Za kontraindikaci se považuje typ deformity chodidla, který již neumožňuje nošení a užívání konfekční obuvi.
- Poruchy chůze, u nichž by se suché zipy obou bot mohly navzájem zaseknout,

jsou-li nesprávně zapnuté (modely 60460 Meran XXL a 60910 Meran)

2. Bezpečnostní pokyny

Všechny závažné události, ke kterým došlo v souvislosti s výrobkem, musí být nahlášeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém pacient bydlí. Uchovejte prosím štítek z boční strany kr bice od bot pro pozdější potřeby. Jsou na něm uvedeny důležité údaje, které obsahují informace potřebné pro zpětné zjištění okolností v případě reklamace.

2.1 Klasifikace bezpečnostních pokynů

Dbejte prosím na následující klasifikaci bezpečnostních pokynů.



NEBEZPEČÍ

Důležitá informace o potenciálně nebezpečné situaci, která, pokud jí nepředejdete, může mít za následek smrt nebo trvalé poškození zdraví.



VÝSTRAHA

Důležitá informace o potenciálně nebezpečné situaci, která, pokud jí nepředejdete, může mít za následek trvalé poškození zdraví a vyžadovat lékařské ošetření.



POZOR

Důležitá informace o potenciálně nebezpečné situaci, která, pokud jí nepředejdete, může mít za následek lehká zranění, která nevyžadují lékařské ošetření.

UPOZORNĚNÍ

Důležitá informace o potenciální situaci, která, pokud jí nepředejdete, může mít za následek poškození výrobku.

2.2 Veškeré pokyny pro Vaši bezpečnost



NEBEZPEČÍ

Nedodržení následujících pokynů může mít za následek trvalé poškození zdraví nebo dokonce smrt. Při náležitém použití nejsou známa žádná rizika, která by mohla mít za následek smrt nebo trvalé poškození zdraví.



VÝSTRAHA

Nedodržení následujících pokynů může mít za následek dočasné poškození zdraví a vyžádat si lékařské ošetření.

- **Nošení levé boty na pravé noze a naopak či obuv špatně padnoucí, nevhodná nebo nesprávně upnutá** mohou způsobit zdravotní potíže, jako je zaškrcení, poruchy prokrvení a otlaky. Zároveň vzniká zvýšené riziko podráždění kůže/otevřených ran a nebezpečí zakopnutí a pádu. **Nechte si obuv Varomed upravit ortopedickým technikem nebo školeným odborným personálem a vysvětlit její správné používání.**
- **Záměna pravé vkládací stélky za pravou, záměna stélek nebo používání**

boty bez vkládacích stélek mohou vést k podráždění kůže, vzniku otlaků a následně bolesti. **Používejte pouze dodané nebo speciálně upravené vkládací stélky Vaším ortopedickým technikem a dbejte na správné padnutí obuvi.**

- **Cizí tělesa, záhyby uvnitř boty a zdeformovaná místa** mohou při nošení vyvolat zranění, podráždění kůže a vznik otlaků. **Boty noste pouze poté, co jste zkontrolovali, že se v nich nevyskytuje žádný z výše jmenovaných problémů nebo jste tento problém odstranili. V opačném případě se obraťte na svého ortopedického technika.**
- Při nošení obuvi může přes veškerou opatrnost dojít k nepozorovanému podráždění kůže a vzniku otevřených ran. Po nošení obuvi zkontrolujte, zda se na chodidlech nevyskytují problematická místa. **Za tímto účelem použijte v případě potřeby zrcadlo.**
- Během nošení může z neznámých důvodů dojít ke vzniku **bolestí, otoků, otlaků, neobvyklých reakcí či nepříjemných pocitů. V takovém případě přestaňte obuv nosit a poradte se se svým ošetřujícím lékařem nebo ortopedickým technikem.**

- **Změny způsobené úpravou či uzpůsobením** mohou při neodborném provedení negativně ovlivnit zdravotní stav a vést k nežádoucímu zatížení. **Úpravu a uzpůsobení smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál, např. ortopedický technik.**
- **Nosí-li obuv vícero osob,** může dojít k přenosu infekcí a plísňových onemocnění. **Používejte obuv pouze pro svou vlastní potřebu a z hygienických důvodů ji neposkytujte nikomu jinému.**



Opakované nošení jedním jedním pacientem

- **Alergické reakce a vstřebávání látek kůží.** Přímý kontakt s kůží může i přes vyzkoušené a testované materiály vést k alergickým reakcím a vstřebávání látek kůží. **Vyhněte se přímému kontaktu s kůží a noste terapeutickou/obvazovou obuv pouze s ponožkami, obvazy nebo příslušným krytím rány a obvazem. Prosím, dbejte na to, aby ponožky při nošení seděly bez záhybů.**

POZOR

Nedodržení následujících pokynů může mít za následek lehká zranění, která nutně nevyžadují lékařské ošetření.

- **Opotřebené, prošlapané podrážky, nedovírající zapínání či trhliny v materiálu** negativně ovlivňují bezpečnost výrobku a mohou vést k poškození zdraví. **Obuv pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebení. Případné známky opotřebení nechte kvalifikovaným personálem nebo ortopedickým technikem včas odstranit.**

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení následujících pokynů může mít za následek poškození výrobku.

- **V důsledku nedostatečně rozevřeného zapínání při nazouvání a vyzouvání obuvi** může dojít přílišným roztažením obuvi k deformacím a trhlinám v materiálu. **Při nazouvání a vyzouvání na botě vždy otevřete všechna zapínání a je-li to možné, používejte nazouvací lžíci.**
- **Pouze produkty označené jako přátelé mohou být prané v pračce při 30°C na šetrný program.** Tyto produkty jsou z hygienických důvodů zvláště vhodné pro ošetřování ran.
- **Obuv není určena k používání ve vodě,** např. při sprchování apod., a jako u každé jiné obuvi existuje na ledu, sněhu a na kluzkých či mokrých površích nebezpečí uklouznutí. **Obuv užívejte k určenému účelu a nechte si od svého ortopedického technika dostatečně poradit.**



Neužívejte ve vodě

3. Pokyny pro čištění a péči o obuv

- 1) **Při péči o obuv zkontrolujte,** zda nevykazuje známky opotřebení. Případné známky opotřebení nechte odstranit ortopedickým technikem nebo kvalifikovaným odborníkem.
 - 2) **Odstraňte** prach a mírné zašpinění způsobené nošením vlhkým hadříkem.
 - 3) **Pokud vám boty zvlhly,** vycpěte je savým papírem nebo utěrkou a nechte je řádně vyschnout. Sušení na přímých zdrojích tepla, jako jsou topná tělesa, nebo na přímém slunci se nedoporučuje. Kůže by tak mohla ztvrdnout a mohlo by dojít ke změně barvy. Nošení vlhkých bot může vést ke vzniku plísňových onemocnění.
 - 4) **Po vyschnutí do nich vetřete nebo na ně nastríkejte vhodný ošetřující prostředek.** Řiďte se přitom údaji výrobce ošetřujícího prostředku.
- Skvrny **způsobené technickou solí** odstraňte roztokem octa a vody namíchaném v poměru jedna ku jedné.
 - Ušpiněnou **podšívku** vyčistěte měkkým kartáčkem a mýdlovým roztokem. Zbytky mýdla odstraňte hadříkem a čistou vodou a nechte obuv vyschnout výše popsaným způsobem.

- **Boty můžete ošetřit jakýmkoli běžně dostupným dezinfekčním sprejem.** Řiďte se přitom údaji výrobce.
- **Obuv označenou jako pratelnou lze prát v pračce při 30 °C v šetrném cyklu.** Před praním odstraňte volné vložky a pečlivě uzavřete suché zipy. Obuv nechte vysušit podle výše uvedeného popisu.

4. Pokyny pro skladování



Skladujte při teplotě do 40 °C



Na přímém slunci může dojít ke změně barvy a rychlejšímu stárnutí materiálu



Krabici s botami chraňte před vlhkem

5. Technické údaje

Technické údaje o vašem produktu naleznete na čelním štítku a v přehledu produktů (viz strana 9).

6. Likvidace

Likvidace výrobku a obalu se provádí v souladu se zákonnými ustanoveními země, ve které uživatel bydlí.

7. Záruka

Záruka může být poskytnuta pouze v případě řádného používání a údržby obuvi po dobu zákonné lhůty. Jako výrobce nepřebíráme odpovědnost za důsledky plynoucí z nesprávného použití obuvi.

Přehled produktů:

Referenční seznam pro produkty se základní UDI-DI 4040261therapieUE

Číslo artiklu	Označení	Složení materiálu
31882	ISTANBUL	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
31920	GENUA Šířka H	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
31931	SKOPJE	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: polyester 80% viskóza 20% Typ zapínání: suchý zip
58880	MALMÖ	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
58881	STOCKHOLM	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 84% bavlna 16% polyamid Typ zapínání: suchý zip
58882	GÖTEBORG	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
58890	LUGANO	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip

58892	GENF	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
58896	MAILAND	Vrchní materiál: 70% polyamid, 30% elasthan Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
58900	IBIZA	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
58906	BALI	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
58907	GRENOBLE	Vrchní materiál: 80% polyester, 20% bavlna Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 80% bavlna, 20% polyester Typ zapínání: suchý zip
58908	KOPENHAGEN	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
58990	MONACO	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60210	SORRENT	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% bavlna Typ zapínání: suchý zip

60310	Lymfatická šněrovací bota	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 50% polyester, 50% polyamid Typ zapínání: tkaničky
60320	Lymfatický sandál	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
60321	Nártový díl	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester
60330	Lymfatická polobota se suchým zipem	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
60410	ROMA XXL	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60420	DUBLIN XXL	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60450	RIJEKA XXL	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60460	MERAN XXL	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip

60470	HAMBURG (XXL)	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60480	GÖTEBORG XXL	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60490	GENUA XXL	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% bavlna Typ zapínání: suchý zip
60650	GENUA SLIPPER	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% bavlna Typ zapínání: suchý zip
60710	KOKKOLA	Vrchní materiál: 100% kůže Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyamid Typ zapínání: suchý zip
60810	TROMSÖ	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
60811	ZÜRICH	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
60817	ZÜRICH Zimní	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 50% polyester 50% vlna Typ zapínání: suchý zip
60820	VANCOUVER	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip

60843	VALENCIA	Vrchní materiál: polyamid 70% elastan 30% Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
60851	MALMEDY	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% bavlna Typ zapínání: suchý zip
60870	RIMINI	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60882	FLORENZ	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60910	MERAN	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip pevný zip
60919	GENUA COLOUR	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% bavlna Typ zapínání: suchý zip
60920	GENUA	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip
60922	PARMA	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 75% bavlna, 25% polyester Typ zapínání: suchý zip

60924	LONDON	Vrchní materiál: 70% polyester bavlna 30% Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% bavlna Typ zapínání: suchý zip
60925	GENUA Zimní I	Vrchní materiál: 100% polyamid Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% vlna Typ zapínání: suchý zip
60926	BELFAST	Vrchní materiál: 85% polyester, 10% polyamid, 5% lurex Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% vlna Typ zapínání: suchý zip
60928	GENUA Zimní II	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% vlna Typ zapínání: suchý zip
60929	LONDON Zimní	Vrchní materiál: 70% polyester 30% bavlna Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% vlna Typ zapínání: suchý zip
60930	GARMISCH	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
60960	LINDAU	Vrchní materiál: 100% polyester Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyester Typ zapínání: suchý zip
60970	INNSBRUCK	Vrchní materiál: 65% polyamid, 35% polyuretan Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% vlna Typ zapínání: suchý zip
75200	KAPSTADT	Vrchní materiál: 100% kůže Mezivložka: měkká pěna Podšívka: 100% polyamid Typ zapínání: suchý zip



Varomed

Das Original mit dem V



Výroba obuvi v Německu od roku 1959

Florett GmbH, Weinbergstr. 15, 93413 Cham, Německo

+49 9971 4872 0, info@florett.de



Duben 2024