

Návod k použití (IFU)

nürofoam® Surgical PHMB Silicone Foam Border Dressing URČENO PRO STŘEDNĚ AŽ SILNĚ EXSUDUJÍCÍ RÁNY

Popis produktu

nürofoam® Surgical PHMB Silicone Foam Border Dressing je sterilní antimikrobiální krytí na rány, tvořené hydrofilní polyuretanovou pěnou, která absorbuje exsudát, a vnější voděodolnou vrstvou, jež vytváří bariéru proti bakteriím. Perforovaná silikonová kontaktní vrstva chrání lůžko rány před přilnutím a přesahuje přes okraje rány, čímž zajišťuje přilnavost ke zdravé pokožce kolem rány.

Krytí reguluje exsudát a mikrobiální kontaminaci, čímž snižuje bolest během hojení. Silikonová kontaktní vrstva umožňuje nasávání exsudátu, brání přilnutí ke ráně a minimalizuje bolest při výměně krytí. Zajišťuje jemné, ale bezpečné přilnutí ke kůži s minimálním poškozením pokožky a minimální bolestivostí při sejmutí.

Krytí lze během aplikace přemístit nebo během nošení nadzvednout pro kontrolu rány.

nürofoam® obsahuje antimikrobiální látku polyhexamethylen biguanid (PHMB, polihexanid), která uvolňuje antimikrobiální ionty při kontaktu s exsudátem a účinkuje proti širokému spektru mikroorganismů spojených s kolonizací a infekcí ran, až po dobu 7 dní (dle in vitro testování).

Neobsahuje přírodní latex.

Indikace

Krytí je určeno pro středně až silně exsudující akutní a chronické rány, které jsou infikované nebo u nichž existuje riziko infekce. Může být použito během hojení u:

- proleženin
- bércových a plantárních vředů
- diabetických vředů
- chirurgických ran

Vhodné i pro použití pod kompresivním obinadlem.

Kontraindikace

Krytí není určeno pro:

- suché nebo slabě exsudující rány
 - osoby s přecitlivělostí na silikon nebo PHMB
 - chirurgickou implantaci
-

Upozornění

- Nepoužívejte s oxidačními roztoky (např. hypochlorit nebo peroxid vodíku), které mohou rozložit pěnový materiál i PHMB.
 - PHMB nenahrazuje systémovou léčbu infekce – konzultujte zdravotnického pracovníka.
 - Nepoužívejte opakovaně, protože by mohlo dojít ke ztrátě sterility nebo funkčnosti.
 - Výrobek nesmí být požit a musí být uchováván mimo dosah dětí a zvířat.
 - Pouze pro krátkodobé použití (do 30 dnů).
 - Pouze pod dohledem zdravotnického pracovníka.
-

Návod k použití

Příprava rány:

1. V případě potřeby vyčistěte ránu netoxickým roztokem (např. fyziologickým).
2. Okolí rány důkladně osušte.
3. Pokud je to potřeba, aplikujte do hlubší rány jiné krytí podle návodu.

Aplikace krytí:

1. Vyberte takovou velikost krytí, aby pěnová část přesahovala ránu alespoň o 2 cm ve všech směrech.
2. Odstraňte ochranné fólie tak, aby se nezasáhla středová část krytí.

3. Umístěte krytí doprostřed rány a jemně přitiskněte.
4. V případě potřeby lze během aplikace upravit pozici krytí nebo jej během nošení nadzvednout pro kontrolu rány.

Výměna krytí a odstranění:

1. Krytí může zůstat na ráně až 7 dní – výměna závisí na stavu rány a množství exsudátu. Zpočátku může být nutné výměna každých 24 hodin.
2. Jemně sejměte krytí z rány a zlikvidujte dle místních předpisů.
3. V případě potřeby vyčistěte ránu před aplikací nového krytí.

Výrobce: ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED, Premier Park, 33 Road One,
Winsford Industrial estate, Winsford England CW7 3RT
ID číslo: 02666957

