

Návod k použití (IFU)

nürofoam® PHMB silikonová pěnová sakrální náplast bez ohraničení URČENO PRO STŘEDNĚ AŽ SILNĚ SECERNUJÍCÍ RÁNY

Popis výrobku

nürofoam® PHMB silikonová pěnová sakrální náplast bez ohraničení je sterilní antimikrobiální obvaz na rány. Skládá se z hydrofilní, savé polyuretanové pěny, která absorbuje exsudát. Vnější vrstva tvoří bariéru proti vnějšímu prostředí a chrání ránu před bakteriální kontaminací. Perforovaná silikonová kontaktní vrstva zabraňuje přilnutí obvazu k ráně a zasahuje za její okraje, aby šetrně přilnula ke kůži v okolí rány.

nürofoam® PHMB silikonová pěnová sakrální náplast je tvarována podle sakrální oblasti. Obvaz zvládá exsudát i mikrobiální kontaminaci, a tím přispívá ke snížení bolesti během hojení. Silikonová vrstva umožňuje snadné sejmutí obvazu bez poranění nové tkáně.

Výrobek obsahuje antimikrobiální látku **polyhexamethylen biguanid (PHMB, polyhexanid)**, která ničí a inhibuje růst bakterií. PHMB je aktivováno při kontaktu s exsudátem a působí proti širokému spektru mikroorganismů spojených s infekcemi ran – dle in vitro testování až po dobu 7 dnů.

Neobsahuje přírodní latex.

Indikace

nürofoam® PHMB silikonová pěnová sakrální náplast je určena k použití na **středně až silně secernující chronické a akutní rány**, které jsou infikované nebo u nichž existuje riziko infekce, např.:

- Dekubity
- Vředy na dolních končetinách
- Diabetické ulcerace
- Chirurgické rány

Lze použít i pod kompresní terapií.

Kontraindikace

Obvaz **není určen:**

- Pro suché nebo lehce secernující rány
 - Pro osoby s **přecitlivělostí na silikon nebo PHMB**
 - Pro chirurgickou implantaci
-

Upozornění a bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte s oxidačními roztoky, jako je hypochlorit nebo peroxid vodíku – ty mohou rozložit absorpční pěnu i PHMB.
 - PHMB nenahrazuje systémovou léčbu infekcí – při známkách infekce konzultujte zdravotníka.
 - Nepoužívejte opakovaně – hrozí kontaminace a ztráta sterility.
 - Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
 - Používejte pouze pod dohledem odborného zdravotníka.
 - Výrobek je určen ke krátkodobému použití, max. **30 dnů**.
-

Pokyny k použití

Příprava místa aplikace

1. V případě potřeby ránu vyčistěte netoxickým roztokem (např. fyziologickým).
2. Důkladně osušte okolní kůži.
3. V případě hluboké rány nejprve aplikujte vhodný výplňový materiál podle návodu k němu.

Aplikace obvazu

1. Vyberte správnou velikost tak, aby pěnová část obvazu přesahovala ránu alespoň o 2 cm.
2. Odstraňte ochranné fólie bez dotyku centrální části.

3. Umístěte obvaz na ránu, přitiskněte jemně na okolní kůži.
4. Obvaz je možné během nošení opatrně nadzvednout pro kontrolu rány.

Výměna a odstranění

1. Obvaz může být ponechán na místě **až 7 dnů**, v závislosti na stavu rány a množství exsudátu. Zpočátku může být nutná výměna každých 24 hodin.
2. Jemně odstraňte obvaz a zlikvidujte podle místních předpisů.
3. Pokud je třeba, očistěte ránu před aplikací nového obvazu.

Výrobce: ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED, Premier Park, 33 Road One,
Winsford Industrial estate, Winsford England CW7 3RT
ID číslo: 02666957

