

Návod k použití (IFU)

alginür® Alginate Wound Dressing – alginátové krytí na rány

Určeno pro rány se středním až silným exsudátem

Popis produktu

alginür® Alginate Wound Dressing je vysoce absorpční, sterilní, netkané krytí složené z alginátu vápenatého s vysokým podílem G-bloků (kyselina guluronová) a karboxymethylcelulózy (CMC). Při kontaktu s exsudátem se alginát mění v měkký gel, který podporuje autolytické čištění rány a udržuje vlhké prostředí příznivé pro hojení. Vzniklý gel umožňuje atraumatické sejmutí krytí bez poškození novotvořené tkáně.

Indikace

Krytí je určeno k ošetření středně až silně secernujících, povrchových i hlubších ran, například:

- pooperační rány,
- traumatické rány (kožní léze, úrazy, řezné či tržné rány),
- bérkové ulcerace,
- dekubity,
- diabetické ulcerace,
- místa odběru a přenosu štěpů,
- dutinové rány,
- povrchové a částečné popáleniny.

Krytí může pomoci zvládnout drobné krvácení v povrchových ranách a lze jej používat i pod kompresními obvazy. Výrobek je určen výhradně k zevnímu použití.

Kontraindikace

- suché nebo jen slabě secernující rány,

- známá přecitlivělost na algináty,
 - kontrola masivního krvácení.
-

Upozornění

- Na suchých nebo velmi málo secernujících ranách může krytí přischnout; před sejmutím jej v takovém případě navlhčete sterilním fyziologickým roztokem.
 - Nadměrné používání mastných (petrolátových) přípravků může zhoršit absorpční vlastnosti krytí.
-

Pokyny k použití

Příprava rány a aplikace

1. V případě potřeby ránu débridujte a vypláchněte dle standardních postupů.
2. Z okolní kůže odstraňte přebytečnou tekutinu.
3. Zvolte krytí o něco větší, než je rána.
4. Pomocí sterilních nůžek krytí zastříhněte nebo přehněte; zbytek materiálu zlikvidujte.
5. Přiložte přímo na lůžko rány. Hlubší rány vyplňte volně tak, aby krytí nepřesahovalo okraje.
6. Překryjte neokluzivním sekundárním krytím a zafixujte.

Výměna a odstranění krytí

1. Krytí může zůstat na místě až 7 dní; frekvenci výměny určete podle stavu rány a množství exsudátu (zpočátku může být nutná denní výměna).
2. Krytí vyměňte, jakmile sekundární krytí dosáhne své absorpční kapacity nebo dle klinického úsudku.
3. Sejměte sekundární krytí. Je-li rána suchá, nasýťte krytí sterilním fyziologickým roztokem.
4. Krytí jemně odstraňte a zlikvidujte podle místních předpisů.

5. V případě potřeby ránu před novou aplikací opět vypláchněte.

Výrobce

ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED, Premier Park, 33 Road One,
Winsford Industrial estate, Winsford England CW7 3RT
ID číslo: 02666957

