
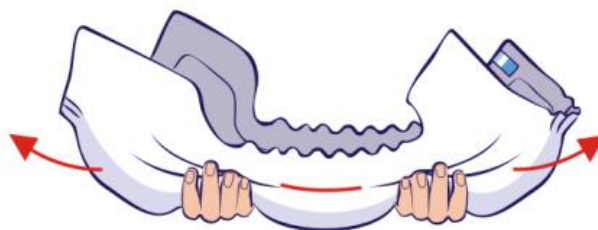


Seni V je doplňková separační plena, která zvyšuje absorpční kapacitu. Neobsahuje izolační folii, a proto slouží jako přídatná vložka do pleny. Není určena pro použití jako samostatný absorpční prostředek při řídké stolici nebo úniku moči. Představuje vhodnou ochranu pro zacévkované pacienty a při úniku stolice. K její fixaci se používají síťované kalhotky Seni Fix.

JAK POUŽÍVAT

Před použitím je **velmi důležité plenu aktivovat**. Aktivace znamená připravení pleny k použití. Aktivace načechrá absorpční jádro, které je původně stlačené, a zvedne stojící manžety, které zabraňují postrannímu úniku.

- Krok 1** – rozviňte plenku, na obou koncích ji uchopte a několikrát jemně roztáhněte.
- Krok 2** - přeložte plenku podélně na polovinu.
- Krok 3** - po vnější straně pleny po celé délce ji jemně pomačkáme a vytvoříme tzv. korýtko.

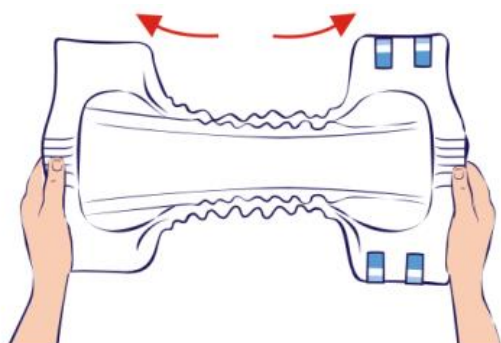

Poznámka: Abyste anatomicky tvarovanou vložku správně zafixovali, musíte použít fixační kalhotky v odpovídající velikosti.

FIXACE U STOJÍCÍ OSOBY



1. Stáhněte fixační kalhotky do půli stehen.
2. Vložte aktivovanou, anatomicky tvarovanou vložku mezi nohy – absorpční stranou nahoru.

Nezapomeňte, že širší část plenky patří dozadu a užší část dopředu.

Poznámka: Vložku můžete upevnit zepředu, nebo zezadu – zvolte si způsob, který je pro vás pohodlnější a s ohledem na situaci méně namáhavou pro vaše záda. Ujistěte se, že osoba, o kterou se staráte, se může o něco opřít – může to být skříňka nebo umyvadlo. Osoba, o kterou se staráte, může pomoci zafixovat plenu na místo tím, že plenu přidržuje zepředu na svém břiše.

3. Upravte anatomicky tvarovanou vložku z přední i zadní strany a ujistěte se, že těsně přiléhá k tělu. Ujistěte se, že vložka sedí dobře také v rozkroku. Vytáhněte fixační kalhotky, které drží vložku na místě.

Poznámka: Ujistěte se, že indikátor vlhkosti je zarovnaný s páteří.

4. Po vytažení kalhotek držících anatomicky tvarovanou vložku se ujistěte, že vše dobře sedí a že okraje nejsou shrnuty dovnitř.
5. Srolujte použité absorpční prádlo a vyhoďte do odpadkového koše. Nevyhazujte použitý výrobek do toalety.

FIXACE U LEŽÍCÍ OSOBY



1. Pokrčte jednu nohu v koleni.
2. Stůjte u kraje postele a stáhněte kalhotky do půli stehen.

Poznámka: jestliže stojíte po pacientově pravé ruce, pokrčte levou nohu; pokud stojíte po pacientově levici, skrčte pravou nohu.

3. Otočte osobu na jednu stranu, a poté co provedete hygienu, umístěte aktivovanou anatomicky tvarovanou vložku mezi nohy, absorpční strnou nahoru.

Poznámka: Širší část vložky patří dozadu a užší část dopředu. Vložku můžete upevnit zepředu, nebo zezadu – zvolte si způsob, který je pro vás pohodlnější a s ohledem na situaci méně namáhavou pro vaše záda.

4. Rozbalte zadní část anatomicky tvarované vložky tak, aby dobře seděla, a ujistěte se, že indikátor vlhkosti je srovnán s páteří.
Vytáhněte kalhotky zezadu.
Vyndejte přední část anatomicky tvarované vložky zepředu a upravte v rozkroku.
5. Přetočte pacienta na záda a vytáhněte síťové kalhotky jemným tahem na bocích.
6. Srolujte použitou absorpční pomůcku a vyhodte do odpadkového koše. Použitý výrobek nevhazujte do toalety.