

SILIKONOVÉ PĚNOVÉ KRYTÍ

Návod k použití

Název produktu: Silikonové pěnové krytí

Hlavní součásti

Skládá se především z PU fólie, PU pěny a silikonového lepidla.

Specifikace výrobku: viz příloha

Určené použití

Krytí ze silikonové pěny je určeno pro široké spektrum exsudujících ran, jako jsou bércové vředy, proleženiny, traumatické rány a nehojící se defekty.

Návod k použití

1. Očistěte ránu v souladu s místními postupy.
2. Zvolte vhodnou velikost krytí tak, aby přesahoval okraj rány o 2 cm.
3. Připravte a očistěte kůži v okolí rány odstraněním přebytečné vlhkosti, okolí rány nesmí být mastné.
4. Odstraňte uvolňovací papír a přiložte samolepicí stranu krytí na ránu. Krytí nenatahujte.
5. V případě potřeby fixujte výrobek obvazem nebo jinou fixací.

Frekvence výměny

Dobu používání jednoho krytí lze určit na základě množství exsudátu z rány, obvykle nepřesahuje 7 dní. Celková kumulativní doba používání by neměla překročit 30 dní, pokud rána nevykazuje zlepšení.

Kontraindikace

1. Nepoužívejte u osob alergických na materiály.
2. Zakázáno používat na popáleniny třetího stupně, těžké infekce a onkologické rány.

Bezpečnostní opatření

1. Před použitím tohoto přípravku si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Tento výrobek je sterilní; nepoužívejte jej, pokud nebyl sterilizován.
3. Tento výrobek je určen k jednorázovému použití a nesmí se používat opakovaně.
4. Nepoužívejte, pokud je výrobek prošlý.
5. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený, vlhký, plesnivý nebo kontaminovaný.
6. Během používání pečlivě sledujte, abyste předešli nehodám. Pokud se objeví alergická reakce, okamžitě přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.

Podmínky skladování a přepravy

1. Skladujte v čistém, dobře větraném prostředí, bez korozivních plynů.
2. Během přepravy chraňte výrobek před silným tlakem, přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.

Doba použitelnosti: tento výrobek má dobu použitelnosti 3 roky od data výroby.

Symbole a definice

	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu.
	Nepoužívejte opakovaně
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Neobsahuje přírodní kaučukový latex
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření
	Uchovávejte v suchu (<35°C/95°F)


Manufacturer:

Guangdong TiDaKang Medical Technology Co.,Ltd.

Address: 1、 4 and 5 floor of The Second Row, No.30 of JinHong Road, PingNan Industrial Area,
SanXiang Town, ZhongShan City, 528463 GuangDong, P.R.China

Tel:86(760)86382845 Web:www.techdcare.com

Email:service@techdcare.com

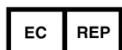

Medpath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,80807 Munich, Germany

Tel: +49 (0)89 189174474

Fax: +49 (0)89 5485 8884

Dimdi Code: DE/00000447823

E-mail: info@medpath.pro

Dovozce pro ČR: Vienmark s.r.o.

Za Tratí 192

788 13 Vikýřovice

www.vietmark.cz

Distributor pro ČR: NewWaterMeaning s.r.o.

Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8 – Karlín

www.nwm-med.com

Verze dokumentu: V1.1

Datum vydání: 8. listopadu 2023

Příloha:

Seznam specifikací produktu

Jednotka: cm

S okrajem (5 vrstev)			S okrajem (3 vrstvy)		
REF kód	Model	Velikost	REF kód	Model	Velikost
01050050	ZQ-01	5×5	01050050	ZY-01	5×5
01075075	ZQ-02	7.5×7.5	01075075	ZY-02	7.5×7.5
01100100	ZQ-03	10×10	01100100	ZY-03	10×10
01100150	ZQ-04	10×15	01100150	ZY-04	10×15
01100200	ZQ-05	10×20	01100200	ZY-05	10×20
01100250	ZQ-06	10×25	01100250	ZY-06	10×25
01100300	ZQ-07	10×30	01100300	ZY-07	10×30
01125125	ZQ-08	12.5×12.5	01125125	ZY-08	12.5×12.5
01130200	ZQ-09	13×20	01130200	ZY-09	13×20
01150150	ZQ-10	15×15	01150150	ZY-10	15×15
01150180	ZQ-11	15×18	01150180	ZY-11	15×18
01150200	ZQ-12	15×20	01150200	ZY-12	15×20
01150220	ZQ-13	15×22	01150220	ZY-13	15×22
01180180	ZQ-14	18×18	01180180	ZY-14	18×18
01200200	ZQ-15	20×20	01200200	ZY-15	20×20
01218218	ZQ-16	21.8×21.8	01218218	ZY-16	21.8×21.8
01230230	ZQ-17	23×23	01230230	ZY-17	23×23
Bez okraje					
03050050	ZW-01	5×5	03150150	ZW-10	15×15
03075075	ZW-02	7.5×7.5	03150180	ZW-11	15×18
03100100	ZW-03	10×10	03150200	ZW-12	15×20
03100150	ZW-04	10×15	03150220	ZW-13	15×22
03100200	ZW-05	10×20	03180180	ZW-14	18×18
03100250	ZW-06	10×25	03200200	ZW-15	20×20
03100300	ZW-07	10×30	03218218	ZW-16	21.8×21.8
03125125	ZW-08	12.5×12.5	03230230	ZW-17	23×23
03130200	ZW-09	13×20	03200500	ZW-18	20×50