

NWM Care HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ

Návod k použití

Název produktu: NWM Care Hydrokoloidní krytí

Hlavní součásti: Sodná karboxymethylcelulóza (CMC), polyuretanová (PU) fólie, akrylátové lepidlo, tavné lepidlo, glasinový papír

Specifikace výrobku: viz příloha

Určené použití

Hydrokoloidní krytí je určeno k ošetřování slabě až středně secernujících akutních i chronických ran ve fázi granulace a epitelizace. Vytváří optimální prostředí na spodině rány a tím podporuje vlhké hojení ran. Chrání ránu před infekcí, zajišťuje bezbolestné převazy a je voděodolný.

Návod k použití

1. Vyčistěte ránu oplachovým roztokem a jemně osušte okolní kůži.
2. Vyjměte krytí z obalu, sloupněte ochrannou fólii a přiložte lepicí stranu přímo na ránu. Krytí vždy musí přesahovat 1-2 cm přes okraje rány. Okraje rány nesmí být mokré a mastné. Jemně přitlačte, aby se krytí uhladilo.
3. Krytí vyměňujte každé 1–3 dny v závislosti na množství exsudátu a stavu krytí. Jakmile krytí zbarví mléčně do bílé a průsvitné, nebo pokud dojde k prosakování, je třeba jej neprodleně vyměnit.
4. Krytí lze použít na ochranu epitelizující (téměř zhojené) rány jako tzv. druhá kůže-interval převazu v těchto případech může být až 7 dní.
5. Krytí je samolepicí, není třeba používat další sekundární krytí, neučí-li lékař jinak (např. v rámci kompresivní terapie)
5. Při odstraňování krytí sledujte směr růstu chloupků. Jednou rukou jemně přitlačte na krytí, zatímco druhou rukou pomalu natahujte okraj krytí směrem ven a rovnoběžně s kůží, aby se postupně oddělovalo od povrchu kůže. Pokračujte v této metodě stlačování a natahování, abyste jemně odstranili celé krytí. Netahejte nahoru ani jej neodstraňujte příliš rychle, mohlo by dojít k poranění kůže.

Frekvence výměny

Dobu používání jednoho krytí lze určit na základě množství exsudátu z rány, obvykle nepřesahuje 7 dní. Celková kumulativní doba používání by neměla překročit 30 dní, pokud rána nevykazuje zlepšení.

Kontraindikace

1. Nepoužívejte u osob alergických na materiály.

Bezpečnostní opatření

1. Tento výrobek je sterilní; nepoužívejte jej, pokud nebyl sterilizován.

2. Tento produkt je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně.
3. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
4. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený, vlhký nebo plesnivý.
5. Pokud se objeví alergická reakce, okamžitě přestaňte produkt používat a poraďte se s lékařem.
6. Pokud se objeví příznaky klinické infekce, poraďte se s lékařem o vhodné antimikrobiální léčbě.
7. Pokud se zjistí, že je krytí poškozené nebo oddělené, neprodleně jej vyměňte, aby byla zachována jeho bariérová a fixační funkce.

Podmínky skladování a přepravy

1. Skladujte v čistém, dobře větraném prostředí, bez korozivních plynů.
2. Během přepravy chraňte výrobek před silným tlakem, přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.

Doba použitelnosti: tento výrobek má dobu použitelnosti 3 roky od data výroby.

Symbody a definice

	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu.
	Nepoužívejte opakovaně
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Neobsahuje přírodní kaučukový latex
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření
	Uchovávejte v suchu (<35°C/95°F)

Manufacturer:




Guangdong TiDaKang Medical Technology Co.,Ltd.

Address: 1, 4 and 5 floor of The Second Row, No.30 of JinHong Road, PingNan Industrial Area, SanXiang Town, ZhongShan City, 528463 GuangDong, P.R.China

Tel:86(760)86382845 Web:www.techdcare.com

Email:service@techdcare.com

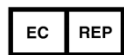

Medpath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,80807 Munich, Germany

Tel: +49 (0)89 189174474

Fax: +49 (0)89 5485 8884
 Dimdi Code: DE/00000447823
 E-mail: info@medpath.pro

Dovozce pro ČR: Vienmark s.r.o.
 Za Tratí 192
 788 13 Vikýřovice
www.vietmark.cz

Distributor pro ČR: NewWaterMeaning s.r.o.
 Pobřežní 249/46
 186 00 Praha 8 – Karlín
www.nwm-med.com

Verze dokumentu: V1.1
 Datum vydání: 8. listopadu 2023

Příloha:

Seznam specifikací produktu

Jednotka: cm

Specifikace	Specifikace	Specifikace
2.8×4.6	2×6	10×30
3.7×5.5	2.5×6.5	10×35
4.4×6.9	2.8×6.9	12.5×12.5
1.5×5.0	5×5	13×20
2.5×6.0	5×10	15×15
1.8×6.1	5×15	15×18
2×4.5	5×20	15×20
2.3×4.7	5×25	15×22
2.1×6.5	7.5×7.5	18×18
3.6×6.2	8×12	20×20
4×4.2	10×10	21.8×21.8
1.6×6.0	10×15	23×23
4.7×6.8	10×20	
8.5×14	10×25	