

ALGINÁTOVÉ KRYTÍ

Návod k použití

Název produktu: Alginátové krytí

Hlavní součásti

Tento produkt se dělí na dva typy: s lepivým okrajem pro krytí krvácejících ran a bez okraje pro léčbu nehojících se ran. Alginátové krytí s lepivým okrajem je vyrobeno z alginátových vláken, netkané textilie, akrylového lepidla a pergamenu. Krytí pro nehojící se rány je vyrobeno pouze z alginátových vláken.

Specifikace výrobku:

Typ	Velikost	Typ	Velikost
S lepivým okrajem	6cm×7cm	Bez okraje	5cm×5cm
	7cm×9cm		10cm×10cm
	8cm×12cm		10cm×20cm
	10cm×12cm		10cm×25cm
	10cm×15cm		15cm×15cm
	10cm×20cm		15cm×20cm
	10cm×25cm		2cm×30cm
	10cm×30cm		2cm×40cm
	10cm×35cm		20cm×20cm
	15cm×15cm		
	15cm×20cm		
	20cm×20cm		

Určené použití

Alginátové krytí je určeno pro rány infikované, kolonizované, kriticky kolonizované i granulující se střední až silnou sekrecí (např. bérkové vředy, proleženiny, diabetické defekty a chirurgické rány). Díky svým hemostatickým vlastnostem je vhodný i pro ošetření krvácejících ran (např. po nekrektomii)

Návod k použití

1. Před aplikací materiálu ránu očistěte roztokem snižujícím mikrobiální zátěž.
2. Otevřete obal. V případě typu s lepícím okrajem odstraňte ochrannou fólii, přiložte obvaz na kůži a jemně a hladce jej zajistěte směrem od středu. V případě typu bez okraje aplikujte přímo do rány. Materiál by neměl přesahovat přes okraj rány.
3. Interval převazu je individuální dle stavu rány, nejdéle však výměna po 3 dnech.

Kontraindikace

Nepoužívejte u osob alergických na materiály. Nepoužívejte na suché rány.

Bezpečnostní opatření

1. Tento výrobek je balen v netoxických papírových plastových sáčcích a je určen pouze k jednorázovému použití. Opakované použití je přísně zakázáno. Použité výrobky ihned zlikvidujte.
2. Tento výrobek je určen pouze k ošetření ran s intervalem převazu max. 3 dny.
3. Před použitím zkontrolujte kvalitu výrobku. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
4. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a zkontrolujte číslo šarže a datum spotřeby uvedené na etiketě. Nepoužívejte prošlé výrobky.

Podmínky skladování a přepravy

1. Tento výrobek by měl být skladován v čistém, dobře větraném vnitřním prostředí s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80 % a teplotním rozmezím -5 °C až 40 °C, bez korozivních plynů.
2. Během přepravy a skladování chraňte výrobek před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti: tento výrobek má dobu použitelnosti 3 roky od data výroby.

Symboły a definice

	Sterilizováno pomocí záření
	Nepoužívejte opakovaně
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Neobsahuje přírodní kaučukový latex
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření
	Uchovávejte v suchu (<35°C/95°F)

Manufacturer:

Guangdong TiDaKang Medical Technology Co.,Ltd.

Address: 1、 4 and 5 floor of The Second Row, No.30 of JinHong Road, PingNan Industrial Area, SanXiang Town, ZhongShan City, 528463 GuangDong, P.R.China

Tel:86(760)86382845 Web:www.techdcare.com

Email:service@techdcare.com



Medpath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,80807 Munich, Germany

Tel: +49 (0)89 189174474

Fax: +49 (0)89 5485 8884

Dimdi Code: DE/00000447823

E-mail: info@medpath.pro

Dovozce pro ČR: Vienmark s.r.o.
Za Tratí 192
788 13 Vikýřovice
www.vietmark.cz

Distributor pro ČR: NewWaterMeaning s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 – Karlín
www.nwm-med.com

Verze dokumentu: V1.1

Datum vydání: 8. listopadu 2023