

ABSORPČNÍ KRYTÍ

Návod k použití

Název produktu: Absorpční krytí

Hlavní součásti: Absorpční polymer, netkaná textilie.

Specifikace výrobku: viz příloha

Určené použití

Absorpční krytí je určeno k ošetření středně až silně exsudujících ran. Absorbuje a zadržuje velké objemy exsudátu, čímž pomáhá chránit ránu a její okolí a zároveň podporuje optimální prostředí pro vlhké hojení rány.

Návod k použití

1. Ránu opláchněte roztokem snižujícím mikrobiální zátěž a očistěte standardním způsobem
2. Dle stavu rány aplikujte vhodné primární krytí a sekundárně aplikujte Absorpční krytí. Není-li vyžadováno primární krytí, použijte Absorpční krytí na ránu primárně.
3. Otevřete obal a vyberte krytí vhodné velikosti (asi o 2 cm větší než rána) a přiložte ho na ránu.
4. Krytí fixujte pomocí náplasti, elastické punčochy, gázových obvazů nebo kompresních obvazů.
5. Četnost výměny krytí závisí na množství exsudátu z rány a stavu výrobku.

Kontraindikace

1. Nepoužívejte u osob alergických na materiály.
2. Tento produkt není vhodný pro suché rány.

Bezpečnostní opatření

1. Tento výrobek je sterilní; nepoužívejte jej, pokud nebyl sterilizován.
2. Tento výrobek je určen k jednorázovému použití a nesmí se používat opakovaně.
3. Nepoužívejte, pokud je výrobek prošlý.
4. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený, vlhký, plesnivý nebo kontaminovaný.
5. Pokud se objeví alergická reakce, okamžitě přestaňte produkt používat a porad'te se s lékařem.

Podmínky skladování a přepravy

1. Skladujte v čistém, dobře větraném prostředí, bez korozivních plynů.
2. Během přepravy chraňte výrobek před silným tlakem, přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.

Doba použitelnosti: tento výrobek má dobu použitelnosti 3 roky od data výroby.

Symbols a definice

	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu.
	Nepoužívejte opakovaně
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Neobsahuje přírodní kaučukový latex
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření
	Uchovávejte v suchu (<35°C/95°F)


Manufacturer:

Guangdong TiDaKang Medical Technology Co.,Ltd.

Address: 1、 4 and 5 floor of The Second Row, No.30 of JinHong Road, PingNan Industrial Area,
SanXiang Town, ZhongShan City, 528463 GuangDong, P.R.China

Tel:86(760)86382845 Web:www.techdcare.com

Email:service@techdcare.com

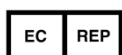

Medpath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,80807 Munich, Germany

Tel: +49 (0)89 189174474

Fax: +49 (0)89 5485 8884

Dimdi Code: DE/00000447823

E-mail: info@medpath.pro

Dovozce pro ČR: Vienmark s.r.o.

Za Tratí 192

788 13 Vikýřovice

www.vietmark.cz

Distributor pro ČR: NewWaterMeaning s.r.o.

Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8 – Karlín

www.nwm-med.com

Verze dokumentu: V1.1

Datum vydání: 8. listopadu 2023

Příloha:

Seznam specifikací produktu

Jednotka: cm

Bez lepicvého okraje		
REF Code	Model	Size
13050050	SA-0505	5×5
13075075	SA-0707	7.5×7.5
13100100	SA-1010	10×10
13100150	SA-1015	10×15
13100200	SA-1020	10×20
13125125	SA-1212	12.5×12.5
13150250	SA-1525	15×25
13150300	SA-1530	15×30
13175175	SA-1717	17.5×17.5
13200200	SA-2020	20×20
13200250	SA-2025	20×25
13200300	SA-2030	20×30
13200400	SA-2040	20×40
13250250	SA-2525	25×25
13250300	SA-2530	25×30
13300300	SA-3030	30×30
13300400	SA-3040	30×40