

## NWM Care HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ

### Návod k použití

**Název produktu:** NWM Care Hydrokoloidní krytí

**Hlavní součásti:** Sodná karboxymethylcelulóza (CMC), polyuretanová (PU) fólie, akrylátové lepidlo, tavné lepidlo, glasinový papír

**Specifikace výrobku:** viz příloha

#### Určené použití

Hydrokoloidní krytí je určeno k ošetřování slabě až středně secernujících akutních i chronických ran ve fázi granulace a epitelizace. Vytváří optimální prostředí na spodině rány a tím podporuje vlhké hojení ran. Chrání ránu před infekcí, zajišťuje bezbolestné převazy a je voděodolný.

#### Návod k použití

1. Vyčistěte ránu oplachovým roztokem a jemně osušte okolní kůži.
2. Vyjměte krytí z obalu, sloupněte ochrannou fólii a přiložte lepicí stranu přímo na ránu. Krytí vždy musí přesahovat 1-2 cm přes okraje rány. Okraje rány nesmí být mokré a mastné. Jemně přitlačte, aby se krytí uhladilo.
3. Krytí vyměňujte každé 1–3 dny v závislosti na množství exsudátu a stavu krytí. Jakmile se krytí zbarví do mléčně bílé až průsvitné barvy, nebo pokud dojde k prosakování, je třeba jej neprodleně vyměnit.
4. Krytí lze použít na ochranu epitelizující (téměř zhojené) rány jako tzv. druhá kůže-interval převazu v těchto případech může být až 7 dní.
5. Krytí je samolepicí, není třeba používat další sekundární krytí, neurčí-li lékař jinak (např. v rámci kompresivní terapie).
5. Při odstraňování krytí sledujte směr růstu chloupků. Jednou rukou jemně přitlačte na krytí, zatímco druhou rukou pomalu natahujte okraj krytí směrem ven a rovnoběžně s kůží, aby se postupně oddělovalo od povrchu kůže. Pokračujte v této metodě stlačování a natahování, abyste jemně odstranili celé krytí. Netahejte nahoru ani jej neodstraňujte příliš rychle, mohlo by dojít k poranění kůže.

#### Frekvence výměny

Dobu používání jednoho krytí lze určit na základě množství exsudátu z rány, obvykle nepřesahuje 7 dní. Celková kumulativní doba používání by neměla překročit 30 dní, pokud rána nevykazuje zlepšení.

#### Kontraindikace

1. Nepoužívejte u osob alergických na materiály.

#### Bezpečnostní opatření

1. Tento výrobek je sterilní; nepoužívejte jej, pokud nebyl sterilizován.
2. Tento produkt je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně.

3. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
4. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený, vlhký nebo plesnivý.
5. Pokud se objeví alergická reakce, okamžitě přestaňte produkt používat a poraďte se s lékařem.
6. Pokud se objeví příznaky klinické infekce, poraďte se s lékařem o vhodné antimikrobiální léčbě.
7. Pokud se zjistí, že je krytí poškozené nebo oddělené, neprodleně jej vyměňte, aby byla zachována jeho bariérová a fixační funkce.

### Podmínky skladování a přepravy

1. Skladujte v čistém, dobře větraném prostředí, bez korozivních plynů.
2. Během přepravy chraňte výrobek před silným tlakem, přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.

**Doba použitelnosti:** tento výrobek má dobu použitelnosti 3 roky od data výroby.

### Symbole a definice

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Sterilizováno pomocí ethylenoxidu        |
|   | Nepoužívejte opakovaně                   |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozen     |
|  | Neobsahuje přírodní kaučukový latex      |
|  | Uchovávejte mimo dosah slunečního záření |
|  | Uchovávejte v suchu (<35°C/95°F)         |

### Manufacturer:



Guangdong TiDaKang Medical Technology Co.,Ltd.

Address: 1、 4 and 5 floor of The Second Row, No.30 of JinHong Road, PingNan Industrial Area, SanXiang Town, ZhongShan City, 528463 GuangDong, P.R.China

Tel:86(760)86382845 Web:www.techdcare.com

Email:service@techdcare.com



Medpath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,80807 Munich, Germany

Tel: +49 (0)89 189174474

Fax: +49 (0)89 5485 8884

Dimdi Code: DE/00000447823

E-mail: [info@medpath.pro](mailto:info@medpath.pro)

Dovozce pro ČR: Vienmark s.r.o.  
Za Tratí 192  
788 13 Vikýřovice  
[www.vietmark.cz](http://www.vietmark.cz)

Distributor pro ČR: NewWaterMeaning s.r.o.  
Pobřežní 249/46  
186 00 Praha 8 – Karlín  
[www.nwm-med.com](http://www.nwm-med.com)

Verze dokumentu: V1.1

Datum vydání: 8. listopadu 2023

Příloha:

### Seznam specifikací produktu

Jednotka: cm

| Specifikace | Specifikace | Specifikace |
|-------------|-------------|-------------|
| 2.8×4.6     | 2×6         | 10×30       |
| 3.7×5.5     | 2.5×6.5     | 10×35       |
| 4.4×6.9     | 2.8×6.9     | 12.5×12.5   |
| 1.5×5.0     | 5×5         | 13×20       |
| 2.5×6.0     | 5×10        | 15×15       |
| 1.8×6.1     | 5×15        | 15×18       |
| 2×4.5       | 5×20        | 15×20       |
| 2.3×4.7     | 5×25        | 15×22       |
| 2.1×6.5     | 7.5×7.5     | 18×18       |
| 3.6×6.2     | 8×12        | 20×20       |
| 4×4.2       | 10×10       | 21.8×21.8   |
| 1.6×6.0     | 10×15       | 23×23       |
| 4.7×6.8     | 10×20       |             |
| 8.5×14      | 10×25       |             |