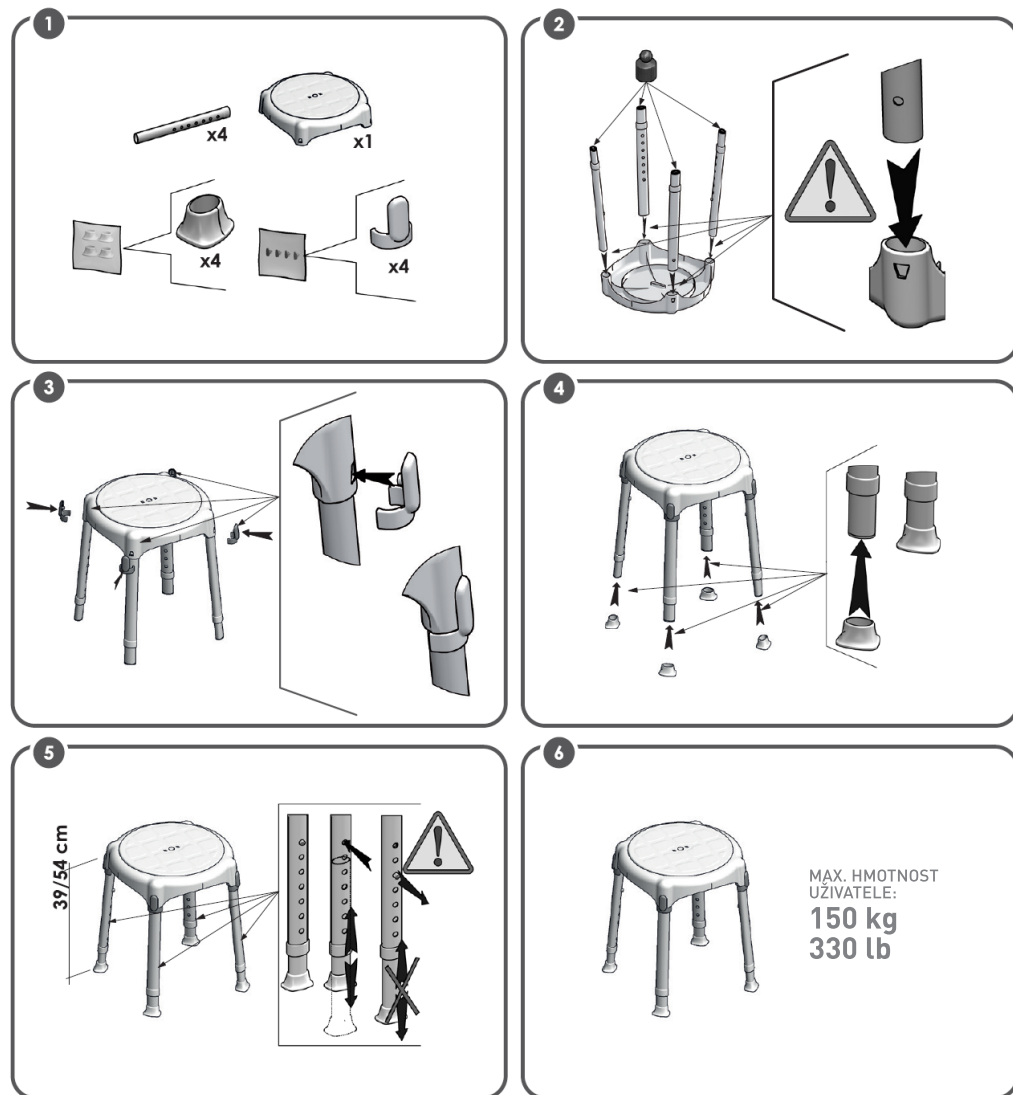


**URČENÉ POUŽITÍ:**

Sedačka do sprchy umožňuje uživateli zvýšení soběstačnosti během toalety a sprchování, snížení svalové únavy v důsledku stání, stejně jako rizika uklouznutí a zranění. Protiskluzové gumové konce nohou zajišťují přilnavost k podlaze a verze vybavené výškově nastavitelnými nohami umožňují uživateli snadno měnit celkovou výšku sedu podle svých potřeb. Verze opatřené otočnou podložkou zvyšují volnost pohybu bez nutnosti vstávání ze stoličky. Díky své flexibilitě lze sedačku umístit i na hrbatou a nepravidelnou podlahu, která se vyskytuje u mnohých sprchových vaniček. Sedačky jsou k dispozici ve třech různých tvarech a lze je díky nízké hmotnosti snadno přemísťovat. Pro pohodlnější používání lze sedačku doplnit měkkou podložkou. Vyměkčení a otočné podložky jsou k dispozici samostatně jako příslušenství.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Sedačka do sprchy je určena pro seniory, vozíčkáře, osoby se sníženou pohyblivostí beder, kolen nebo kyčlí a pro všechny, kteří mají potíže s udržení se ve stoje při sprchování během každodenní osobní hygieny. Od uživatele se vyžaduje, aby měl autonomní rovnováhu během sezení i vstávání, stejně jako odpovídající schopnost udržet se samostatně v sedu. Sedačku do sprchy nedoporučujeme používat, pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo vnímáním.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A INDIKACE:

- Nesmí být překročena maximální hmotnost uživatele uvedená v montážním návodu.
- Před každým použitím se ujistěte, že je sedačka do sprchy správně sestavena a ve stabilní poloze.
- Při montáži přesně dodržujte to, co je uvedeno v uživatelské příručce.
- Během montáže se může zvýšit riziko poranění prstů.
- Sedačku do sprchy a její součásti žádným způsobem neupravujte.
- Sedačku do sprchy nikdy nepoužívejte, pokud je poškozená nebo jakkoli pozměněná a upravená. Praskliny a deformace mohou silně ovlivnit použití a bezpečnost sedačky.
- Po každém použití, by měla být sedačka, když se nepoužívá, sklopena ke zdi.
- Sedačku do sprchy nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určena.
- Sedačka do sprchy nesmí být skladována venku.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobků spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel tyto postupy provést před každým použitím. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti výrobku i všech jeho součástí a musí být zkontrolováno utažení šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících kroků:

1. Měly by se nosit rukavice.
2. Před provedením důkladné dezinfekce odstraňte zjevné hrubé nečistoty.
3. K čištění použijte vodu nebo neagresivní čisticí prostředek.
4. Otřete suchým a čistým hadříkem.

Alternativně lze produkt čistit v domácích myčkách na nádobí při maximální teplotu. Měkkou podložku je nutné čistit výhradně ručně.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Produkt je vhodný pro opětovné použití jinými uživateli. Před opětovným použitím jinými osobami musí být produkt řádně vyčištěn a dezinfikován. Před předáním produktu jiným osobám musí být produkt zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Nevyhazujte výrobek do běžného domovního odpadu. Zeptejte se předem místního úřadu na správný a ekologický způsob likvidace.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Pokud došlo k vážné nehodě s tímto výrobkem, kontaktujte výrobce tohoto produktu na adrese info@kdesign-group.com a odpovědný úřad ve vaší zemi.

