

PODMÍNKY UŽITÍ

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)	Identifikační štítek / Typ výrobku (vypsat): Identifikačný štítok / Typ výrobku (vypísať): :
Výstupní kontrola: Výstupná kontrola:	
Jméno: Meno	
Podpis: Podpis:	

Podmínky užití:

- Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
- Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
- Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
- Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
- Reklamacie musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacie se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
- Při uplatnění reklamacie musí uživatel nepochybně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacie se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
- Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
- Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
- Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
- Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamacie.
- Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat

Podmienky použitia:

- Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktoré sa vyskytne u spotrebného tovaru počas 24 mesiacov od prevzatia.
- Výrobek musí byť použitý výlučne na účely, na ktoré sa má určiť a používateľ musí riadiť pokyny uvedené v návode na použitie. Za škody vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania v rozpore s "Návodom na použitie" výrobca neodpovedá.
- Výrobok musí byť riadne používaný, ošetrovaný, udržiavaný a skladovaný podľa pokynov uvedených v návode na použitie.
- Každú vzniknutú chybu je potrebné ihneď po jej zistení opraviť. Za chyby vzniknuté následkom ďalšieho používania výrobku, bez toho, aby boli pôvodné chyby opravené, nesie plnú zodpovednosť používateľ.
- Reklamácie musí byť uplatnená u predajcu (vrátane predajcov cez internet alebo alternatívnych), kde bol produkt zakúpený. Uplatnenie reklamácie sa riadi príslušnými odsekmi Občanského a iných zákonov ČR.
- Pri uplatnení reklamácie musí používateľ nepochybne preukázať, že u predajcu tovaru / výrobku zakúpil. Na zabezpečenie vyriešenia reklamácie sa odporúča predložiť doklad o zakúpení výrobku a vyplnený posledný zoznam návodu na použitie s výrobným číslom reklamovaného tovaru.
- Výrobca zabezpečuje výrobok identifikačným štítkom. Ak sú údaje na identifikačnom štítku nečitateľné alebo ak neexistuje úplne, môže byť používateľ vyzvaný na doloženie totožnosti reklamovaného tovaru.
- Reklamný postup môže byť zahájený, ak je reklamovaný tovar zaslaný opatrne zabalené a zaistené proti poškodeniu. Veľmi vhodné je tovar zaslaný v originálnom obale. Za poškodenie reklamovaného tovaru, ktoré vzniklo pri jeho zaslání, výrobca nezodpovedá. Majiteľ je povinný predložiť reklamované výrobky čisté a hygienicky nezávadné, podľa všeobecných hygienických zásad. Majiteľ nemôže pri žiadosti požadovať, aby v priebehu reklamácie riadenia vykonali základnú údržbu alebo čistenie výrobku.
- Uplatnenie práva z vady sa nevztahuje na opotrebenie vecí spôsobené jej obvyklým používaním, najmä na znečistenie, opotrebenie, či poškodenie potahu, plastových dielov, opotrebenie brzd, opotrebenie dezénu či defektu pneumatík. Uplatnenie práva z vady tiež stráca platnosť, ak boli závady spôsobené nedovoleným preťažovaním, nehodou, mechanickým poškodením, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku či neodborným zaobchádzaním s ním.
- Technické riešenie podvozku nezaručuje ideálne vedenie stopy, preto táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie.
- Dobu uplatnenia práva z vady nemožno zamieňovať s užitnou dobou, tj. dobou po ktorej sa pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby, môžu tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, účel a rozdielnosť v konštrukcii správne používať

Datum prodeje (den, měsíc, rok):
 Dátum predaja (deň, mesiac, rok):

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:
 Meno (paličkami), telefón, razítko a podpis predávajúceho:

_____ . _____ . _____



Židle toaletní Stolička toaletná

Návod k použití Návod na použitie



Výrobce a distributor v ČR:

PATRON Bohemia a.s.
 Českolipská 3419
 CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
 tel.: +420-315 630 111
 reha.cz@patron.eu
 www.patron.eu

Židle toaletní TZ

Popis

- Jedná se o skládací toaletní židli s odklopnými opěrkami rukou, výsuvným opěradlem zad a odklopným sedátkem.
- Skládací konstrukce šetří nároky na přepravní i skladovací prostor.
- Je vhodná jak do domácností, tak i do ústavů a nemocnic.
- Má velmi snadnou údržbu.
- Povrchová úprava - práškový lak.
- Židle se skládá z ocelové konstrukce z tenkostěnných trubek, plastové sedací desky s držáky pro toaletní nádobu, toaletní nádoby s víkem a držákem, výsuvným opěradlem zad, odklápěcí krycí čalouněné desky a odklopnými opěrkami rukou. Do sestavy je spojena pomocí čtyř šroubů.

Použití

- Výsuvnou opěrku zad vyndáte, povolíte-li šrouby na trubce zádové opěrky a vysunete ji směrem nahoru. Při nasazení postupujte opačně, nasadíte zádovou opěrku do trubek konstrukce a šrouby utáhněte.
- Toaletní nádobu vyndáte tak, že si stoupnete za židli a vysunete ji z držáků směrem k sobě. Při nasazení zasuňte od sebe.
- Použití zdravotnického prostředku při okolní teplotě: od + 3 °C do + 35 °C

Bezpečnost a ochrana

- Při použití a manipulaci toaletní židle neohrožujte uživatele, Vás ani ostatní.
- Uživatele toaletní židle nikdy nenechte bez dozoru.
- Uživatele toaletní židle nenechte vstávat a sedat bez asistence druhé osoby.
- V případě výskytu nestandardní příhody, kontaktujte výrobce info@patron.eu

Údržba

- Toaletní židli omývejte teplou vodou s přidavkem běžného saponátu a osušte.
- Toaletní židli uložte na suché a bezpečné místo.

Židle toaletní TV (s koly)

Popis

- Pojízdný toaletní vozík má sklopné opěrky rukou, odklápěcí trubkovou podnožku a odklopné sedátko.
- Je vhodný jak do domácností, tak i do ústavů a nemocnic.
- Má velmi snadnou údržbu.
- Pojezdová kola o prům. 127 mm jsou otočná, s šedou obručí, zadní kola jsou s brzdou.
- Kostra rámu je vyrobena z ocelových chromovaných trubek.
- Vozík se skládá z ocelové kostry, plastové sedací desky bílé s držáky pro toaletní nádobu, toaletní nádoby s víkem a držákem, odklápěcí krycí čalouněné desky, odklopnými opěrkami rukou a otočných koleček.

Použití

- Toaletní nádobu vyndáte, odklopíte -li krycí čalouněnou desku, plastovou sedací desku a poté toaletní nádobu vysunete směrem nahoru, nebo stoupnete -li si za vozík a vysunete ji z držáků směrem k sobě. Při nasazení zasuňte od sebe.
- Vozík zabrzdíte sešlápnutím obou pedálů na zadních kolech.
- Použití zdravotnického prostředku při okolní teplotě: od + 3 °C do + 35 °C

Bezpečnost a ochrana

- Při použití a manipulaci vozíku neohrožujte uživatele, vás ani ostatní.
- Uživatele vozíku nikdy nenechte bez dozoru.
- Uživatele vozíku nenechte vstávat a sedat bez asistence druhé osoby.
- Nestoupejte na podnožku.
- Brzda musí být použita vždy, když si uživatel sedá nebo vstává.

Údržba

- Vozík omývejte teplou vodou se saponátem a osušte.
- Vozík uložte na suché a bezpečné místo.

Technické údaje	
Celková hloubka	63 cm
Celková výška	100 cm
Šířka sedačky	46 cm
Celková šířka	54 cm
Vzdálenost sedací roviny od země	51 cm
Celková hmotnost	9 kg
Nosnost	120 kg

Technické údaje	
Celková hloubka	52 cm
Celková výška	92 cm
Celková šířka	48 cm
Celková hmotnost	16 kg
Nosnost	120 kg

Stolička toaletná TZ

Popis

- Ide o skladaciu toaletnú stoličku s odklopnými opierkami rúk, výsuvným operadlom chrbta a odklopným sedadlom.
- Skladacia konštrukcia šetrí nároky na prepravné i skladovacie priestor.
- Je vhodná ako do domácností, tak aj do ústavov a nemocníc.
- Má veľmi jednoduchú údržbu.
- Povrchová úprava - práškový lak.
- Stolička sa skladá z oceľovej konštrukcie z tenkostenných trubiek, plastové sedacie dosky s držiakmi pre toaletnú nádobu, toaletné nádoby s vekom a držiakom, výsuvným operadlom chrbta, odklápacie krycie čalúnené dosky a odklopnými opierkami rúk. Do zostavy je spojená pomocou štyroch skrutiek.

Použitie

- Výsuvnú opierku chrbta vyberiete, povolíte ak skrutky na trubke chrbtovej opierky a vysuniete ju smerom nahor. Pri nasadení postupujte opačne, nasadíte chrbtovú opierku do trubiek konštrukcie a skrutky utiahnete.
- Toaletnú nádobu vyberiete tak, že sa postavíte za stoličku a vysuniete ju z držiakov smerom k sebe. Pri nasadení zasuňte od seba.
- Použitie zdravotníckej pomôcky pri okolitej teplote: od + 3 °C do + 35 °C

Bezpečnosť a ochrana

- Pri použití a manipulácii toaletné stoličky neohrožujte užívateľa, Vás ani ostatní.
- Užívateľa toaletné stoličky nikdy nenechajte bez dozoru.
- Užívateľa toaletné stoličky nenechajte vstávať a sadat' bez asistencie druhej osoby.
- V prípade výskytu neštandardné príhody, kontaktujte výrobcu info@patron.eu

Údržba

- Toaletnú stoličku umývajte teplou vodou s pridavkom bežného saponátu a osušte.
- Toaletnú stoličku uložte na suché a bezpečné miesto.

Stolička toaletná TV (s kolesami)

Popis

- Pojazdný toaletný vozík má sklopné opierky rúk, odklápacia trubkovú podnožku a odklopné sedátko.
- Je vhodná do domácností, ústavov i nemocníc.
- Má veľmi ľahkú údržbu.
- Pojazdné kolesá s priemerom 127 mm sú otočné so šedou obručou, zadné kolesá sú s brzdou.
- Kostra rámu je vyrobena z ocelových chromovaných trubek.
- Vozík se skládá z ocelové kostry, plastové sedací desky bílé s držáky pro toaletní nádobu, toaletní nádoby s víkem a držákem, odklápěcí krycí čalouněné desky, odklopnými opěrkami rukou a otočných koleček.

Použitie

- Toaletnú nádobu vytiahnete, keď odklopíte kryciu čalunenú dosku, plastovú sedaciu dosku a potom toaletnú nádobu vysuniete smerom hore, alebo sa postavte za vozík, vysuňte ju z držiakov smerom k sebe. Pri nasadzovaní zasuňte od seba.
- Vozík zabrzdíte zašlápnutím oboho pedálov na zadných kolesách.
- Použitie zdravotníckej pomôcky pri okolitej teplote: od + 3 °C do + 35 °C

Bezpečnosť a ochrana

- Pri použití a manipulácii s vozíkom neohrožujte užívateľa, vás ani ostatných.
- Užívateľa vozíka nikdy nenechajte bez dozoru.
- Užívateľa vozíka nenechajte vstávať a sadat' bez asistencie druhej osoby.
- Nestúpajte na podnožku.
- Brzda musí byť použitá vždy, keď si užívateľ sadá alebo vstáva.

Údržba

- Vozík umývajte teplou vodou so saponátom a osušte ho.
- Vozík odložte na suché a bezpečné miesto.

Technické údaje	
Celková hĺbka	63 cm
Celková výška	100 cm
Šířka sedačky	46 cm
Celková šířka	54 cm
Vzdálenosť sedacej roviny od zeme	51 cm
Celková hmotnosť	9 kg
Nosnosť	120 kg

Technické údaje	
Celková hĺbka	52 cm
Celková výška	92 cm
Celková šířka	48 cm
Celková hmotnosť	16 kg
Nosnosť	120 kg