

Návod k použití – verze 4 (2025 revize)**REF: 4279 & 4279 D****Produkt: Sklopná sedačka do sprchy s výřezem****TECHNICKÉ PARAMETRY****Model 4279 D**

Hloubka sedáku: 37 cm
Šířka sedáku: 42 cm
Výška sedáku: 40–56 cm
Nosnost: 120 kg

**Model 4279**

Hloubka sedáku: 37 cm
Šířka sedáku: 42 cm
Nosnost: 120 kg

POPIS

Zdravotnický prostředek, bezpečnostní třídy I., trvale upevněná plastové sprchová sedačka, které lze po použití sklopit ke stěně. Volitelně jsou vybavena nastavitelnými podpěrnými nohami pro přizpůsobení výšce uživatele.

4279 – Bez nohou, 4279 D – S nohami

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Umožňuje uživateli bezpečně a pohodlně sedět při sprchování.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení musí být připevněno k nosné stěně kvalifikovanou osobou pomocí rozpěrných šroubů.

Druh kotvení závisí na konstrukci stěny, proto doporučujeme konzultaci s odborníkem.

Pokud jsou instalovány podpěrné nohy, musí být před upevněním nastaveny na správnou výšku a po montáži umístěny svisle.

Výšku nohou lze upravit vyšroubováním závitové části a zajištěním matice.

Pro spuštění sedátka jej zatáhněte dolů. Po použití jej zvedněte do svislé polohy.

Nikdy nespouštějte sedátko tahem za nohy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nestoupejte na výrobek.

Ujistěte se, že uživatel je schopen výrobek bezpečně používat.

Při použití koupelových prostředků postupujte opatrně, mohou způsobit kluzkost povrchů.

ČIŠTĚNÍ

Čistěte vlhkým hadříkem nebo antibakteriální utěrkou.
Nepoužívejte abrazivní prostředky.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE

Předpokládaná životnost výrobku je 5 let při správném používání.
Po skončení životnosti kontaktujte dodavatele nebo výrobce.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda musí být neprodleně nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu.



Roma Medical Aids Ltd.
York Road, Bridgend Industrial
Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
website: www.romamedical.co.uk
e-mail: sales@romamedical.co.uk
tel: +44 1656 674488
fax: +44 1656 674499



DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
website: www.dmapraha.cz
e-mail: info@dmapraha.cz



StartDock Rotterdam B.V.,
Westplein 12-14, 3016 BM,
Rotterdam, The Netherlands

POZNÁMKY