


kliniderm® debride

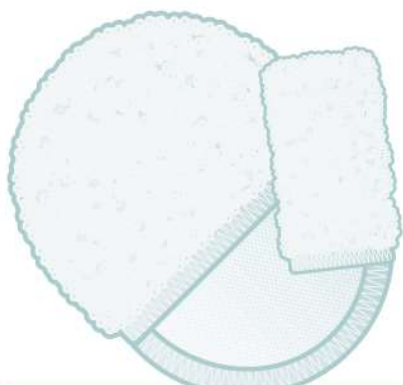

KLINION®
WOUND CARE

MD 1282

STERILE


CE 1282

IFU_KWC059
0_040105
08-2021

Farmaban S.A.
Carrer Vilella de Claret, 6
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona
Spain

Medeco B.V.
Alexander Flemingstraat 2
NL-3261 MA Oud-Beijerland
The Netherlands

www.medeco.org

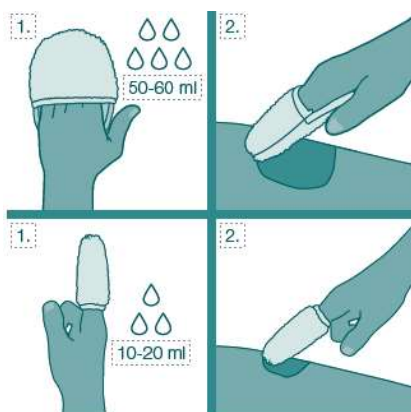

Návod na použití

Popis produktu

Kliniderm®debride je sterilní monofilní polyesterová podložka z mikrovláknů se smyčkami na straně kontaktu s ránou. Vnitřní strana je potažena polypropylenem. Konstrukce podložky umožňuje dobré uchopení a řízení podložky během používání. Kliniderm®debride je určen jako rychlá, vysoce účinná a bezpečná metoda mechanického debridementu. Používá se k absorpci exsudátu, buněčných zbytků a keratózy během debridementu, je šetrný k neporušené tkáni.

MD Zdravotnický prostředek

Indikace

Kliniderm®debride je vhodný pro léčbu superficiálních ran (akutních i chronických) a okolní kůže: vředů diabetické nohy, arteriálních a žilních vředů, proleženin, pooperačních ran hojících se sekundárním záměrem, tržné rány a odřeniny, popáleniny/opáleniny, lymfedém. Přípravek je určen pro dospělé s devitalizovanou tkání způsobenou chronickými a akutními ranami v jakémkoli zdravotnickém zařízení. Kliniderm®debride a Kliniderm®debride pocket lze používat zaměnitelně. Kliniderm®debride pocket se doporučuje používat v následujících případech při ošetřování malých povrchových ran, kdy je nutná zvýšená kontrola při aplikaci tlaku. Kliniderm®debride se doporučuje při ošetřování velkých povrchových ran.

Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace.

Návod k použití

1. Namočte přípravek Kliniderm®debride přibližně v 50-60 ml (pro kapsy Kliniderm®debride použijte 10-20 ml) roztoku na čištění rány (např. fyziologický roztok nebo destilovanou vodu), postupujte podle místních pokynů.
2. Jemným tlakem otřete navlhčenou stranou ránu a/nebo okolní kůži do hloubky. krouživým pohybem.
3. Likvidujte podle místních postupů a pokynů.

Bezpečnostní opatření

- Při rychlém tlaku nebo tření buďte opatrní a nezpůsobujte pacientovi nadměrnou bolest.
- Zajistěte sterilní přiložení polštářku na ruku/prst, nedotýkejte se strany kontaktu s ránou.
- polštářku před použitím.
- Kliniderm®debride a Kliniderm®debride pocket jsou na jedno použití. Při každém samostatném použití používejte nový polštářek, aby se zabránilo šíření bakterií.
- Neřežte.
- Nepoužívejte jako obvaz na rány (nenechávejte na ráně).
- Nepoužívejte u pacienta se známou citlivostí na jednu nebo více složek tohoto výrobku. (polyester a polypropylen).
- Nepoužívejte opakovaně. Opakované použití může způsobit vážné infekce.
- Opakovaně nesterilizujte.
- Pouze pro vnější použití.
- Pro použití pod dohledem zdravotnického pracovníka.
- Doba použitelnosti: 5 let.