



UM-KINGPWSL-46K Rev.1 as of 2024/07

MAX USER
WEIGHT:
170 kg
375 lb

URČENÉ POUŽITÍ:

Sklopná sedačka do sprchy umožňuje uživateli zvýšení soběstačnosti během sprchování při každodenní osobní hygieně, snížení svalové únavy v důsledku sprchování vestoje, stejně jako rizika uklouznutí a zranění. Díky sklopnému mechanismu je tato sedačka vhodná i do malých koupelen, kde nepřekáží a poskytují více prostoru pro bezpečné užívání.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Sklopná sedačka do sprchy s podpůrnými nohami je určena pro seniory, vozíčkáře, osoby se sníženou pohyblivostí beder, kolien nebo kyčlí a pro všechny, kteří mají potíže s udržením se ve stoje při sprchování během každodenní osobní hygieny. Od uživatele se vyžaduje, aby měl autonomní rovnováhu během sezení i vstávání, stejně jako odpovídající schopnost udržet se samostatně v sedu. Sedačku do sprchy nedoporučujeme používat, pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo vnímáním.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A INDIKACE:

- Nesmí být překročena maximální hmotnost uživatele uvedená v montážním návodu.
- Před každým použitím se ujistěte, že je sedačka do sprchy správně sestavena a ve stabilní poloze.
- Při montáži přesně dodržujte to, co je uvedeno v uživatelské příručce.
- Během montáže se může zvýšit riziko poranění prstů.
- Sedačku do sprchy a její součásti žádným způsobem neupravujte.
- Sedačku do sprchy nikdy nepoužívejte, pokud je poškozená nebo jakkoli pozměněná a upravená. Praskliny a deformace mohou silně ovlivnit použití a bezpečnost sedačky.
- Po každém použití, by měla být sedačka, když se nepoužívá, sklopena ke zdi.
- Sedačku do sprchy nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určena.
- Sedačka do sprchy nesmí být skladována venku.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobků spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel tyto postupy provést před každým použitím. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti výrobku i všech jeho součástí a musí být zkontrolováno utažení šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících kroků:

1. Měly by se nosit rukavice.
2. Před provedením důkladné dezinfekce odstraňte zjevné hrubé nečistoty.
3. K čištění použijte vodu nebo neagresivní čisticí prostředek.
4. Otřete suchým a čistým hadříkem.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Produkt je vhodný pro opětovné použití jinými uživateli. Před opětovným použitím jinými osobami musí být produkt řádně vyčištěn a dezinfikován. Před předáním produktu jiným osobám musí být produkt zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Nevyhazujte výrobek do běžného domovního odpadu. Zeptejte se předem místního úřadu na správný a ekologický způsob likvidace.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Pokud došlo k vážné nehodě s tímto výrobkem, kontaktujte výrobce tohoto produktu na adrese info@kdesign-group.com a odpovědný úřad ve vaší zemi.

