

Návod k použití – verze 4 (2025 revize)**REF: 3515****Produkt: Toaletní židle****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Celková hloubka:	59 cm
Celková šířka:	51 cm
Celková výška:	90 cm
Hloubka sedáku:	46 cm
Šířka sedáku:	46 cm
Výška sedáku:	51 cm
Hmotnost výrobku:	7 kg
Nosnost:	133 kg

Zobrazený model: 3515

POPIS

Přenosná skládací toaletní židle s polstrovanou opěrkou zad, sedákem a krytem sedáku se sklopnými područkami. Součástí je vyjímatelná toaletní nádoba s víkem, kterou lze snadno čistit. Výrobek lze složit pro snadné skladování.

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek, bezpečnostní třídy I., určený k použití jako přenosná toaletní židle se snadným skladováním a možností použití vyjímatelné toaletní nádoby.

NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte výrobek na vhodné místo v místnosti pro použití uživatelem.

Rozložte židli jemným odtažením zadních nohou od hlavního rámu.

Před použitím se ujistěte, že je výrobek plně rozložený a stabilní.

Zasuňte toaletní nádobu do vodicích lišt pod sedák a nasadte kryt sedáku.

Před použitím sejměte kryt sedáku a posuňte víko nádoby dozadu.

Ujistěte se, že jsou područky spuštěny pro oporu. Pro boční přesun nebo skladování je lze zvednout.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte výrobek na nerovném nebo šikmém povrchu.

Nikdy nestoupejte na výrobek.

Při skládání a rozkládání postupujte opatrně, aby nedošlo ke skřípnutí prstů mechanismech.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití čistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím nebo dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte škrabky ani abrazivní pomůcky.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE

Rám výrobku (kromě gumových koncovek) má záruku 12 měsíců a odhadovanou životnost 5 let. Při správném používání a údržbě může být životnost prodloužena. Nesprávné nebo extrémní používání ji může výrazně zkrátit.

Po ukončení používání kontaktujte dodavatele ohledně likvidace nebo výrobek vraťte výrobci k recyklaci na vlastní náklady.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku, musí být neprodleně nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient bydliště.



Roma Medical Aids Ltd.
York Road, Bridgend Industrial
Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
website: www.romamedical.co.uk
e-mail: sales@romamedical.co.uk
tel: +44 1656 674488
fax: +44 1656 674499



DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
website: www.dmapraha.cz
e-mail: info@dmapraha.cz
StartDock Rotterdam B.V.,
Westplein 12-14, 3016 BM,
Rotterdam, The Netherlands

POZNÁMKY