

NÁVOD K POUŽITÍ



CS VÝROBEK JE URČEN POUZE K POUŽITÍ VE STATICKÉM REŽIMU. PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE STABILITU. UJISTĚTE SE, ŽE JSOU VŠECHNY NOHY NASTAVENY DO STEJNÉ VÝŠKY. PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JSOU E-KLIPY BEZPEČNĚ UPEVNĚNÝ. PERCHINGOVÁ STOLIČKA NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA MÍSTO SPRCHOVÉ STOLIČKY, PROTOŽE JEJÍ RÁM NENÍ CHRÁNĚN PROTI KOROZI JAKO U SPRCHOVÉ STOLIČKY.



PRIMA[®] STOOLS

MODULAR SHOWER STOOL

MODULAR PERCHING STOOL

Vítáme vás u vašeho nového výrobku Gordon Ellis.
Doufáme, že se pro vás stane užitečnou pomůckou v každodenním životě.



**POKYNY K MONTÁŽI NAJDETE
UVNITŘ A NA DRUHÉ STRANĚ**



**MAXIMÁLNÍ HMOTNOST
UŽIVATELE**



JAKÁKOLI ZÁVAŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, MUSÍ BÝT NAHLÁŠENA VÝROBCI. KONTAKTNÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY NÍŽE.

Vaše modulární sprchové a perchingové stoličky PRIMA[®] byly speciálně vyvinuty naším designérským týmem ve Spojeném království s cílem kompenzovat zranění nebo pomoci překonat dočasné či trvalé zdravotní omezení. Jejich účelem je usnadnit každodenní činnosti.



**PRIMA MODULAR
SHOWER STOOL**



**PRIMA MODULAR
PERCHING STOOL**



POKYNY K ČIŠTĚNÍ

OTÍREJTE NEABRAZIVNÍM HADŘÍKEM A MÝDLOVOU VODOU.



PH 5 - 9

„Tento dokument je českým překladem schváleného návodu k použití výrobce. Obsah je shodný.“

PROHLÉDNĚTE SI CELOU NABÍDKU ONLINE NA
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare

@EllisHealthcare



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT

EC REP

MADE IN CHINA

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013
MALTA



MD

IFU-REF 66153/0423-1

REF 66153 + 66173

PROHLÉDNĚTE SI CELOU NABÍDKU ONLINE NA
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK


gordonellis.healthcare

@EllisHealthcare





A + B





POUZE
STOLIČKA

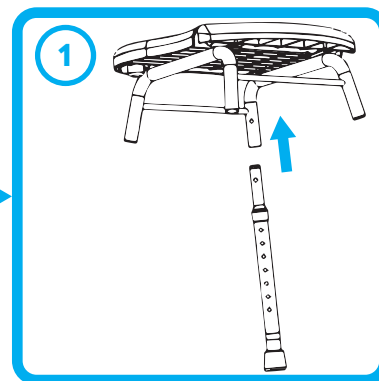

POZNÁMKA: JEDNA NOHA MÁ
DODATEČNÉ OTVORY PRO JEMNĚJŠÍ
NASTAVENÍ VÝŠKY A VYŠŠÍ STABILITU.

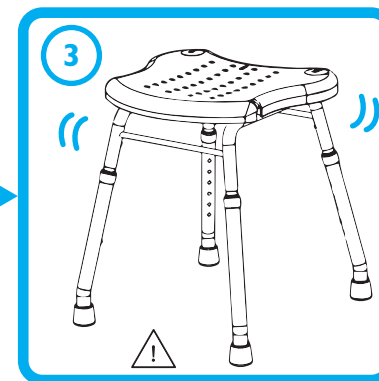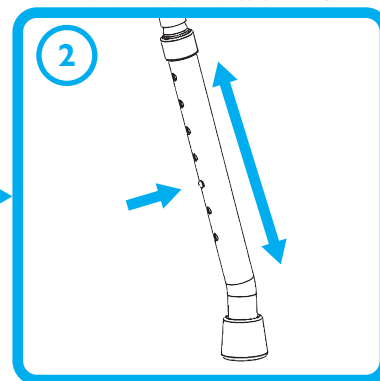

STOLIČKA S
OPĚRKAMI

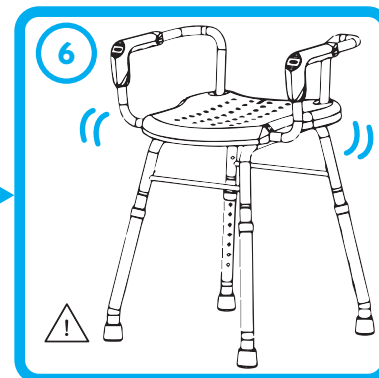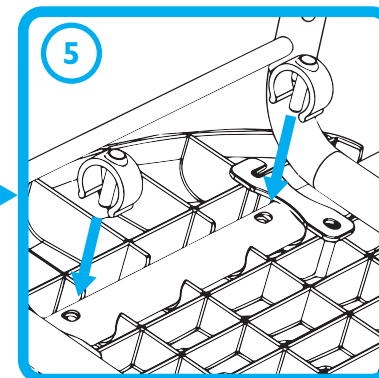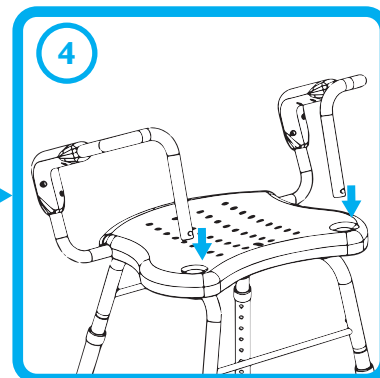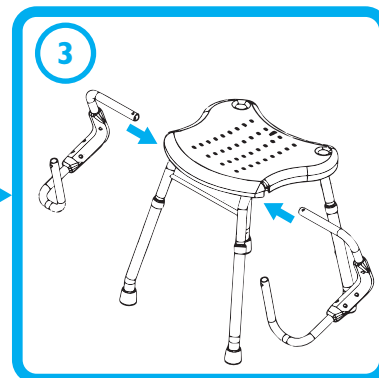

STOLIČKA S
OPĚRKAMI A
OPĚRADLEM

