


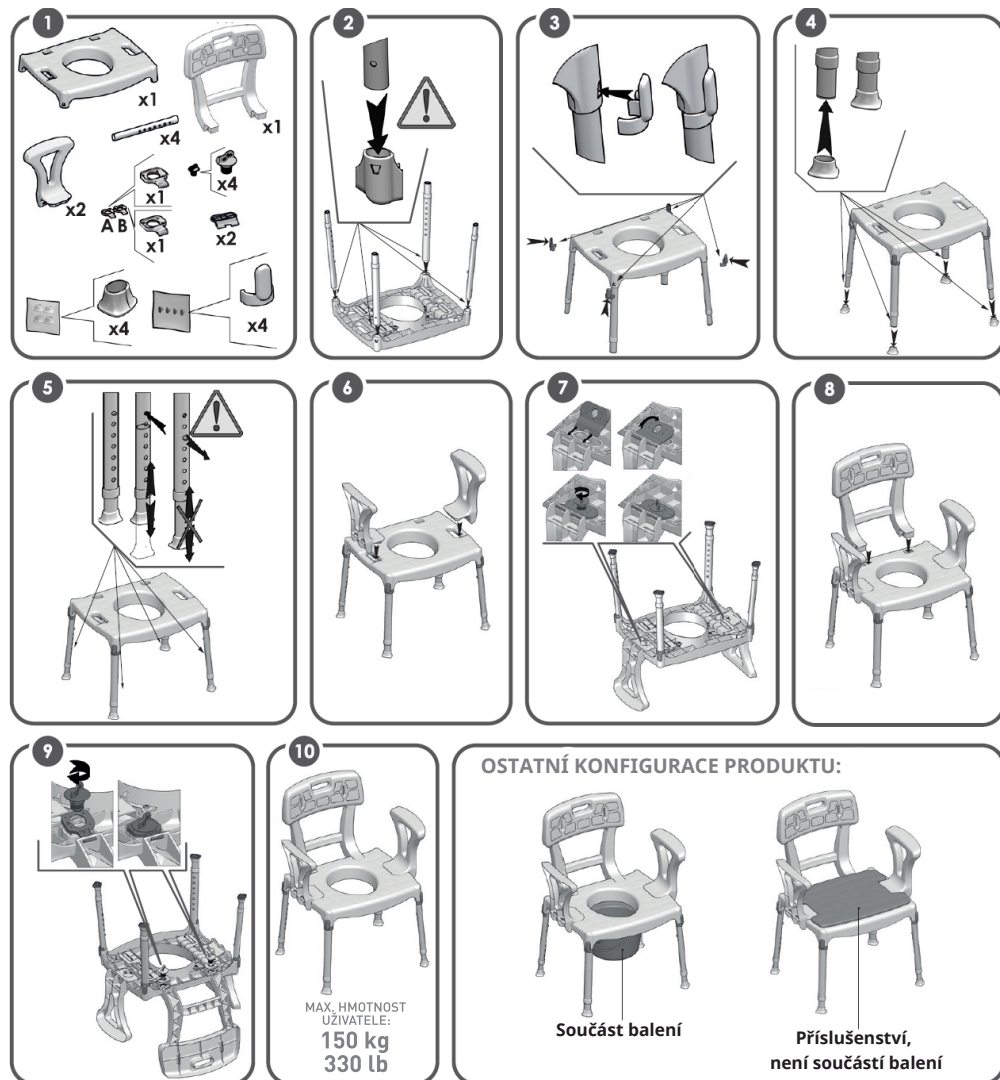

UM-KINGCMBDA-46K Rev.1 as of 2024/07

MADE IN ITALY

ZÁRUKA
2 ROKY**URČENÉ POUŽITÍ:**

Židle/nástavec s opěrkou zad a područkami umožňuje uživateli zvýšení soběstačnosti během toalety a sprchování, snížení svalové únavy v důsledku stání, stejně jako rizika uklouznutí a zranění. Židli/nástavec lze použít ve třech různých konfiguracích:

- Nástavec na WC umístěným přímo nad toaletní mísou jako alternativa k jejímu přímému použití, což umožňuje koncovému uživateli mít vyšší, širší a pohodlnější sed, než jaký nabízí standardní WC.
- Použití v kombinaci s toaletní nádobou, která je součástí balení, umožňuje použití jako toaletní židle i mimo WC.
- Doplněním polstrované podložky, která je k dispozici samostatně jako příslušenství, lze židli/nástavec použít do sprchy.

Nohy jsou výškově nastavitelné, takže si uživatel může vybrat výšku sedu podle svých potřeb. Nohy lze také nastavit také tak, že přední jsou nižší než zadní. To uživateli umožní udržet správné držení těla a také usnadnit vstávání a sezení. Nohy jsou opatřeny protiskluzovými koncovkami, které díky své přilnavosti zachovávají stabilitu i na hrbatých podlahách, jaké jsou typické pro mnohé sprchové vaničky. Opěrka zad a područky navíc poskytují bezpečnost a pohodlí. Židli/nástavec lze díky nízké hmotnosti snadno přemísťovat.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Židle/nástavec s opěrkou zad a područkami je určena pro seniory, vozíčkáře, osoby se sníženou pohyblivostí beder, kolen nebo kyčlí a pro všechny, kteří mají potíže s udržením se ve stoje při sprchování během každodenní osobní hygieny nebo kteří potřebují větší stabilitu a zvýšení sedu při používání WC. Od uživatele se vyžaduje, aby měl autonomní rovnováhu během sezení i vstávání, stejně jako odpovídající schopnost udržet se samostatně v sedu. Židli/nástavec nedoporučujeme používat, pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo vnímáním.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A INDIKACE:

- Nesmí být překročena maximální hmotnost uživatele uvedená v montážním návodu.
- Před každým použitím se ujistěte, že je židle/nástavec správně sestavena a ve stabilní poloze.
- Židli/nástavec lze používat pouze na povrchu bez překážek.
- Při montáži přesně dodržujte to, co je uvedeno v uživatelské příručce.
- Před použitím na toaletní mísou se ujistěte, že je židle/nástavec umístěn přímo nad WC.
- Během montáže se může zvýšit riziko poranění prstů.
- Na židli/nástavci se nehoupejte, mohlo by dojít k podklouznutí, převrácení nebo sesunutí nohou. Židli/nástavec mějte vždy na 4 nohách.
- Židli/nástavec a její součásti žádným způsobem neupravujte.
- Židli/nástavec nikdy nepoužívejte, pokud je poškozená nebo jakkoli pozmeněná a upravená. Praskliny a deformace mohou silně ovlivnit její použití a bezpečnost.
- Po použití by měla být židle/nástavec odstraněna ze sprchové vaničky, aby se zabránilo jakémukoliv překážení.
- Židli/nástavec nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určena.
- Židli/nástavec nesmí být skladována venku.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobků spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel tyto postupy provést před každým použitím.

Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti výrobku i všech jeho součástí a musí být zkontrolováno utažení šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících kroků:

1. Měly by se nosit rukavice.
2. Před provedením důkladné dezinfekce odstraňte zjevné hrubé nečistoty.
3. K čištění použijte vodu nebo neagresivní čisticí prostředek.
4. Otřete suchým a čistým hadříkem.

Alternativně lze výrobek čistit v domácích myčkách na nádobí při maximální teplotě.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Produkt je vhodný pro opětovné použití jinými uživateli. Před opětovným použitím jinými osobami musí být produkt řádně vyčištěn a dezinfikován. Před předáním produktu jiným osobám musí být produkt zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Zeptejte se předem místního úřadu na správný a ekologický způsob likvidace.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Pokud došlo k vážné nehodě s tímto výrobkem, kontaktujte výrobce tohoto produktu na adrese info@kdesign-group.com a odpovědný úřad ve vaší zemi.

