
Kulatá stolička do sprchy

Katalogové číslo: VCTP0011-R

Návod k použití

Vydání: EJ 10.2023



VITEA[®]
CARE



Lidé se zrakovým postižením mohou najít soubory PDF a další informace o našich produktech na našich webových stránkách na adrese:

<www.viteacare.com>.

👉 V případě potřeby kontaktujte svého specializovaného prodejce.

Zrakově postižený uživatel může také požádat doprovázející osobu, aby si přečetla pokyny.

Obsah

Úvod	5
Indikace.....	6
Kontraindikace	6
Popis produktu.....	6
Použití	7
Montáž	7
Technické parametry.....	9
Péče a údržba	9
Čištění.....	9
Dezinfekce.....	10
Opětovné použití (opakovaně použitelný produkt)	10
Servis a opravy	10
Životnost produktu.....	10
Likvidace produktu.....	10
Symbols	11

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Jsme přesvědčeni, že splní vaše očekávání. Před prvním použitím si přečtěte tento návod k použití. Tato příručka poskytuje nezbytné informace týkající se bezpečného používání výrobku. Dodržování doporučení výrazně přispěje k prodloužení životnosti a zachování estetiky výrobku. Rádi bychom upozornili, že se neustále snažíme zlepšovat kvalitu našich výrobků, což může mít za následek drobné změny, které nejsou obsaženy v návodu. Ujistěte se, že jste vyplnili a přiložili dokument „záruční list“ svému distributorovi, abyste zajistili nejlepší možný servis.

POZOR

Vždy dodržujte základní opatření uvedená níže pro bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.



VAROVÁNÍ!

Nesprávné použití může způsobit smrt, vážné zranění, vyvolat nebezpečné podmínky nebo poruchu výrobku.



POZOR!

Nesprávné použití může způsobit zranění osob a/nebo poškození produktu.



DOPORUČENÍ!

Chcete-li svůj produkt udržet v dobrém funkčním stavu, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Pokud výrobek používá jiná osoba, poskytněte jí prosím kopii tohoto návodu k použití.

Tento návod k použití odráží design a specifikace produktu v době vydání. Kvůli změnám designu nemusí některé ilustrace a fotografie v návodu odpovídat zakoupenému produktu. Vyhrazuje si právo na změny designu. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za zranění osob nebo škody na majetku, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného nebo nebezpečného použití tohoto produktu.

Indikace


Použití k hygienickým procedurám ve vaně nebo sprše v případech výrazného omezení pohybu pacienta, celkově špatného stavu pacienta, pokročilého věku. Pro použití u pacientů, kteří nemohou sami provádět hygienické činnosti a procedury. Stolička poskytuje pacientovi stabilní polohu a chrání před rizikem pádu. Ochrana před infekcí nebo zvlhčením ran během hygienických procedur. Stoličku lze používat v nemocničních i domácích podmínkách.

Kontraindikace

Kontraindikace polohy vsedě, nedostatečná stabilizace trupu. Pacienti s koordinací, rovnováhou nebo mentálním postižením by neměli být ponecháni bez dozoru.

Popis produktu

Sprchová stolička je lehké konstrukce vyrobená z hliníku. Stupňovitě nastavitelný systém nohou poskytuje stabilní opěrnou plochu.

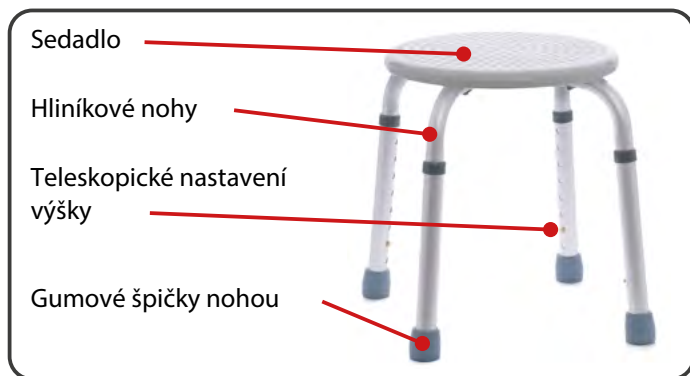


Obrázek 1. Prvky stoličky.

Použití

Po rozbalení zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly dle výše uvedeného seznamu komponent. Ujistěte se, že všechny prvky nemají viditelné mechanické poškození. V případě pochybností kontaktujte výrobce. Stolička by se neměla používat, dokud nejsou všechny součásti správně sestaveny.

Montáž

- Montáž stoličky začněte spojením rámu stoličky vložení šroubu s podložkou do montážního otvoru umístěného uprostřed rámu (obrázek 2.)

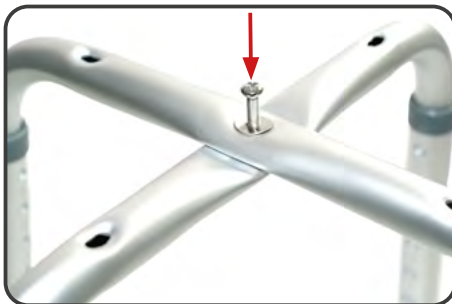

Obrázek 2. Montáž rámu s nohami.

- Poté pomocí 10 mm otevřeného klíče a křížového šroubováku utáhněte šroub a ujistěte se, že je rám sedadla bezpečně připojen. Ujistěte se, že jsou všechny nohy nastaveny ve stejné výšce a že jsou správně zajištěny.



Obrázek 3. Montáž rámu s nohami.

- Sedadlo by se mělo namontovat pomocí přiložených šroubů tak, že je zasunete do otvorů v rámu a poté je zašroubujete do montážních míst na sedadle pomocí křížového šroubováku (obrázek 4).



Obrázek 4. Montáž sedadla.

Bezpečnost použití



VAROVÁNÍ!

Jakýkoli „závažný incident“ týkající se prostředku musí být oznámen výrobci a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel bydliště.



POZOR!

Výrobek je určen pro handicapované osoby s onemocněním pohybového aparátu. Pokud si nejste jisti, zda vám váš zdravotní stav dovoluje produkt používat, poraďte se se zdravotníkem.



VAROVÁNÍ!

Výrobek nesmí být žádným způsobem upravován jinak dojde ke ztrátě záruky!



VAROVÁNÍ!

Překročením maximální hmotnosti uživatele dojde ke ztrátě záruky. Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nedodržením maximální hmotnosti uživatele.



VAROVÁNÍ!

Než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

- a. Stolička je určena pro použití na plochem, rovném povrchu.
- b. Používání stoličky na povrchu, který neposkytuje pevnou oporu, tj. nerovném (se sklonem větším než 5 %), může vést k převrácení a zranění.
- c. Stání na stoličce není dovoleno.
- d. Pozor, povrchová teplota textilních komponentů a komponentů rámu se může při vystavení slunci nebo jinému zdroji tepla zvýšit, přičemž při nízkých teplotách hrozí velmi výrazné prochladnutí kovových částí výrobku. To může způsobit popáleniny nebo omrzliny částí těla.
- e. Nepoužívejte stoličku, pokud si všimnete jakéhokoli viditelného nebo hmatatelného poškození (např. prasklý rám), protože může dojít k nehodě.



VAROVÁNÍ!

Maximální hmotnost uživatele 100 kg

Technické parametry

Maximální hmotnost uživatele	100 kg
Výška stoličky	360-540 mm
Šířka stoličky	400 mm
Průměr sedadla	320 mm
Hmotnost stoličky	1,5 kg
Složení	Hliník, polypropylen, PVC
Popis prostředí, ve kterém bude produkt používán	  
Teplota skladování a použití	Od +5°C do +40°C
Vlhkost vzduchu pro skladování a použití	od 30% do 70 %
Potřebné nářadí pro montáž	Křížový šroubovák, plochý klíč 10 mm

Péče a údržba

Čištění

- Rám stoličky čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky (může poškodit ochranné povrchy).
- Plastové díly čistěte jemnými čisticími prostředky.
- Pro zachování provozních parametrů výrobku je nesmírně důležité udržovat všechny jeho prvky čisté.
- Nevystavujte výrobek extrémním povětrnostním podmínkám (déšť, sníh, velmi silné slunce), protože některé prvky mohou změnit barvu.
- Po použití výrobek důkladně osušte, abyste prodloužili jeho předpokládanou životnost.

Nepoužívejte:

- rozpouštědla
- prostředky na čištění toalet
- ostré kartáče a tvrdé předměty
- prostředky obsahující chlór
- žíravé čisticí prostředky

Výrobek nečistěte tlakovým nebo parním čističem!

Dezinfekce

Pokud produkt používá více lidí (např. v pečovatelském domě), měly by být použity komerčně dostupné dezinfekční prostředky. Před dezinfekcí vyčistěte povrchové prvky. K dezinfekci lze používat pouze testované a schválené dezinfekční prostředky.

Informace o uznávaných a schválených dezinfekčních prostředcích a metodách dezinfekce můžete získat od svého národního zdravotnického úřadu.



VAROVÁNÍ!

Při použití dezinfekčních prostředků může dojít k poškození vnějších povrchů, což může omezit dlouhodobou funkčnost výrobku. Přitom je třeba dodržovat návod k použití od výrobce.

Opětovné použití (opakovaně použitelný produkt)

Produkt je opakovaně použitelný. Počet opakovaných použití závisí na tom, jak často a jak je produkt používán. Před opětovným použitím produkt důkladně vyčistěte a vydezinfikujte a zkontrolujte jeho bezpečnostní prvky. V případě potřeby proveďte nápravná opatření.

Servis a opravy

Pokud je nutná oprava nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu, kontaktujte svého distributora.

Životnost výrobku

Předpokládaná životnost zdravotnického prostředku je 4 roky za předpokladu jeho používání k určenému účelu a provádění veškerých udržovacích a servisních prací. Životnost zdravotnického prostředku závisí také na frekvenci jeho používání, prostředí, ve kterém se používá, a péči o něj. Použitím náhradních dílů lze prodloužit životnost výrobku. Náhradní díly jsou obvykle k dispozici po dobu 5 let poté, co byl model ukončen. Výše očekávaná životnost zdravotnického prostředku nepředstavuje dodatečnou záruku.

Likvidace produktu

Produkt musí být zlikvidován v souladu s platnými místními a národními předpisy. Informace o správné likvidaci obalů, kovových konstrukčních dílů, plastových dílů, neoprenu, silikonu a polyuretanových materiálů vám poskytne místní společnost zabývající se likvidací odpadu nebo autorizovaný distributor.

Symbols

	Zdravotnický prostředek
	Datum výroby (vytištěno na produktu)
	Producent (výrobce)
	Distributor
	Conformité Européene (shoda s požadavky EU)
	Katalogové číslo (pro doobjednání)
	Sériové číslo
	Číslo série/šarže
	Jedinečný identifikační kód
	Viz návod k použití
	Varování
	Riziko sevření prstů
	Přípustná teplota
	Chraňte před vlhkostí.

	Pro použití v interiéru
	Chraňte před slunečním zářením
	Výrobek je určen pro přepravu autem.
	Maximální hmotnost uživatele

Kontaktní údaje



Výrobce

mdh Sp. z o.o.

Adres: ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, Polska

tel. +48 42 674 83 84, fax. +48 42 636 52 21

www.mdh.pl

www.viteacare.com



Vyhrazujeme si právo na technické změny v důsledku technického pokroku.