



DERBY® BASKETWEAVE COMMODE CHAIR

Vítáme vás u vašeho nového výrobku Gordon Ellis.

Doufáme, že se pro vás stane užitečnou pomůckou v každodenním životě.



CS JAKÁKOLI ZÁVAŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, MUSÍ BÝT NAHLÁŠENA AUTORIZOVANÉMU ZÁSTUPCI (ZÁKAZNÍCI V EU) NEBO VÝROBCI (ZÁKAZNÍCI VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ A MIMO EU). KONTAKTNÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY NA DRUHÉ STRANĚ.




POKYNY NAJDETE NA DRUHÉ STRANĚ



MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE

Vaše komodová židle DERBY BASKETWEAVE byla speciálně vyvinuta naším designérským týmem ve Spojeném království s cílem kompenzovat zranění nebo pomoci překonat dočasné či trvalé zdravotní omezení. Jejím účelem je usnadnit každodenní činnosti.

i DERBY BASKETWEAVE COMMODE CHAIR 5504/OA

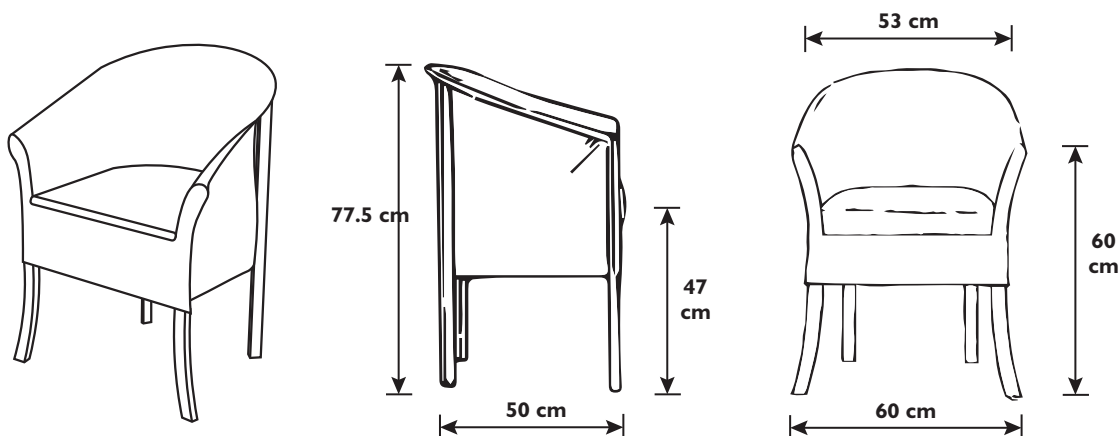

GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT

EC REP

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR,
TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA



MD

IFU-REF 5504/OA/0124-1

PART REF 5504/OA

PROHLÉDNĚTE SI CELOU NABÍDKU ONLINE NA
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK




gordonellis.healthcare

@EllisHealthcare



NÁVOD K POUŽITÍ

-  **CS** PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE STABILITU. JE ODPOVĚDNOSTÍ UŽIVATELE / VLASTNÍKA PROVÁDĚT POČÁTEČNÍ A PRAVIDELNÁ POSOUZENÍ RIZIK. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE UTAŽENÍ VŠECH SPOJOVACÍCH PRVKŮ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE SEŘÍDTE. PŘED VYJMUTÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE RUKOJEŤ NÁDOBY VE SVISLÉ POLOZE, ABY BYLO VÍKO ZAJIŠTĚNO.

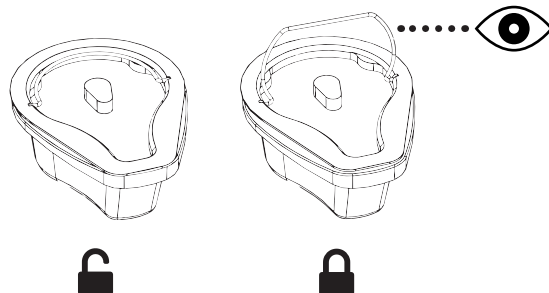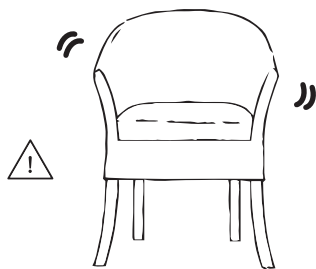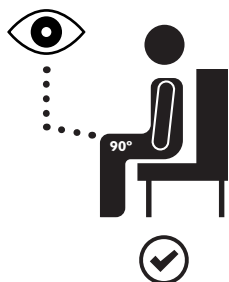

- CS** TRADIČNÍ ŽIDLE S DŘEVĚNÝM RÁMEM VE STYLU LLOYD LOOM, VYBAVENÁ SKRYTOU UZAMKATELNOU KOMODOVOU NÁDOBOU A VYSOKÝMI BOČNICEMI PRO OPORU A SOUKROMÍ.

1. ODSTRANĚTE POLŠTÁŘ A UJISTĚTE SE, ŽE JE NÁDOBA SPRÁVNĚ UMÍSTĚNA V KAZETĚ.
2. Nasaďte víko nádoby a pomocí kovové rukojeti přeneste obsah na místo určené k likvidaci.
3. PO KAŽDÉM POUŽITÍ OČISTĚTE SEDACÍ PLOCHU A NÁDOBU NEABRAZIVNÍM ČISTICÍM PROSTŘEDKEM A DEZINFEKČÍ.



POKYNY K ČIŠTĚNÍ

OTÍREJTE NEABRAZIVNÍM HADŘÍKEM A MÝDLOVOU VODOU.

PH 5 - 9

„Tento dokument je českým překladem schváleného návodu k použití výrobce. Obsah je shodný.“

PROHLÉDNĚTE SI CELOU NABÍDKU ONLINE NA
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

 [gordonellis.healthcare](https://www.gordonellis.healthcare)

 [@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)

UK
CA 