

PODMÍNKY UŽITÍ

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)	Identifikační štítek / Typ výrobku (vypsat): Identifikačný štítok / Typ výrobku (vypísať): :
Výstupní kontrola: Výstupná kontrola:	
Jméno: Meno	
Podpis: Podpis:	

Podmínky užití:

- Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
- Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
- Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
- Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
- Reklamacie musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
- Při uplatnění reklamace musí uživatel nepochybně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
- Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
- Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
- Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
- Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.
- Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměřovat s užitou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat

Datum prodeje (den, měsíc, rok):
 Dátum predaja (deň, mesiac, rok):

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:
 Meno (paličkami), telefón, razítko a podpis predávajúceho:

_____ . _____ . _____

Podmienky použitia:

- Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktoré sa vyskytne u spotrebného tovaru počas 24 mesiacov od prevzatia.
- Výrobek musí byť použitý výlučne na účely, na ktoré sa má určiť a používateľ musí riadiť pokyny uvedené v návode na použitie. Za škody vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania v rozpore s "Návodom na použitie" výrobca neodpovedá.
- Výrobok musí byť riadne používaný, ošetrovaný, udržiavaný a skladovaný podľa pokynov uvedených v návode na použitie.
- Každú vzniknutú chybu je potrebné ihneď po jej zistení opraviť. Za chyby vzniknuté následkom ďalšieho používania výrobku, bez toho, aby boli pôvodné chyby opravené, nesie plnú zodpovednosť používateľ.
- Reklamácie musí byť uplatnená u predajcu (vrátane predajcov cez internet alebo alternatívnych), kde bol produkt zakúpený. Uplatnenie reklamácie sa riadi príslušnými odsekmi Občanského a iných zákonov ČR.
- Pri uplatnení reklamácie musí používateľ nepochybne preukázať, že u predajcu tovaru / výrobku zakúpil. Na zabezpečenie vyriešenia reklamácie sa odporúča predložiť doklad o zakúpení výrobku a vyplnený posledný zoznam návodu na použitie s výrobným číslom reklamovaného tovaru.
- Výrobca zabezpečuje výrobok identifikačným štítkom. Ak sú údaje na identifikačnom štítku nečitateľné alebo ak neexistuje úplne, môže byť používateľ vyzvaný na doloženie totožnosti reklamovaného tovaru.
- Reklamný postup môže byť zahájený, ak je reklamovaný tovar zaslaný opatrne zabalené a zaistené proti poškodeniu. Veľmi vhodné je tovar zaslaný v originálnom obale. Za poškodenie reklamovaného tovaru, ktoré vzniklo pri jeho zaslání, výrobca nezodpovedá. Majiteľ je povinný predložiť reklamované výrobky čisté a hygienicky nezávadné, podľa všeobecných hygienických zásad. Majiteľ nemôže pri žiadosti požadovať, aby v priebehu reklamácie riadenia vykonali základnú údržbu alebo čistenie výrobku.
- Uplatnenie práva z vady sa nevztahuje na opotrebenie vecí spôsobené jej obvyklým používaním, najmä na znečistenie, opotrebenie, či poškodenie potahu, plastových dielov, opotrebenie brzd, opotrebenie dezénu či defektu pneumatík. Uplatnenie práva z vady tiež stráca platnosť, ak boli závady spôsobené nedovoleným preťažovaním, nehodou, mechanickým poškodením, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku či neodborným zaobchádzaním s ním.
- Technické riešenie podvozku nezaručuje ideálne vedenie stopy, preto táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie.
- Dobu uplatnenia práva z vady nemožno zamieňovať s užitou dobou, tj. dobou po ktorej sa pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby, môžu tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, účel a rozdielnosť v konštrukcii správne používať



Návod k použití (CZ)

Návod k použitiu..... (SK)

Toaletní židle Toaletná stolička



Distributor v ČR:

PATRON Bohemia a.s.
 Českolipská 3419
 CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
 tel.: +420-315 630 111
 fax.: +420-315 630 199
 reha.cz@patron.eu
 www.patron.eu

Výrobce:

Drive Medical GmbH & Co. KG
 Leutkircher StraÙe 44
 88316 Isny/Allgäu



Toaletní židle

Popis

1. Jedná se o výškově nastavitelnou toaletní židli s odklopným sedátkem. Opěrky rukou pevné.
2. Je vhodná jak do domácností, tak i do ústavů a nemocnic.
3. Má velmi snadnou údržbu.
4. Konstrukce toaletní židle TS 130 je z ocelových tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou, s vyměkčeným odklopným toaletním sedátkem a toaletní plastovou nádobou s víkem, která je vyjímatelná svrchu. Opatřena je ještě měkkou sedací deskou.
5. Povrchová úprava - epoxidovaný práškový lak.
6. Židle se skládá z ocelové kostry lakované s držáky pro toaletní nádobu, z měkké polstrované sedací desky, toaletní nádoby s víkem a držákem, výškovým nastavením sedu a odnímatelné krycí čalouněné desky.

Použití

1. Toaletní nádobu vyjmete, odejmete-li krycí čalouněnou sedací desku, odklopíte čalouněné sedátko a poté toaletní nádobu vyjmete z držáků směrem nahoru. Při nasazení zasuňte plastovou nádobu do držáků v konstrukci. Sklopte čalouněné sedátko a přiklopte sedací čalouněnou desku. .
2. Pro výškové nastavení vytáhněte aretační pojistku opěrné nohy. Zvolte vysunutím nebo zasunutím opěrné nohy polohu a zasuňte aretační pojistku. POZOR! Po úpravě výšky hole musí být pojistný kolík řádně zaretován.

Bezpečnost a ochrana

1. Při použití a manipulaci toaletní židle neohrožujte uživatele, Vás ani ostatní.
2. Toaletní židli uložte na suché a bezpečné místo. Neponechávejte toaletní židli v blízkosti tepelného zdroje
3. Uživatele toaletní židle nikdy nenechte bez dozoru.
4. Uživatele toaletní židle nenechte vstávat a sedat bez asistence druhé osoby.

Údržba

1. Toaletní židli omývejte teplou vodou s jarem a osušte.

Technické údaje	
Celková délka	50/55 cm
Celková šířka	58/62 cm
Celková výška	84-98 cm
Šířka sedačky	43 cm
Vzdálenost sedací roviny od země	50-64 cm
Hmotnost	8,5 kg
Nosnost	130 kg

Toaletná stolička

Popis

1. Jedná sa o výškovo nastaviteľnú toaletnú stoličku s odklopným sedadlom. Opierky rúk pevné.
2. Je vhodná ako do domácností, tak aj do ústavov a nemocníc.
3. Má veľmi jednoduchú údržbu.
4. Konštrukcia toaletnej stoličky TS 130 je z ocelových tenkostenných trubiek s povrchovou úpravou, s vymäkčeným odklopným toaletným sedadlom a toaletnou plastovou nádobou s víkom, ktoré je vyberateľné zvrchu. Opatrená je ešte mäkkou sedacou doskou.
5. Povrchová úprava - epoxidovaný práškový lak.
6. Stolička sa skladá z ocelevej kostry lakovanej s držiakmi pre toaletnú nádobu, z mäkkej polstrovanej sedacej dosky, toaletnej nádoby s víkom a držiakom, výškovým nastavením sedu a odnímateľnou krycou čalúnenou doskou.

Použitie

1. Toaletnú nádobu vyberiete, odoberiete ak kryciu čalúnenú sedáciu dosku odklopíte čalúnené sedadlo a potom toaletnú nádobu vyberiete z držiakov smerom nahor. Pri nasadení zasuňte plastovú nádobu do držiakov v konštrukcii. Sklopte čalúnené sedadlo a priklopte sedáciu čalúnenú dosku.
2. Pre výškové nastavenie vytiahnite aretačnú poistku opornej nohy. Vyberte vysunutím alebo zasunutím opornej nohy polohu a zasuňte aretačnú poistku. POZOR! Po úprave výšky palice musí byť poistný kolík riadne zaaretovan.

Bezpečnosť a ochrana

1. Pri použití a manipulácii toaletnej stoličky neohrožujte užívateľa, Vás ani ostatných.
2. Toaletnú stoličku uložte na suché a bezpečné miesto. Neponechávajúte toaletnú stoličku v blízkosti tepelného zdroja.
3. Užívateľa toaletnej stoličky nikdy nenechajte bez dozoru.
4. Užívateľa toaletnej stoličky nenechajte vstávať a sadáť bez asistencie druhej osoby.

Údržba

1. Toaletná stoličku umývajte teplou vodou s jarou a osušte.

Technické údaje	
Celková dĺžka	50/55 cm
Celková šírka	58/62 cm
Celková výška	84-98 cm
Šírka sedačky	43 cm
Vzdialenosť sedacej roviny od zeme	50-64 cm
Hmotnosť	8,5 kg
Nosnosť	130 kg