
Stolička do sprchy

Katalogové číslo: VCTP0011

Návod k použití

Vydání: EJ 09.2024





Ľudia so zrakovým postihnutím môžu nájsť súbory PDF a ďalšie informácie o našich produktoch na našej webovej stránke:

<www.viteacare.com>.

👉 V prípade potreby sa obráťte na svojho odborného predajcu.

Zrakovo postihnutý používateľ môže tiež požiadať sprevádzajúcu osobu, aby si prečítala pokyny.

Obsah

Úvod	4
Indikace.....	5
Kontraindikace	5
Popis produktu	5
Použití	6
Montáž / Demontáž	6
Technické parametry	7
Péče a údržba	7
Čištění.....	7
Dezinfekce	8
Opětovné použití (opakovaně použitelný produkt)	8
Servis a opravy	8
Životnost produktu.....	8
Likvidace produktu.....	9
Symboly	9

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Jsme přesvědčeni, že splní vaše očekávání. Před prvním použitím si přečtěte tento návod k použití. Tato příručka poskytuje nezbytné informace týkající se bezpečného používání produktu. Dodržování doporučení výrazně přispěje k prodloužení životnosti a k zachování estetiky výrobku. Rádi bychom upozornili, že se neustále snažíme zlepšovat kvalitu našich výrobků, což může mít za následek drobné změny, které nejsou obsaženy v návodu. Ujistěte se, že jste vyplnili a přiložili dokument „záruční list“ svému distributorovi, abyste zajistili nejlepší možný servis.

POZOR

Vždy dodržujte základní opatření uvedená níže pro bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.



VAROVÁNÍ!

Nesprávné použití může způsobit smrt, vážné zranění, vyvolat nebezpečné podmínky nebo poruchu výrobku.



POZOR!

Nesprávné použití může způsobit zranění osob a/nebo poškození produktu.



DOPORUČENÍ

Chcete-li svůj produkt udržet v dobrém funkčním stavu, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Pokud výrobek používá jiná osoba, poskytněte jí prosím kopii tohoto návodu k použití.

Tento návod k použití odráží design a specifikace produktu v době vydání. Kvůli změnám designu nemusí některé ilustrace a fotografie v návodu odpovídat zakoupenému produktu. Vyhraujeme si právo na změny designu. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za zranění osob nebo škody na majetku, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného nebo nebezpečného použití tohoto produktu.

Indikace


Použití k hygienickým procedurám ve vaně nebo sprše v případech výrazného omezení pohybu pacienta, celkově špatného stavu pacienta, pokročilého věku. Pro použití pacienty, kteří nemohou sami provádět hygienické činnosti a procedury. Stolička poskytuje pacientovi stabilní polohu a chrání před rizikem pádu. Ochrana před infekcí nebo zvlhčením ran během hygienických procedur. Stoličku lze používat v nemocničních i domácích podmínkách.

Kontraindikace

Kontraindikace polohy vsedě, nedostatečná stabilizace trupu. Pacienti s poruchami koordinace, rovnováhy nebo mentálním postižením by neměli být ponecháni bez dozoru.

Popis produktu

Stolička do sprchy je lehké konstrukce vyrobené z na dotek teplého polyuretanu a hliníku. Nohy stoličky s regulovatelnou výškou zajišťují stabilní oporu a umožňují asymetrickou polohu stoličky. Na sedáku stoličky jsou umístěny další otvory, které umožňují pacientovi držet se stoličky pro lepší rovnováhu.

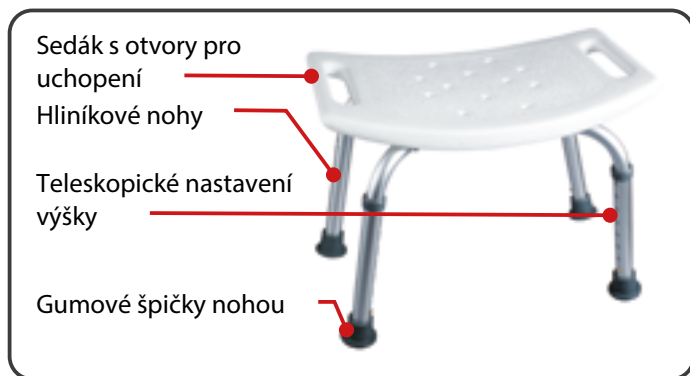


Obrázek 1. Prvky stoličky.

Výrobek používejte v originálním balení, rozložený. Musí být smontován podle popisu níže.

Montáž / Demontáž

Pro složení stoličky zasuněte nastavitelné nohy do profilů spojených se sedátkem. Chcete-li nohy demontovat, stiskněte tlačítko nastavení výšky a vysuňte je z profilů. Chcete-li získat přístup k sedadlu, můžete odšroubovat a demontovat rám sedadla pomocí křížového šroubováku.

Potřebné nástroje: křížový šroubovák.

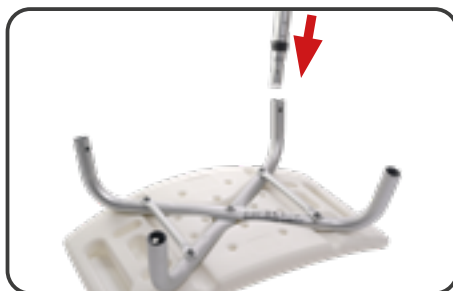

Obrázek 2. Připevnění nohou k sedadlu.

Bezpečnost použití



VAROVÁNÍ!

Jakýkoli „závažný incident“ týkající se prostředku musí být oznámen výrobci a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel bydliště.



POZOR!

Výrobek je určen pro handicapované osoby s onemocněním pohybového aparátu. Pokud si nejste jisti, zda vám váš zdravotní stav dovoluje produkt používat, poraďte se ze zdravotníkem.



VAROVÁNÍ!

Výrobek nesmí být žádným způsobem upravován, jinak dojde k ztrátě záruky!



VAROVÁNÍ!

Překročením maximální hmotnosti uživatele dojde ke ztrátě záruky! Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nedodržením maximální hmotnosti uživatele.



VAROVÁNÍ!

Než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

- Stolička je určena pro použití na plochem, rovném povrchu.
- Používání stoličky na povrchu, který neposkytuje pevnou oporu, tj. nerovném (se sklonem větším než 5 %), může vést k převrácení a zranění.
- Stání na stoličce není dovoleno.

d. Pozor, povrchová teplota textilních komponentů a komponentů rámu se může při vystavení slunci nebo jinému zdroji tepla zvýšit, přičemž při nízkých teplotách hrozí velmi výrazné prochladnutí kovových částí výrobku. To může způsobit popáleniny nebo omrzliny částí těla.

e. Nepoužívejte stoličku, pokud si všimnete jakéhokoli viditelného nebo hmatatelného poškození (např. prasklý rám), protože může dojít k nehodě.



VAROVÁNÍ!

Maximální hmotnost uživatele 100 kg

Technické parametry

Maximální hmotnost uživatele	100 kg
Výška stoličky	350-540 mm
Šířka stoličky	490 mm
Hmotnost stoličky	1,8 kg
Složení	Hliník, polypropylen, PVC
Popis prostředí, ve kterém bude produkt používán	  
Teplota skladování a použití	Od +5°C do +40°C
Vlhkost vzduchu pro skladování a použití	od 30% do 70 %
Potřebné nářadí pro montáž	Phillips šroubovák

Péče a údržba

Čištění

- Rám stoličky čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky (můžou poškodit ochranné povrchy).
- Plastové díly čistěte jemnými čisticími prostředky.
- Pro zachování provozních parametrů výrobku je nesmírně důležité udržovat všechny jeho součásti čisté.
- Nevystavujte výrobek extrémním povětrnostním podmínkám (děšť, sníh, velmi silné slunce), protože některé prvky mohou změnit barvu.
- Po použití výrobek důkladně osušte, abyste prodloužili jeho předpokládanou životnost.

Nepoužívejte:

- rozpouštědla
- prostředky na čištění toalet
- ostré kartáče a tvrdé předměty
- prostředky obsahující chlór
- žíravé čisticí prostředky

Výrobek nečistěte tlakovým nebo parním čističem!

Dezinfekce

Pokud produkt používá více lidí (např. v pečovatelském domě), měly by být použity komerčně dostupné dezinfekční prostředky. Před dezinfekcí vyčistěte povrchové prvky. K dezinfekci lze používat pouze testované a schválené dezinfekční prostředky. Informace o uznávaných a schválených dezinfekčních prostředcích a metodách dezinfekce můžete získat od svého národního zdravotnického úřadu.



VAROVÁNÍ!

Při použití dezinfekčních prostředků může dojít k poškození vnějších povrchů, což může omezit dlouhodobou funkčnost výrobku. Je nezbytné dodržovat návod k použití od výrobce.

Opětovné použití (opakovaně použitelný produkt)

Produkt je opakovaně použitelný. Počet opakovaných použití závisí na tom, jak často a jak je produkt používán. Před opětovným použitím produkt důkladně vyčistěte a vydezinfikujte a zkontrolujte jeho bezpečnostní prvky. V případě potřeby proveďte nápravná opatření.

Servis a opravy

Pokud je nutná oprava nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu, kontaktujte svého distributora.

Životnost výrobku

Předpokládaná životnost zdravotnického prostředku je 4 roky za předpokladu jeho používání k určenému účelu a provádění veškerých údržbových a servisních prací. Životnost zdravotnického prostředku závisí také na frekvenci jeho používání, prostředí, ve kterém se používá, a péči o něj. Použitím náhradních dílů lze prodloužit životnost výrobku. Náhradní díly jsou obvykle k dispozici po dobu 5 let poté, co byl model ukončen. Delší očekávaná životnost zdravotnického prostředku nepředstavuje dodatečnou záruku.

Likvidace produktu

Produkt musí být zlikvidován v souladu s platnými místními a národními předpisy. Informace o správné likvidaci obalů, kovových konstrukčních dílů, plastových dílů, neoprenu, silikonu a polyuretanových materiálů vám poskytne místní společnost zabývající se likvidací odpadu nebo autorizovaný distributor.

Symbols

	Zdravotnický prostředek
	Datum výroby (vytištěno na produktu)
	Producent (výrobce)
	Distributor
	Conformité Européene (shoda s požadavky EU)
	Katalogové číslo (pro doobjednání)
	Sériové číslo
	Číslo série/šarže
	Jedinečný identifikační kód
	Viz návod k použití
	Varování

	Riziko odříznutí prstů
	Přípustná teplota
	Chraňte před vlhkostí.
	Pro vnitřní použití
	Chraňte před slunečním zářením
	Výrobek je určen pro přepravu autem.
	Maximální hmotnost uživatele

Kontaktní údaje



Výrobce

mdh Sp. z o.o.

Adres: ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, Polska

tel. +48 42 674 83 84, fax. +48 42 636 52 21

www.mdh.pl

www.viteacare.com



Vyhrazujeme si právo na technické změny v důsledku technického pokroku.