

Návod k použití – verze 4 (2025 revize)**REF: 3310****Produkt: Dětská toaletní židle****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Celková hloubka:	54 cm
Celková šířka:	46 cm
Celková výška:	61–76 cm
Hloubka sedáku:	38 cm
Šířka sedáku:	32 cm
Šířka mezi područkami:	38 cm
Výška sedáku:	28–35 cm
Hmotnost výrobku:	5,5 kg
Nosnost:	100 kg

POPIS

Zdravotnický prostředek, bezpečnostní třídy I., stacionární toaletní židle s výklopným plastovým sedátkem umístěným nad vyjímatelnou toaletní nádobou s víkem. Výška nohou je nastavitelná pro přizpůsobení potřebám uživatele.

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek je určen k použití jako přenosná toaletní židle s vyjímatelnou toaletní nádobou.

NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte výrobek na vhodné a stabilní místo.

Přistupte k toaletní židli, otočte se zády a nahmatejte zadní vodorovnou opěrnou tyč nohama.

Položte obě ruce na područky a pomalu se posaďte.

Po každém použití vyčistěte toaletní nádobu jemným čisticím nebo dezinfekčním prostředkem.

NASTAVENÍ

Nastavte výšku výrobku na pohodlnou úroveň.

Stiskněte pružinové tlačítko na každé noze a posuňte teleskopickou část do požadované výšky.

Hrudní popruh poskytuje v případě potřeby dodatečnou oporu a lze jej snadno nastavit pomocí přezky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že všechny nohy jsou nastaveny do stejné výšky.

Zkontrolujte, že pružinová tlačítka jsou správně zajištěna.

Nikdy nepoužívejte výrobek na nerovném nebo šikmém povrchu.

Uživatel nesmí být ponechán bez dozoru.

Nikdy nestoupejte na výrobek.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití očistěte výrobek hadříkem a jemným čisticím nebo dezinfekčním prostředkem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE

Rám výrobku je dodáván s 12měsíční zárukou a má předpokládanou životnost 5 let.

Životnost může být prodloužena správným používáním a údržbou.

Po skončení životnosti kontaktujte dodavatele nebo výrobce ohledně likvidace nebo recyklace.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku, musí být neprodleně nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu.



Roma Medical Aids Ltd.
York Road, Bridgend Industrial
Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
website: www.romamedical.co.uk
e-mail: sales@romamedical.co.uk
tel: +44 1656 674488
fax: +44 1656 674499



DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
website: www.dmapraha.cz
e-mail: info@dmapraha.cz



StartDock Rotterdam B.V.,
Westplein 12-14, 3016 BM,
Rotterdam, The Netherlands

POZNÁMKY