



BA-Nr.: 02.07.132/2021-11-A01

ORTOSERVIS
s námi zůstanete v pohybu



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telephone: +49 (0) 5431/9416-
Fax: +49 (0) 5431/9416-66
Web: www.rebotec.de
Email: info@rebotec.de



Návod k použití

Sprchovací a toaletní vozíky - velká kola

	Genf	Miami
REF	346.XX.YY	345.XX.YY
	130 kg	150 kg

XX= Kód barvy, YY= Varianty výbavy



Ilustrační obrázek



Přečtěte si tento návod k použití **před prvním použitím výrobku** a mějte jej po ruce pro případné budoucí použití. Při následném prodeji jej také předložte kupujícímu.

Obsah

Sprchovací a toaletní vozík – s velkými koly

1 Popis výrobku..... 3

1.1 Úvod

2 Funkce

2.1 Zamýšlené použití

2.2 Podmínky použití

3 Skladování & přeprava..... 4

3.1 Výbava & funkce

3.2 Balení

3.3 Likvidace

4 Symboly & štítky

5 Bezpečnostní pokyny

6 Hlášení incidentů..... 5

7 Záruka

7.1 Reklamace..... 5

8 Opětovné použití, životnost...6

9 Rozsah dodávky

10 Nastavení pro použití..... 6

10.1 Sklopení stupaček

10.2 Nastavení výšky stupačky

10.3 Sestavení opěrky zad..... 6

10.4 Montáž 24" kol

10.5 Nastavení parkovacích brzd

11 Údaje o výrobku..... 7

12 Použití výrobku

12.1 Posazení..... 7

12.2 Vstávání

12.3 Parkovací brzdy, kola 24"..... 8

12.4 Odklopení područek

12.5 Odejmutí stupaček..... 8

12.6 Odejmutí sprchov./toalet.sedáku 8

12.7 Manipulace s toaletní nádobou.....8

12.8 Funkce parkovacích brzd, kola 24"... 8

12.9 Ochrana proti překlopení a pádu..... 9

13 Řešení problémů

14 Péče a údržba


14.1 Čištění a péče

14.2 Údržba

15 Náhradní díly & příslušenství ... 10

16 Nákres & rozměry

1 Popis výrobku

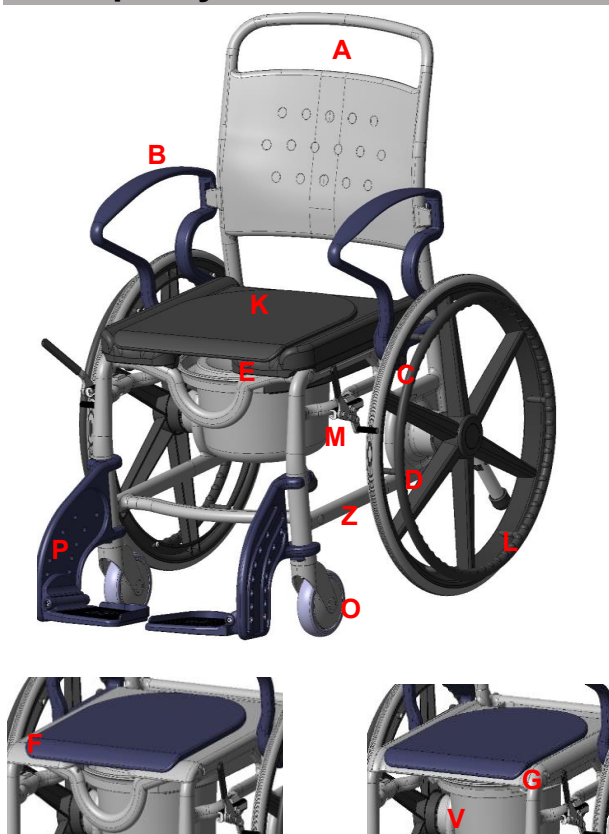

Popis obrázku:

A	Zádová opěrka
B	Područky (odklapitelné)
C	Aretační kolíky
D	Rám vozíku
E	PUR sedák, hygienický otvor
F	Sprchovací sedák
G	Sedák (sklopný)
K	PUR kryt (odnímatelný)
L	Kola 24"
M	Parkovací brzda
O	Kola 5", nebzděná
P	Stupačka s nášlapnou plochou (nastavitelná)
V	Toaletní nádoba s víkem
Z	Typový štítek

1.1 Úvod

- Zde popsaný výrobek je zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle (EU) 2017/745 MDR.
- V tomto návodu k použití naleznete informace o bezpečné a správné instalaci, o používání, provozu, údržbě a péči o tento výrobek.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod k použití. Dbejte zejména bezpečnostních pokynů a postupujte podle nich.

2 Funkce

2.1 Zamýšlené použití

Genf, Miami

- Výrobek je určen pro péči o pacienty s omezenou schopností stát a/nebo chodit. Umožňuje sprchování vsedě a použití toalety, i když je běžná toaleta nebo koupelna mimo dosah. Pokud je běžná toaleta vhodně navržena, lze na ni vozík nasunout. Pacient musí být schopen sedu a mít dostatečné osvalení horní části těla. Je-li to nutné, musí být při použití přítomna zdravotní sestra. Výrobek není určen k dlouhodobému sezení a přesunům.

Specifikace - Genf:

- Maximální hmotnost uživatele: 130 kg
- Výškově stavitelné stupačky
- Vozík s velkými koly, zadní kola s brzdou
- Pro použití v interiéru

Specifikace - Miami:

- Maximální hmotnost uživatele: 150 kg
- Výškově stavitelné stupačky
- Vozík s velkými koly, zadní kola s brzdou
- Pro použití v interiéru

Indikace

- Zdravotní stav pacienta:
- O použití vozíku pacienty s kognitivními poruchami (snížené mentální, fyzické, smyslové nebo intelektové schopnosti) musí předem rozhodnout lékař (při předepsání výrobku) nebo ošetřující personál.

2.2 Podmínky použití

- Teplotní rozsah: 5°C až 35°C; je třeba zabránit přímému působení tepla na výrobek.
- Relativní vlhkost: 40% - 75%. Mimo tyto podmínky smí být výrobek používán pouze krátkodobě.
- Tento výrobek se nesmí používat k přepravě těžkých předmětů.
- Vozík není vhodný pro dlouhodobé sezení.
- Pro umístění vozíku musí být dostatečně velký rovný povrch. Viz 16.
- Vozík lze nasunout nad běžnou toaletu. Viz bod 16.
- Použití doma i v lůžkových zařízeních.

3 Skladování & přeprava

- Teplotní rozsah: 5°C až 25°C; je třeba zabránit přímému působení tepla na výrobek.
- Výrobek skladujte v suchých místnostech s vlhkostí do 65 %.
- Sprcha by měla být navržena tak, aby zde byla dostatečně velká rovná plocha.

3.1 Výbava & funkce

- Vozík se skládá z plastového rámu s trubkovou vložkou. Vozík pro samostatný pohyb má vpředu dvě 5" otočná kola a vzadu dvě 24" kola s obručemi pro ruční pohon a parkovací brzdou.
- Područky lze částečně odklopit. Stupačky jsou výškově nastavitelné a lze je sejmut nebo sklopit.
- Sedák je vybaven hygienickým otvorem, pod něj lze vložit toaletní nádobu s víkem.


3.2 Balení

- Doporučujeme uschovat obal pro pozdější přepravu.
- Rozměry: 740mm x 640mm x 640mm

3.3 Likvidace

- Likvidace a recyklace použitých výrobků a obalů musí být prováděna v souladu s aktuálně platnými předpisy. Další informace vám poskytne společnost zabývající se likvidací odpadu.
- Dodržujte pokyny k ochraně před infekcemi.
- Věnujte prosím pozornost všem štítkům a informacím na obalu a jednejte podle nich.

4 Symboly & štítky

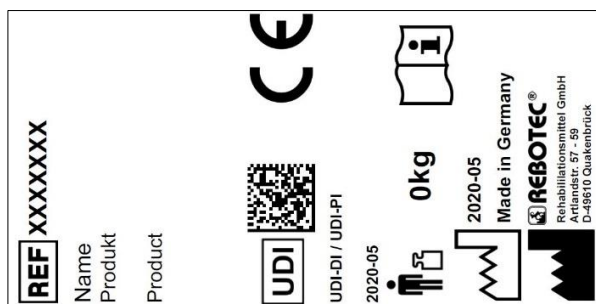

Ilustrační obrázek.



Štítek nesmí být odstraněn!

Pro objednání náhradních dílů a vyřízení reklamací bude vyžadován název výrobku, výrobní číslo a rok výroby.

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Přečtěte si návod k použití		Rok výroby
SN	Výrobní číslo		Důležité informace!
REF	Číslo výrobku		Maximální hmotnost uživatele v kg
	Pokyny pro péči		Pokyny pro údržbu
	Pouze pro použití v interiéru		Výrobce
	Vizuální signál	EN	Jazyk
	Přečtěte si návod k použití		Nelikvidujte s komunálním odpadem
CE	Výrobek je v souladu s (EU) 2017/745 MDR		
	Pozor! Dodržujte bezpečnostní pokyny		
UDI	Jedinečná identifikace zařízení (Údaje: GTIN / LOT (SN) / rok výroby)		
MD	Štítek zdravotnického prostředku Výrobek je zdravotnický prostředek.		

5 Bezpečnostní pokyny



Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny:

- Před prvním použitím výrobku je nutné si přečíst celý návod k použití, aby se předešlo nebezpečí nebo škodám způsobeným nesprávnou obsluhou.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek, zda není viditelně poškozený nebo neúplný.
- V případě poruchy nebo poškození jakéhokoli druhu se výrobek nesmí používat.

Pozor: Nebezpečí pádu!

- Pokud je vozík používán pacientem musí být vždy zajištěné područky.
- Posazení, vstávání a přemístění pacienta by mělo být prováděno pod dohledem nebo s pomocí vyškoleného ošetřovatele v závislosti na zdravotním stavu pacienta.

- Pacienti, kteří jsou náchylní k nekontrolovaným akcím nebo pohybům, musí být při používání vozíku pod dohledem.
- Vozík smí být přemísťován ve svahu **pouze** s pomocí pečovatele. Obecně platí, že do svahu by měl být vozík tlačěn dopředu a ze svahu by měl být tažen pozadu.

Pozor: Nebezpečí uklouznutí!

- Před použitím zkontrolujte, zda je sedák pevně upevněn (zajištěn) v rámu.
- Před použitím vozíku vždy zajistěte parkovací brzdy velkých kol, aby se vozík nemohl samovolně rozjet.
- Při usedání nesedejte na přední hraně sedáku ani PUR sedáku; uživatel by měl využít celou sedací plochu.

Pozor: Nebezpečí převrácení!

- Vozík je možné tlačít pouze za madlo (zádová opěrka).
- Před usednutím a před vstáváním musí být stupačky sklopeny dolů nebo vyklopeny nahoru. Nestoupejte na stupačky!
- **Nejezděte** s vozíkem přes prahy dveří, hrany ani jiné nerovné povrchy.
- Výrobek používejte **pouze** v interiéru a na rovných, neklouzavých površích.
- Vozík tlačte **pouze** mírným tempem chůze (s pacienty i bez nich).
- Nevyklánějte se z vozíku (jak v klidu, tak za pohybu). Pokud jsou otočná kolečka v nepříznivé poloze (směřují dovnitř), je stabilita židle omezena.

Pozor: Nebezpečí poškození!

- Výrobek je vhodný **pouze** pro zamýšlené použití. (viz kapitola 2). Dodržujte povolenou hmotnost uživatele. (informace na štítku)!
- Nikdy výrobek nepřenášejte ani nezvedejte, pokud na něm pacient sedí.
- Netahejte ani nedržte za dodatečně připojené součásti nebo příslušenství.

Pozor: Nebezpečí skřípnutí nebo zachycení!

- Při sklápění nebo odklápění područek nesahejte do vedení kloubu, aby nedošlo k zachycení částí těla, atp.
- Při připevňování sedáku nesahejte mezi povrch a rám sedáku, aby nedošlo k zachycení částí těla.

- Při sklápění stupaček dbejte na to, aby nedošlo k zachycení částí těla.
- Při vytahování a vkládání toaletní nádoby hrozí zachycení měkké tkáně pacienta. Aby se předešlo zraněním, může být nádoba vytahována nebo pouze tehdy, když na vozíku nesedí uživatel.

Pozor: Nebezpečí zranění!

- Při povrchové teplotě > 40 °C hrozí nebezpečí poranění. Nevystavujte proto výrobek vysokým teplotám (např. sluneč. záření, radiátorům, horké vodě). Před použitím nechte výrobek vychladnout.



Pokud výrobek používají pacienti s necitlivou pokožkou (bez vnímání teploty nebo poškození kůže), musí ošetřující personál provést tepelnou kontrolu (např. dotyk hřbetem ruky).

6 Hlášení incidentů

- Vážné incidenty v souvislosti s výrobkem musí být okamžitě hlášeny výrobcí a BfArM.
 - o BfArM: www.bfarm.de/DE
 - Používejte funkce hlášení a uvedené formuláře.
 - o Výrobce: pms@rebotec.de

7 Záruka

- Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku 24 měsíců. Dodržování všeobecných obchodních podmínek (www.rebotec.de/agbs), jakož i zamýšleného použití. Platí zákonná ustanovení o záruce.
- Neoprávněné úpravy tohoto výrobku ruší shodu výrobku a záruku.

6.1 Reklamáce

- Před vrácením výrobku nás, prosím, kontaktujte.
- Abyste předešli poškození při přepravě, používejte pokud možno originální obal.
- Dodržujte pokyny k ochraně před infekcemi.
- Ujistěte se, prosím, že výrobek při vrácení nepředstavuje riziko infekce.
- K produktu přiložte bezpečnostní list.
- Náklady mohou vzniknout v případě vrácení zboží, které není označeno jako nezávadné.

7 Opětovné použití, životnost

- Výrobek je vhodný pro opakované použití. Jak často lze výrobek znovu použít, závisí na frekvenci a povaze používání.
- Před opětovným použitím musí být výrobek hygienicky vyčištěn a musí být zkontrolována, a v případě potřeby obnovena, technická a funkční bezpečnost a spolehlivost výrobku. Viz 14.
- Podrobnější informace naleznete v pokynech pro repasování (02.12.156) a v pokynech pro údržbu (02.11.150).
- Dokumenty lze stáhnout z následujícího odkazu.
 - www.rebotec.de/downloads
- Pokud je výrobek používán k určenému účelu, je jeho životnost 5 let. Efektivní životnost se může lišit v závislosti na frekvenci a intenzitě používání a na celkovém stavu.

9 Rozsah dodávky

- 1 sprchovací/toaletní vozík, velká kola
- 1 návod k použití (02.07.132)
- 1 inbusový klíč


Pokyny pro repasování a údržbu lze objednat nebo zobrazit a stáhnout na adrese www.rebo-tec.de/downloads.

10 Nastavení pro použití

- Výrobek byl ve výrobě pečlivě zkontrolován, zda není vadný a zda je kompletní. Při převzetí prosím zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje případné poškození, ke kterému mohlo dojít během přepravy, a úplnost rozsahu dodávky. Montáž nebo seřízení musí provést odborný prodejce.


10.1 Sklopení stupaček

- Otočte (1) stupačky dopředu, dokud se nezajistí. Sklopte (2) nášlapnou plochu stupačky dolů. V případě potřeby upravte výšku stupaček.

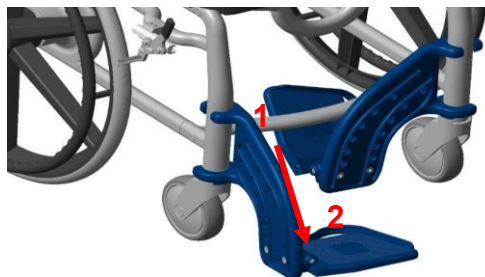


10.2 Nastavení výšky stupačky

- Výšku nášlapné plochy stupačky lze nastavit do 7 poloh. Povolte a vyjměte šrouby na boku stupačky pomocí inbusového klíče (SW 5). Zvolte vhodnou výškovou úroveň (1-7) a přišroubujte nášlapnou plochu zpět na místo. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy!

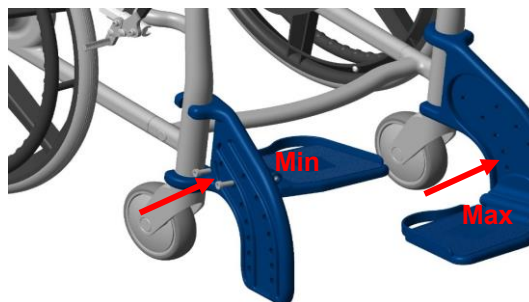


10.3 Sestavení opěrky zad

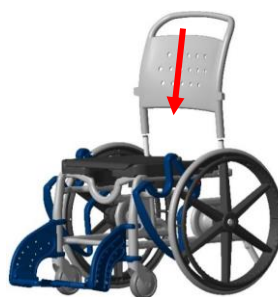

- Područky musí být odklopeny vzad před připojením zádové opěrky.
- Vložte zádovou opěrku do trubek rámu a područky otočte zpět tak, aby zapadly do drážky. Viz 12.4.


10.4 Montáž 24" kol

- Zasuňte šroub z vnější strany (1) skrz 24" kolo.
- Na šroub nasadte podložku.
- Přidržte 24" kolo před adaptérovým pouzdem a provlečte šroub oběma díly.
- Z vnitřní strany nasadte na šroub druhou podložku.
- Našroubujte pojistnou matici.
- Dotáhněte matici (pomocí 2 očkových klíčů, 19 mm).
- Dotáhněte pevně, ale tak, aby se 24" kolo stále volně otáčelo!
- Nasadte šedé a černé krytky.

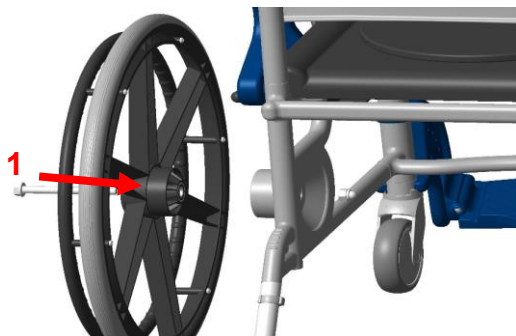

10.5 Nastavení parkovacích brzd

- Povolte oba šrouby držáku brzdy (1), dokud nebude možné držák posunout přes osazení na rámu. Poté posuňte držák brzdy až na doraz (2) a oba šrouby lehce dotáhněte. Prostrčte brzdovou páku (3) otvorem v držáku brzdy a vyrovnejte ji do rovné polohy.

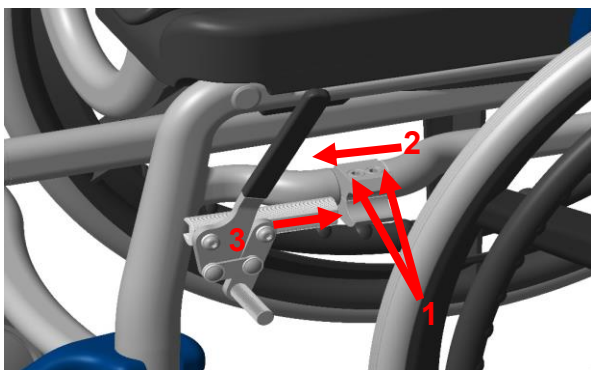

11 Údaje o výrobku

- Vyhrazujeme si právo na technický vývoj a vylepšení s ohledem na konstrukci zobrazenou v tomto návodu k použití. Viz 16.

Vlastnost	Hodnota
Genf	
2. Hmotnost výrobku*	23.2 kg
3. Celková hmotnost*	26.8 kg
Miami	
2. Hmotnost výrobku*	24.4 kg
3. Celková hmotnost*	28.2 kg
Kompatibilita s pokožkou	DIN EN 10993-1/-5
Hořlavost	DIN EN 1021-1/-2

*Bez příslušenství

12 Použití výrobku

- Před použitím je třeba se ujistit, že je výrobek v řádném stavu. Pokud jsou zjevné závady nebo poruchy, výrobek nesmí být používán. Závady nechte opravit u specializovaného prodejce.



Je-li to třeba, v závislosti na omezeních pacienta (přiměřená pohyblivost a svalová síla), je nutná přítomnost pečovatele během usazování a vstávání pacienta. Následná nastavení smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

12.1 Posazení

- Před posazením a postavením se ujistěte, že je vozík bezpečně umístěn, aby se nemohl posunout nebo převrátit, že obě velká kola jsou zabrzděna, že jsou područky správně zajištěny, že sedací plochy jsou pevně na svém místě, a že jsou stupačky odklopené do strany nebo nahoru.



- Uživatel musí být co nejbližší u vozíku. V případě potřeby se může natočit nebo se opřít rukama o područky. Uživatel by měl pomalu usedat na sedák.

- Pokud to není možné z důvodu jeho fyzických omezení, musí uživatel vyhledat pomoc kompetentní osoby. Usazování lze provést pomocí pomocného zařízení.



Pozor: Nebezpečí pádu!



- Zabraňte pádu nebo sesouvání na sedáku. Pacient by měl sedět pokud možno na celé ploše sedáku, nikoli pouze na jeho okraji.

- Při přepravě osob používejte, pokud je to možné, celou plochu zádové opěrky a stupačky.

12.2 Vstávání

- Před vstáváním zkontrolujte, zda je vozík zajištěn proti posunutí a převrácení (viz 10.9), **obě 24" kola jsou zabrzděna**, područky jsou řádně zajištěné a stupačky jsou vyklopené do strany nebo nahoru.
- Pacient se musí na vozíku posunout dopředu tak, aby měl nohy na podlaze.

3.



- Pacient se musí opřít rukama o područky a pomalu se zvedat ze sedáku.
- Pacient se nesmí naklánět příliš dopředu, je zde potenciální riziko pádu.

- Ošetřující personál by měl pacientovi pomoci vstát.


Pozor: Nebezpečí pádu!


4.



- Pacient nesmí při usedání ani při vstávání nikdy ponechat chodidla na stupačkách.

12.3 Parkovací brzdy, kola 24"


- Zatlačte brzdovou páku (1) úplně dozadu. Inbusové šrouby (2) parkovací brzdy povolte klíčem (SW 5) pouze mírně. Posuňte parkovací brzdou tak, aby byla přibližně 25 mm před profilem 24" kola, a inbusové šrouby dotáhněte.
- Zkontrolujte funkci parkovací brzdy zatlačením páky dopředu. Pokud brzdový účinek stále není dostatečný, parkovací brzdou znovu seřídte (zmenšíte nebo zvětšíte vzdálenost).

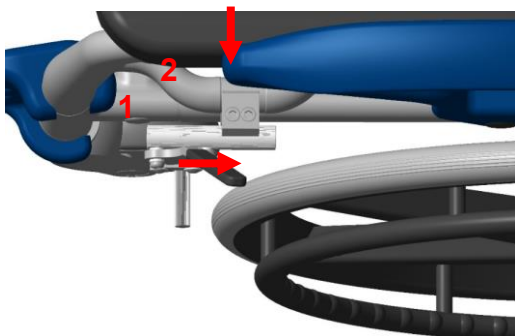

12.4 Odklopení područek

- Vytažením aretačních kolíků (A) se uvolní zajišťovací mechanismus a područky lze odklopit dozadu.

- Při sklopení područek zkontrolujte, zda jsou západky na opěradle (B) a aretační kolíky (A) správně usazeny. Područky mohou být odklopeny oběma rukama.
- Při celém otáčení držte zajišťovací čep (A) vytažený a druhou rukou ved'te područku do bodu (C). Područky se dotýkejte pouze na vnější straně a nesahejte do ní ani skrz ni.

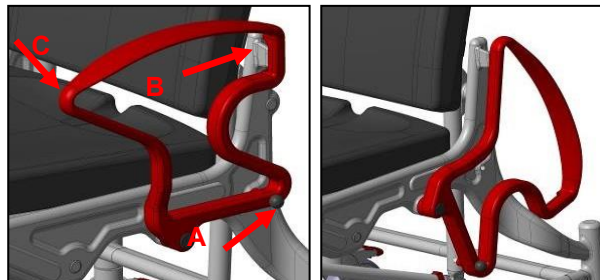

V pravidelných intervalech kontrolujte aretaci, protože případné usazeniny vodního kamene na aretačním mechanismu mohou zhoršit jeho funkci a hladký chod.

12.5 Odejmutí stupaček

- Odejměte nebo sklopte sedák. Poté zvedněte stupačku o cca. 100 mm a otočte ven o 90 stupňů.
- Nyní můžete stupačku zatlačit úplně nahoru a vytáhnout ji.

12.6 Odejmutí sprchov./toalet. sedáku


- Sedák lze za účelem čištění nebo výměny vyjmout z jeho zajištěné polohy na rámu vozíku jeho zvednutím.

12.7 Manipulace s toaletní nádobou


- Zezadu vozíku zasuňte toaletní nádobu pod sedák. Chcete-li nádobu vyjmout, mírně ji nadzvedněte a poté vytáhněte směrem dozadu.

12.8 Funkce parkovacích brzd, kola 24"

- Parkovací brzda na 24" kole se uvolní zatažením páky (1) dozadu.

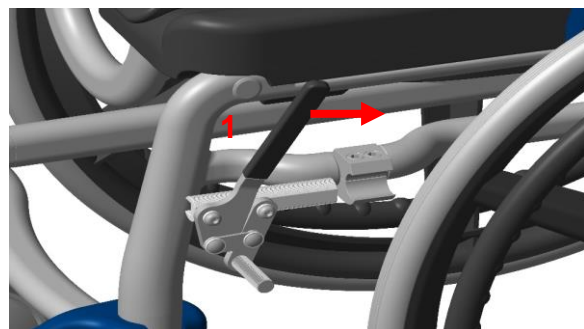

- Zatlačením páky (2) dopředu se 24" kolo zabrzdí. Páku stlačte až úplně dolů!

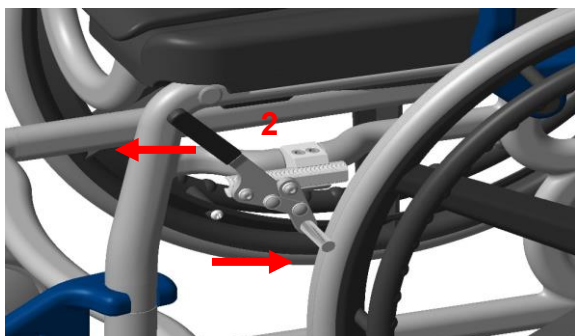


- Pokud brzdový účinek není dostatečný nebo se po určité době používání snižuje, je nutné parkovací brzdou seřídit.



Individuální nastavení a seřízení parkovací brzdy smí provádět pouze odborný prodejce. To platí i pro výměnu nebo opravu parkovací brzdy.

12.9 Ochrana proti překlpení a pádu.

- Pro překonání překážek lze s verzi vozíku s velkými koly naklonit dozadu. Tím se nadzvednou přední kolečka a překážku lze následně překonat.
- Uchopte opěradlo oběma rukama a nakloňte vozík dozadu, dokud se obě rolny proti převrácení téměř nedotknou podlahy.
- Vytažením pojistné spony lze rolnu proti převrácení vytáhnout.

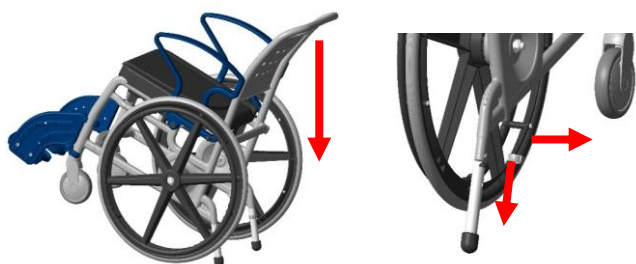

13 Řešení problémů

Závada	Možná příčina	Řešení
Područky se správně neodklápí	Nečistoty u aretačního kolíku	Vyčistěte, pravidelně kontrolujte
Aretační kolíky nelze vytáhnout	Znečištění, zaseklá či vadná pružina kolíku	Vyčistěte, vyměňte aretační kolík
Stupačky nejdou sklopit	Nahromadění nečistot v závěsu	Vyčistěte, zkontrolujte šrouby
Brzda nebrzdí	Obecná závada	viz údržba!

Závada	Možná příčina	Remedy
Kola se obtížně točí	Nečistoty	Vyčistěte
Kola se netočí	Obecná závada	viz údržba!
Nerovnoměrný chod kol	Nerovnoměrné opotřebení	viz údržba!
Nestabilní rám vozíku	Uvolněné šrouby	Utáhněte šrouby rámu a kol
Deformovaná vložka kola	Náraz do překážky	viz údržba!

14 Péče a údržba

14.1 Čištění a péče



- Výrobek lze čistit jemným konvenčním čisticím a dezinfekčním prostředkem.

Po vyčištění otřete výrobek čistým vlhkým hadříkem a poté jej otřete do sucha.

- Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky s agresivními přísadami (kyseliny, ředidla), stejně jako tvrdé čisticí předměty (kartáče), mohlo by dojít k poškození povrchů nebo vést ke vzniku nánosů na materiálech.
- Výrobek je vhodný pro ruční čištění a dezinfekci. Dodržujte, prosím, pokyny pro opětovné vydání (02.12.156).

14.2 Údržba

- Opotřebení, které není včas rozpoznáno a/nebo nesprávná manipulace, stejně jako nepravdivá nebo žádná údržba může vést k nehodám.



*Z bezpečnostních důvodů musí být výrobek **minimálně jednou ročně** odborně udržován.*

- Zkontrolujte výrobek, zda není viditelně poškozen (praskliny, zlomy, uvolněné části)
- Před použitím zkontrolujte stabilitu

Rozsah údržby/kontroly

- Údržba by měla zahrnovat následující kontrolní body a měla by být zdokumentována.
- Utažení všech šroubových spojů (zejména kol a rámu)
- Funkce područek a aretačních kolíků
- Funkce stupačky (vyměňte vadné stupačky)

- Jízdní vlastnosti a stopa kol (vyměňte vadná kola)
- Funkce parkovacích brzd (vyměňte vadné brzdy)
- Zkontrolujte příslušenství, zda není poškozené

Opravy


- Máte-li jakékoli dotazy týkající se údržby vozíku, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce nebo prodejnu zdravotnických potřeb.
- V případě poškození a/nebo opravy okamžitě kontaktujte svého autorizovaného prodejce.
- Na vozíku **nikdy** neprovádějte **žádné** neautorizované úpravy nebo přestavby. Ty budou mít pouze nepříznivý vliv na bezpečnost a fungování vozíku.
- K opravám používejte pouze originální náhradní díly od výrobce REBOTEC. Respektujte všechny informace o záruce.

- Po provedení údržby nebo opravy doporučujeme výrobek z hygienických důvodů před dalším použitím vyčistit.
- Dodržujte všechny pokyny pro objednávání náhradních dílů, opětovné použití a životnost.



Pro dokumentaci údržby a oprav poskytuje REBOTEC zprávu o údržbě. Návod k použití a deník údržby si můžete objednat nebo prohlédnout na www.rebotec.de. Informace je také možné vytisknout a v případě potřeby přečíst.

15 Náhradní díly & příslušenství

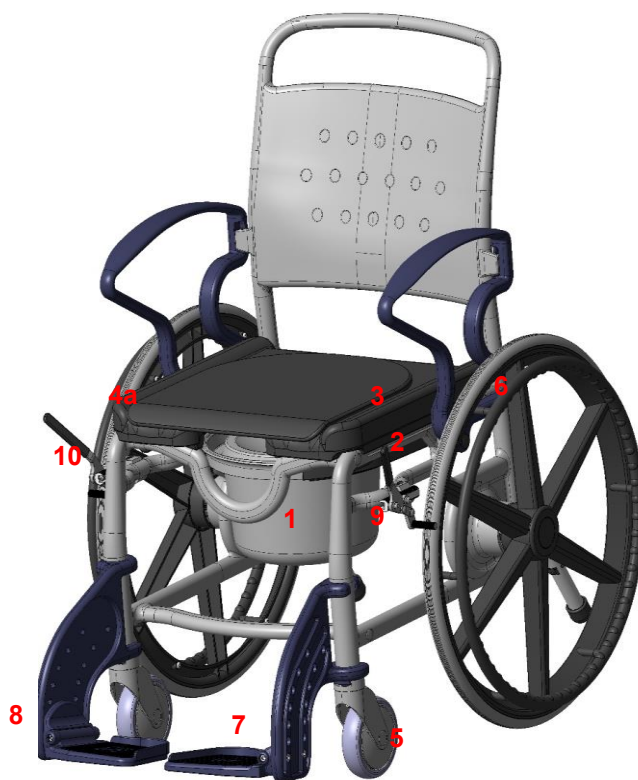


Č.	Č. pol.	Označení
1	301.00	Toaletní nádoba s víkem
2	309.10	Držák toaletní nádoby
3	440.XX.62	PUR kryt pro sprchovací a toaletní sedák
4a	440.10.04	PUR sprchovací sedák
4b	308.00.60	Sprchovací sedák, standard
5	440.49.89	5" kolo bez brzdy
6	450.10.05	Aretace područky, kompletní
7	447.XX.57	Stupačka kompletní, levá
8	447.XX.59	Stupačka kompletní, pravá
9	440.49.89	Parkovací brzda, pravá
10	440.49.90	Parkovací brzda, levá
-	440.10.24	Sprchovací sedák, uzavřený
-	440.10.32	PUR područka
-	440.10.40	PUR ochrana proti protečení
-	02.07.132	Návod k použití
-	02.11.150	Deník údržby
-	02.12.156	Pokyny pro opětovné vydání

XX= Barevná varianta

K zajištění správné a bezpečné funkce zařízení používejte pouze náhradní díly a příslušenství REBOTEC.

16 Náčrt & rozměry

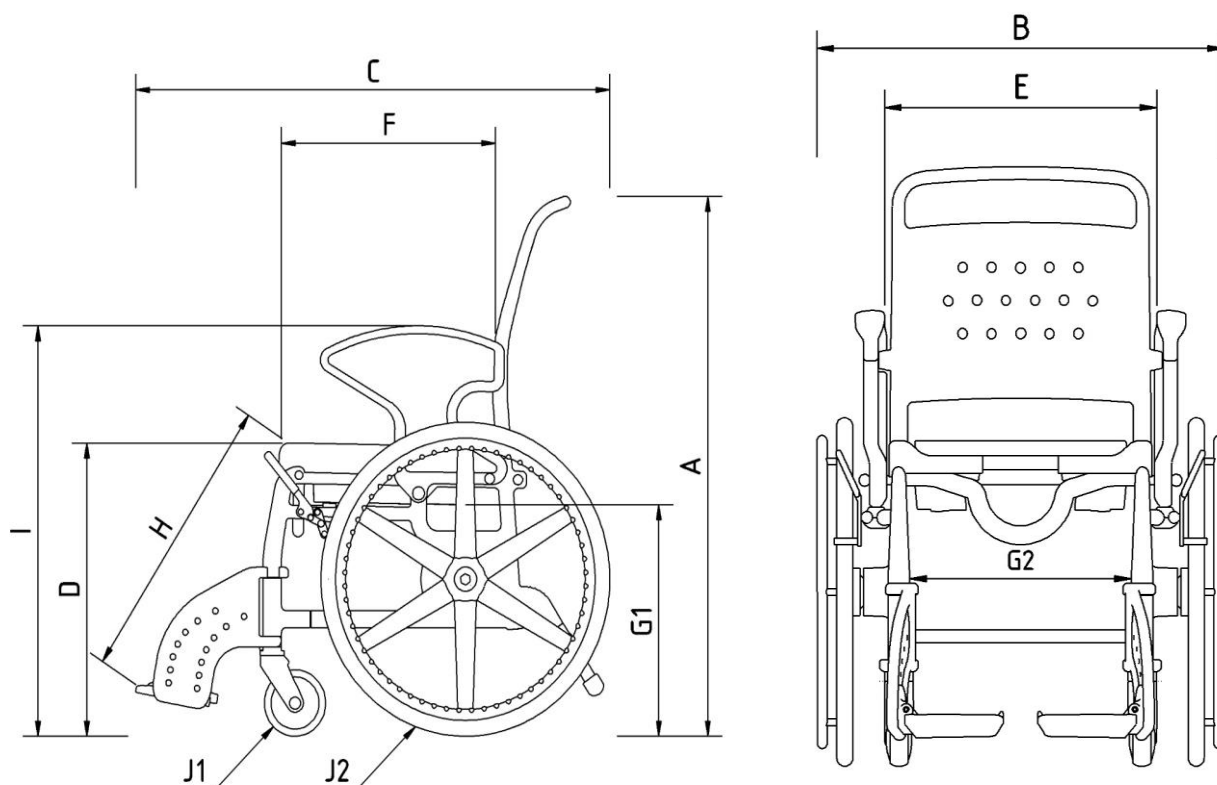

Ozn.	Název	Genf- rozměry / mm	Miami- rozměry / mm
A	Celková výška	1010	1020
B	Celková šířka	710	770
C	Celková hloubka	950	950
D	Výška sedu	520 - 550	520-550
E	Šířka mezi područkami	460	530
F	Hloubka sedu	410 - 450	410-450
G1	Výška pro nasunutí nad toaletu	450	450
G2	Šířka pro nasunutí nad toaletu	385	450
H	Délka stupačky ke kolenům, max	380 - 580	380 - 580
I	Výška područky	775 - 825	775 - 825
J1	Průměr předního kola	125	125
J2	Průměr zadního kola	600	600

Rozměry a hmotnosti se mohou lišit v závislosti na vybavení. Mohou existovat drobné odchylky způsobené výrobními tolerancemi. Změny vyhrazeny bez upozornění.



ORTOSERVIS s.r.o.
Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8
tel: 266 313 652
ortoservis@ortoservis.cz
www.ortoservis.cz



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telephone: +49 (0) 5431/9416-
Fax: +49 (0) 5431/9416-66
Web: www.rebotec.de
Email: info@rebotec.de



Přečtěte si tento návod k použití **před prvním použitím výrobku** a mějte jej po ruce pro případné budoucí použití. Při následném prodeji jej také předložte kupujícímu.