

Návod k použití – verze 4 (2025 revize)**REF:** 4626 H, 4627 H & 4628 H**Produkt:** Sedačka na vanu**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Hloubka: 23 cm

Tloušťka: 11 cm

Šířka:

4626 H – 66 cm

4627 H – 68,5 cm

4628 H – 71 cm

Hmotnost výrobku: 2 kg

Maximální hmotnost uživatele: 190 kg

POPIS

Zdravotnický prostředek, bezpečnostní třídy I., Plastová lamelová sedací deska s madlem určená k umístění na okraje vany.

Deska umožňuje bezpečné sezení při koupání nebo sprchování.

Pod deskou jsou umístěny posuvné plastové opěrky, které umožňují přizpůsobení šířce vany a zabraňují sklouznutí.

Sedačka se vyrábí ve třech různých šířkách (viz TECHNICKÉ PARAMETRY)

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Umožňuje uživateli bezpečné sezení nad vanou s nohama umístěnými ve vaně, čímž usnadňuje vstup, výstup a osobní hygienu.

NÁVOD K POUŽITÍ A NASTAVENÍ

Povolte upevňovací kolík, nastavte posuvné opěrky na šířku vany a kolík znovu pevně utáhněte.

Pomocí paží i nohou se pomalu posadte na desku.

Po dokončení hygieny vypusťte vodu z vany před vstáváním.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nestoupejte na výrobek.

Používejte protiskluzové podložky podle potřeby.

Při používání koupelových přípravků postupujte opatrně.

Při vstupu a výstupu z vany požádejte v případě potřeby o asistenci.

ČISTĚNÍ

Čistěte vlhkým hadříkem nebo antibakteriální utěrkou.

Nepoužívejte abrazivní prostředky.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE

Předpokládaná životnost: 5 let.

Po skončení životnosti kontaktujte dodavatele nebo výrobce.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda musí být neprodleně nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu.



Roma Medical Aids Ltd.
York Road, Bridgend Industrial
Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
website: www.romamedical.co.uk
e-mail: sales@romamedical.co.uk
tel: +44 1656 674488
fax: +44 1656 674499



DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
website: www.dmapraha.cz
e-mail: info@dmapraha.cz



StartDock Rotterdam B.V.,
Westplein 12-14, 3016 BM,
Rotterdam, The Netherlands

POZNÁMKY