

PODMÍNKY UŽITÍ

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)	Identifikační štítek / Typ výrobku (vypsat): Identifikačný štítok / Typ výrobku (vypísať): :
Výstupní kontrola: Výstupná kontrola:	
Jméno: Meno	
Podpis: Podpis:	

Podmínky užití:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacie musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamace musí uživatel nepochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zasílání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Doba uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat

Podmienky použitia:

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktoré sa vyskytne u spotrebného tovaru počas 24 mesiacov od prevzatia.
2. Výrobek musí byť použitý výlučne na účely, na ktoré sa má určiť a používateľ musí riadiť pokyny uvedené v návode na použitie. Za škody vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania v rozpore s "Návodom na použitie" výrobcu neodpovedá.
3. Výrobok musí byť riadne používaný, ošetrovaný, udržiavaný a skladovaný podľa pokynov uvedených v návode na použitie.
4. Každú vzniknutú chybu je potrebné ihneď po jej zistení opraviť. Za chyby vzniknuté následkom ďalšieho používania výrobku, bez toho, aby boli pôvodné chyby opravené, nesie plnú zodpovednosť používateľ.
5. Reklamacie musí byť uplatnená u predajcu (vrátane predajcov cez internet alebo alternatívnych), kde bol produkt zakúpený. Uplatnenie reklamácie sa riadi príslušnými odsekmi Občanského a iných zákonov ČR.
6. Pri uplatnení reklamácie musí používateľ nepochybne preukázať, že u predajcu tovaru / výrobku zakúpil. Na zabezpečenie vyriešenia reklamácie sa odporúča predložiť doklad o zakúpení výrobku a vyplnený posledný zoznam návodu na použitie s výrobným číslom reklamovaného tovaru.
7. Výrobca zabezpečuje výrobok identifikačným štítkom. Ak sú údaje na identifikačnom štítku nečitateľné alebo ak neexistuje úplne, môže byť používateľ vyzvaný na doloženie totožnosti reklamovaného tovaru.
8. Reklamný postup môže byť zahájený, ak je reklamovaný tovar zaslaný opatrne zabalený a zaistený proti poškodeniu. Veľmi vhodné je tovar zaslaný v originálnom obale. Za poškodenie reklamovaného tovaru, ktoré vzniklo pri jeho zaslaní, výrobca nezodpovedá. Majiteľ je povinný predložiť reklamované výrobky čisté a hygienicky nezávadné, podľa všeobecných hygienických zásad. Majiteľ nemôže pri žiadosti požadovať, aby v priebehu reklamácie riadenia vykonali základnú údržbu alebo čistenie výrobku.
9. Doba uplatnenia práva z vady nemožno zamieňovať s užitnou dobou, tj. dobou po ktorej sa pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby, môžu tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, účel a rozdielnosť v konštrukcii správne používať

Datum prodeje (den, měsíc, rok):
Dátum predaja (deň, mesiac, rok):

_____ . _____ . _____

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:
Meno (paličkami), telefón, razítko a podpis predávajúceho:



Koupelnový program Kúpeľňový program

Návod k použití Návod na použitie



Výrobce a distributor v ČR:

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
tel.: +420-315 630 111
reha.cz@patron.eu
www.patron.eu

Návod k použití

Sedačky vám usnadní vykonávání osobní hygieny, zajistí bezpečnost a zvýší vaše pohodlí.

Povrch kovové konstrukce je ošetřen bílým lakem, sedák je plastový.

Použití zdravotnického prostředku při okolní teplotě: od + 3 °C do + 35 °C

Čištění: sedačky jsou snadno hygienicky udržovatelné. Měkkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s přidáním mycího prostředku otřete sedačku. Pro čištění nepoužívejte prostředky, které mohou poškodit povrch (abrazivní a chemické prostředky)

Sedačka sprchová sklopná typ A a B

Montáž: Sedačku přišroubujte ke stěně pomocí hmoždinek a šroubů (nejsou součástí dodávky).

Použijte hmoždinky nejméně č. 12 a šrouby o průměru nejméně 5,5mm.

Sedačku lze nainstalovat pouze na cihlovou zeď. Nepřipevňujte na umakartové stěny.

Nosnost: max. 120kg



Typ A



Typ B

Sedačka vanová závěsná

Montáž: Vanovou sedačku zavěste do vany přes její okraje. Plastové koncovky zabrání její posouvání ve vaně.

Nehodí se do rohových van.

UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte pomůcku do vany, je-li větší, než stěny vany. Pomůcka musí mít alespoň 10mm na každé straně od stěny vany. Hrozí poškození vany!

Nosnost: max. 130kg

**Sedačka na vanu s madlem**

Montáž: Sedačku položte na okraje vany. Optimální polohu zajistíte pomocí dorazů. Nehodí se do rohových van.

Nosnost: max. 220kg

**Návod na použitie**

Sedačky vám uľahčia vykonávanie osobnej hygieny, zaisťujú bezpečnosť a zvýšia vaše pohodlie.

Povrch kovovej konštrukcie je ošetrený bielym lakom, sedák je plastový.

Použitie zdravotníckej pomôcky pri okolitej teplote: od + 3 °C do + 35 °C

Čistenie: sedačky sú ľahko hygienicky udržiavateľné. Mäkkou handrou namočenou vo vlažnej vode s prídavkom umývadacieho prostriedku utrite sedačku. Pri čistení nepoužívajte prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch. (abrazívne a chemické prostriedky).

Sedačka sprchovacia sklápacia typ A a B

Montáž: Sedačku priskrutkujte ku stene pomocou hmoždínok a skrutiek (nie sú súčasťou dodávky)

Použite hmoždinky najmenej č. 12 a skrutky s priemerom najmenej 5,5mm.

Sedačku možno nainštalovať len na tehlovú stenu. Nepripievňujte na umakartové steny.

Nosnosť: max. 120kg



Typ A



Typ B

Sedačka vaňová zavesná

Montáž: Vaňovú sedačku zaveste do vane cez jej okraje. Plastové koncovky zabránia jej posúvaniu vo vani.

Nehodí sa do rohových vaní.

UPOZORNENIE: Nevkladajte pomôcku do vane, ak je väčšia, než steny vane. Pomôcka musí mať aspoň 10mm na každej strane od steny vane. Hrozí poškodenie vane!

Nosnosť: max. 130kg

**Sedačka na vaňu s madlom**

Montáž: Sedačku položte na okraje vane. Optimálnu polohu zaistíte pomocou dorazov. Nehodí sa do rohových vaní.

Nosnosť: max. 220kg

