

Návod k použití – verze 4 (2025 revize)

REF: 4550, 4550 REF, 4551 & 4553 including variations

Produkt: Sprchové pojízdné křeslo

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. hmotnost uživatele (standardní verze): 140 kg

Max. hmotnost uživatele (HD verze): 195 kg

Hmotnost výrobku: 5–7 kg



Model 4550/4BC/FR

Hloubka: 56–76 cm

Šířka: 56 cm

Výška: 83 cm

Hloubka sedáku: 41 cm

Šířka sedáku: 46 cm

Výška sedáku: 46 cm



Model 4551/4BC

Hloubka: 60 cm

Šířka: 57 cm

Výška: 88 cm

Hloubka sedáku: 41 cm

Šířka sedáku: 46 cm

Výška sedáku: 51 cm



Model 4553EX

Hloubka: 62 cm

Šířka: 55 cm

Výška: 76-91 cm

Hloubka sedáku: 41 cm

Šířka sedáku: 47 cm

Výška sedáku: 40-55 cm

POPIS

Zdravotnický prostředek, bezpečnostní třídy I., sprchové židle s plastovým povrchem a ergonomickým sedákem.

Jsou dostupné v několika variantách s kolečky, brzdami, područkami, opěrkou nohou a nastavitelnou výškou.

Gumové koncovky nebo kolečka zabraňují uklouznutí.

Variety /4BC mají brzděná kolečka.

Variety /FR jsou vybaveny opěrkou nohou.

Variety /HD jsou zesílené.

Variety /DA mají odnímatelné područky.

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Umožňuje bezpečné a pohodlné sezení při sprchování.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přemístěte židli do sprchového prostoru.
Usaďte uživatele a proveďte hygienu.

Brzdy koleček aktivujte sešlápnutím zadních páček.
Pro uvolnění brzd stiskněte malé plastové páčky.

Nastavitelné nohy upravte vyjmutím pojistek.
Područky sejměte vytažením nahoru.
Opěrku nohou nastavte zasunutím nebo vysunutím.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze na rovném povrchu.
Zajistěte správnou polohu genitálních opěrek.
Výrobek není určen ke stání.
Poškozené koncovky nebo kolečka vyměňte.
Nepoužívejte jako invalidní vozík.
Při přesunech vždy zajistěte kolečka.

ČISTĚNÍ

Čistěte vlhkým hadříkem.
Odstraňujte zbytky nečistot.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE

Předpokládaná životnost rámu: 5 let.
Po skončení životnosti kontaktujte výrobce.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda musí být neprodleně nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu.

POZNÁMKY:



Roma Medical Aids Ltd.
York Road, Bridgend Industrial
Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
website: www.romamedical.co.uk
e-mail: sales@romamedical.co.uk
tel: +44 1656 674488
fax: +44 1656 674499



DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
website: www.dmapraha.cz
e-mail: info@dmapraha.cz

StartDock Rotterdam B.V.,
Westplein 12-14, 3016 BM,
Rotterdam, The Netherlands