

BOB / BOBY



Gebrauchsanweisung - Instructions for use - Mode d'emploi -
Gebruiksaanwijzing - Istruzioni per l'uso - Brukerveiledning - Návod k použití

Obsah

Předmluva	23
Prohlášení o shodě	23
Životnost	23
Likvidace.....	23
Identifikační štítek	23
Opakované použití.....	23
Záruka	23
Součásti výrobku	24
Zamýšlený účel	24
Indikace.....	24
Obsah dodávky.....	24
Bezpečnostní pokyny.....	24
Montáž.....	25
Použití.....	25
Umístění do vany.....	25
Montáž opěrky zad	25
Čištění a údržba.....	25
Technické údaje.....	25

Předmluva

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek od společnosti Drive DeVilbiss.

Konstrukce, funkčnost a kvalita výrobku vás určitě nezklamou.

Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití. Obsahuje důležité bezpečnostní informace a užitečná doporučení pro správné používání a údržbu. Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete více informací, obraťte se na specializovaného prodejce Drive DeVilbiss, kde jste výrobek zakoupili.

Tento návod k použití obsahuje všechny důležité informace týkající se nastavení a obsluhy výrobku. Nejaktuálnější návod k použití je dostupný ve formátu PDF na webu, případně si jej můžete vyžádat přes zákaznický servis.

Osoby se zrakovým postižením si mohou návod zobrazit ve větším formátu. Nevidomé pacienty musí poučit jejich doprovodná osoba. Opravy a také některé změny nastavení vyžadují zvláštní technické školení, a proto je musí provádět dodavatel zdravotnických prostředků.

Prohlášení o shodě

Společnost DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG prohlašuje, že popisovaný výrobek vyhovuje požadavkům nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.

Životnost

Naše společnost předpokládá životnost výrobku v délce pěti let, pokud bude používán zamýšleným způsobem a bude na něm prováděna veškerá předepsaná údržba a servis.


Uváděná životnost může být podstatně delší, pokud je s výrobkem zacházeno pečlivě a je správně opravován, udržován a používán. V podstatě neexistují žádná technická omezení s ohledem na budoucí vývoj vědy a techniky.

Avšak životnost může být také výrazně kratší v případě velmi častého nebo nesprávného používání. Stanovení životnosti naší společností proto nelze chápat jako poskytnutí další záruky.

Likvidace

Pokud výrobek již nepotřebujete, obraťte se na specializovaného prodejce nebo jej odнесите do místního střediska pro likvidaci odpadu.

Identifikační štítek

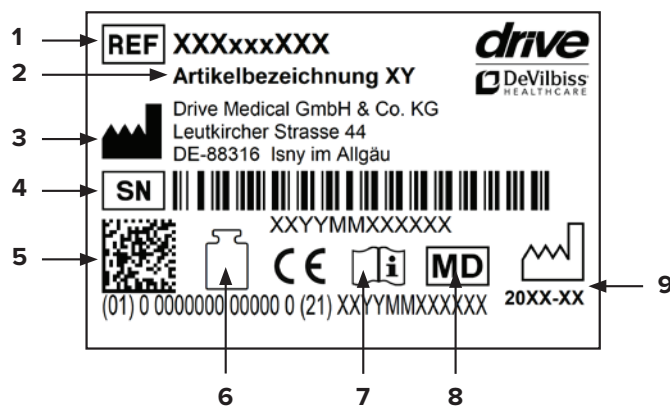

1 Číslo artiklu | 2 Název artiklu | 3 Výrobce | 4 Sériové číslo
5 Kód UDI | 6 Max. zatížení | 7 Dodržujte návod k použití
8 Zdravotnické zařízení | 9 Datum výroby (rok-měsíc)

Opakované použití

Tento výrobek lze používat opakovaně.

Nezapomeňte novému uživateli rovněž předat veškerou technickou dokumentaci potřebnou k bezpečnému používání.

Výrobek musí zkontrolovat specializovaný prodejce, vyčistit jej a uvést do optimálního stavu.

Vždy dodržujte pokyny výrobce během přípravy výrobku; jsou k dispozici na vyžádání.

Příslušenství je dostupné u specializovaného prodejce nebo na stránce www.drivedevilbiss.com

Záruka

Záruční lhůta na námi dodaný výrobek činí 24 měsíců ode dne zakoupení. Vadné součásti budou bezplatně vyměněny, pokud se prokáže, že se jedná o vadu materiálu nebo zpracování.

Standardní záruční lhůta se obecně nevztahuje na součásti podléhající opotřebení, pokud tyto součásti nevyžadují opravu nebo výměnu evidentně v přímém důsledku vady materiálu nebo zpracování.

Vyhrazujeme si právo na chybu a změny vyplývající z technických vylepšení a konstrukčních změn.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Součásti podléhající opotřebení (mimo jiné): Ochranná krytka / trubková podpora.

Součásti výrobku



BOB / BOBY s opěradlem

1. Sedací jednotka
2. Ochranná krytka / trubková podpora
3. Opěradlo



BOB / BOBY bez opěradla

1. Sedací jednotka
2. Ochranná krytka / trubková podpora

Zamýšlený účel

Sedátko do vany zahákněte do vany nebo položte na okraj vany. To sníží vzdálenost, kterou potřebujete ke zvednutí/snížení vlastními silami. Používají se při výrazném omezení pohyblivosti horních anebo dolních končetin. S touto pomůckou se koupání znovu stane samostatnějším úkonem. Nicméně k používání pomůcky je předpokladem dostatečně zachovaná funkčnost zbytku těla, zejména polohy trupu a používání končetin ke změně polohy.

Indikace

INDIKACE:

Neschopnost jistě sedět nebo se posadit anebo neschopnost udržet polohu vsedě a, podle případu, omezení samostatnosti při vlézání/vylézání do vany a z vany anebo z důvodu výrazně omezené funkčnosti či úplně nefunkčnosti dolních končetin s omezenou nebo chybějící mobilitou a svalovou silou anebo výrazně omezenou kontrolou trupu se současně zachovanou přiměřenou pohyblivostí horních končetin. K použití v domácí péči.

Obsah dodávky

1 x	Sedátko s rámem
1 x	Závěsná část, levá
1 x	Závěsná část, pravá
1 x	Opěrka zad (volitelná pro 550400200)
1 x	Návod k použití


Bezpečnostní pokyny

- Pozorně si přečtěte tento návod k použití.
- Před použitím zkontrolujte, že žádné součásti nejsou poškozeny a že jsou bezpečně sestaveny. Nepoužívejte výrobek, je-li vadný!
- Seděte si pomalu a opatrně. Nespadněte!
- Pozor – nebezpečí uklouznutí/pádu!
- Na stoličku do vany nestoupejte.
- Dodržujte maximální povolenou hmotnost uživatele. Tento údaj najdete v technických parametrech v tomto návodu k použití a také na identifikačním štítku.

Montáž

Levou a pravou závěsnou část zasuněte do vodicí trubky rámu, až dosáhnete požadované šířky, potom stiskněte příslušné pojistné tlačítko (**obr. 1**).

Zkontrolujte, že jsou pojistná tlačítka zacvaknutá v koncové poloze.

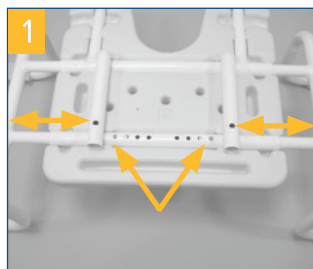

Použití

Šířka závěsného sedátka do vany je nastavitelná. Rozpětí šířky můžete najít v technických údajích.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vždy upravte sedátko tak, aby byla zajištěna maximální nosná plocha!

Umístění do vany

Okraj vany musí být čistý a suchý. Vždy upravte šířku opěrek na maximální šířku, abyste zajistili bezpečnou oporu (**obr. 2**).



Montáž opěrky zad

Opěrka zad je zcela sestavena a zasunutá do montážní trubky (**1**) na spodní straně sedátka. Pojistná tlačítka musí zacvaknout do příslušných otvorů. (**2**) (**obr. 3**).



Čištění a údržba

- Výrobek pravidelně čistěte vlhkým hadrem!
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!
- Nepoužívejte abrazivní čističe!
- Nepoužívejte čističe s vysokým obsahem chloru nebo na bázi octu!
- K desinfekci lze použít desinfekční sprej jako např. Descosept AF nebo Bacillol AF.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.
- Chraňte výrobek před dlouhodobým vystavením teplotám vyšším než 60 °C.
- Vyskytne-li se na výrobku závada, obraťte se na specializovaného prodejce, kde jste výrobek zakoupili.


Technické údaje

Výrobek	Bob s opěrkou zad	Bob bez opěrky zad	Boby
Číslo artiklu	550400200	550400100	12488KD
Č. HMV (registr zdravotnických prostředků)	04.40.02.2011	04.40.02.1010	04.40.02.2015
Maximální nosnost	120 kg	120 kg	120 kg
Šířka sedadla × hloubka sedadla	41 x 41 cm	41 x 41 cm	41 x 41 cm
Celková šířka	74 - 85 cm	74 - 85 cm	67 - 78 cm
Výška opěradla	36 cm		36 cm
Barva	bílá	bílá	bílá
Celková hmotnost	3,1 kg	2,4 kg	3 kg
Materiál rámu	Hliník, práškovaný	Hliník, práškovaný	Hliník, práškovaný
Materiál sedátka	Plast (PE-HD)	Plast (PE-HD)	Plast (PE-HD)

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.

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Ihr Fachhändler:



Irrtum und Änderungen vorbehalten
Stand: 21/02/2026
Version: MDR-1.0

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu • Njemačka
T +49 7562 9724 0 • F +49 7562 9724 25
www.drivemedical.de • info@drivemedical.de