

MOBIAKCARE

NÁVOD K OBSLUZE

Invalidní vozík odlehčený „LEVO“

Modely: 0810840 / 0810841 / 0810842 / 0810843



CE
-

Určené použití

Invalidní vozíky LEVO jsou určeny k přepravě osob s tělesným nebo duševním postižením a osob se sníženou nebo omezenou pohyblivostí. Vozík umožňuje přesun uživatele buď samostatně, nebo za pomoci doprovodu, v závislosti na provedení a fyzických schopnostech uživatele.

Pokud je vozík vybaven zadními koly o průměru **20–24 palců (50–60 cm)** s ručními obručemi, může se uživatel pohybovat **samostatně vlastní silou**. V ostatních případech je vozík určen k pohybu s asistencí doprovodu.

Invalidní vozík je určen k použití na **rovných a zpevněných površích** a je určen výhradně k přepravě **jedné osoby**.

2. Určení uživatelé

- dospělé osoby se sníženou pohyblivostí
- osoby s poruchami chůze nebo stability
- osoby po úrazech nebo s chronickým onemocněním pohybového aparátu

Použití vozíku musí vždy odpovídat fyzickým schopnostem uživatele.

3. Kontraindikace

Nejsou známy žádné specifické kontraindikace při dodržení tohoto návodu k použití.

4. Obecná bezpečnostní upozornění

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím si **pečlivě přečtěte celý tento návod k použití**.

Pokud neporozumíte některému z upozornění, pokynů nebo omezení, **nepoužívejte výrobek** a obraťte se na zdravotnického pracovníka, dodavatele nebo autorizovaný servis.

- Uchovávejte vozík mimo zdroje tepla.
- Nedovolte dětem, aby si s vozíkem hrály.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení vozíku.
- Zvláštní opatrnost je nutná v blízkosti pohyblivých částí, které mohou způsobit zachycení končetin.
- Vozík nikdy nezvedejte za odnímatelné nebo pohyblivé části.
- Samostatné usedání a vstávání z vozíku vyžaduje dostatečnou sílu a stabilitu horní části těla.

5. Důležitá bezpečnostní upozornění

DŮLEŽITÉ

Invalidní vozík je konstruován tak, aby poskytoval maximální bezpečnost. Nesprávné používání, neodborné nastavení nebo úpravy však mohou zvýšit riziko nehody nebo zranění.

- Při pohybu za snížené viditelnosti používejte světlé oblečení.
- Seznamte se s funkcemi vozíku před jeho prvním použitím.
- Používejte vozík na rovném povrchu, při jízdě do kopce i z kopce postupujte s maximální opatrností.
- Nenaklánějte se dopředu ani do stran za účelem zvedání předmětů ze země.
- Nepoužívejte vozík na silnicích, v provozu ani na kluzkých površích (voda, led, olej).
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem MOBIK.
- Nikdy nestoupejte na rám vozíku.

Kontrola před použitím

Před každým použitím invalidního vozíku proveďte následující kontroly:

- Zkontrolujte, zda **rám vozíku není poškozen** (praskliny, deformace).
- Ověřte, že je vozík **správně a plně rozložen**.
- Zkontrolujte, že je **sedák zcela rozepnutý a napnutý**.
- Ověřte správnou funkci **brzd**.
- Zkontrolujte stav **mechanických částí** a jejich opotřebení.
- Pokud je vozík vybaven **rychloupínacími osami**, ujistěte se, že jsou správně zajištěny.
- Zkontrolujte **stav kol, tlak v pneumatikách (pokud jsou nafukovací)** a vzdálenost mezi pneumatikou a brzdou.

UPOZORNĚNÍ

Brzdy nefungují správně, pokud je tlak v pneumatikách nízký nebo je mezi brzdou a kolem příliš velká mezera.

7. Usedání do invalidního vozíku

 Následující postup je určen **pouze zkušeným uživatelům**.

Nezkušeným uživatelům se doporučuje asistence doprovodu.

1. Umístěte vozík co nejbližší k sobě.
2. **Zajistěte brzdy** zadních kol.
3. Opřete se rukama o rám nebo područky.
4. Pomalu a kontrolovaně se posaďte na sedák.

8. Vstávání z invalidního vozíku

1. Přistavte vozík co nejbližší k místu, kam se přesouváte.
2. **Zajistěte brzdy.**
3. Opřete se **rovnoměrně o obě područky.**
4. Přeneste váhu těla směrem k cílovému místu přesunu.


UPOZORNĚNÍ

Opření pouze o jednu ruku nebo vstávání bez asistence může vést ke zranění nebo poškození vozíku.

9. Další pokyny k používání

- Vždy používejte **výtahy nebo rampy**.
- Pokud nejsou k dispozici, je nutná asistence **dvou doprovodných osob**, které vozík zvedají pouze za **pevné části rámu**.
- Vozík **nikdy nezvedejte s osobou usazenou v sedáku** – vozík se smí pouze tlačít.
- Vozík je určen k přepravě **jedné osoby**.
- Uživatel nesmí zůstat sedět ve vozíku během přepravy v dopravních prostředcích.
- Pokud vozík stojí, musí být **brzdy vždy zajištěny**.
- **NESTOUPEJTE na podnožky** při usedání nebo vstávání – hrozí převrácení vozíku.
- Nedotýkejte se **pohyblivých částí během pohybu** – hrozí poranění.
-

[OBRÁZEK 2 – správné zajištění brzd / použití vozíku]

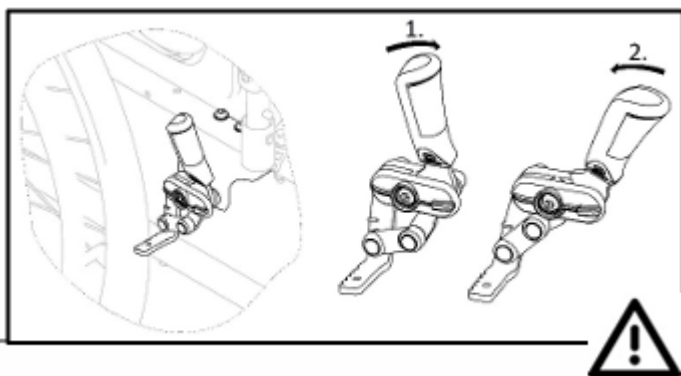

Údržba

Pravidelná údržba prodlužuje životnost invalidního vozíku a zajišťuje jeho bezpečné a správné fungování.

Týdenní kontrola

- Zkontrolujte **tlak v pneumatikách** (pokud jsou nafukovací).
- Ověřte, že **centrální šroub křížové výztuhy** je pevně dotažen a v dobrém stavu.
- Vyčistěte **sedák a opěrku zad** vlažnou vodou se slabým čisticím prostředkem.
- Kovové části otřete **suchým hadříkem** nebo vhodným přípravkem na lakované/chromované povrchy.
- Zkontrolujte **upevnění kol** a v případě potřeby je seřídte.
- Zkontrolujte **opotřebení předních a zadních kol**.

Čtvrtletní kontrola

- Zkontrolujte a případně seřídte:
 - vidlice předních kol,
 - osy kol,
 - ruční obruče zadních kol.
- Promažte **všechny části vystavené tření nebo opotřebení** (olej / mazivo).
- Zkontrolujte dotažení všech šroubů a matic (nepřetahujte).
- Proveďte **celkovou vizuální kontrolu** vozíku a opravte zjištěné závady.

Roční kontrola

- Doporučuje se **kompletní kontrola jednou ročně** u odborného servisu.
- Pro maximální bezpečnost uživatele se doporučuje **kontrola výrobcem každé 2 roky**.
- Při opravách používejte **pouze originální náhradní díly**.

Čištění a dezinfekce

Kromě pravidelné údržby je možné provádět běžné čištění rámu i textilních částí.

- Textilní části čistěte **pravidelně**, aby byl zachován jejich vzhled a hygienická nezávadnost.
- Nečistoty odstraňujte **houbičkou a jemným čisticím prostředkem** ve vlažné vodě, vždy ve směru struktury materiálu.
- Opláchněte čistou vodou a nechte **důkladně oschnout**.
- **NENECHÁVEJTE vozík mokrý.**
- Textilie **nesušte v sušičce**.
- Při silném znečištění použijte **měkký kartáč**.
- Rám čistěte **jemným čisticím prostředkem**.
- Vozíky s koženkovým sedákem čistěte **suchým hadříkem**.
- Kola čistěte teplou vodou a jemným mýdlem – **mokrá kola jsou nebezpečná**.
- Pro dezinfekci použijte **běžný jemný dezinfekční prostředek**.
- Chraňte výrobek před **oděrkami, řezy a propíchnutím**.

UPOZORNĚNÍ

- V případě poškození nebo poruchy **vozík nepoužívejte** a kontaktujte autorizovaný servis.
- Výrobek používejte **výhradně k účelům uvedeným v tomto návodu**.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím nebo neautorizovanými úpravami.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku i návodu bez předchozího upozornění.
- Rozměry výrobku mohou mít **odchylku ±3 %**.

OBRÁZEK 3 – čištění rámu / kol]



Montáž a rozložení vozíku

UPOZORNĚNÍ


Vzhled vozíku se může lišit od vyobrazení v tomto návodu. Postup montáže je však u všech modelů shodný.

12.1 Rozložení vozíku

1. Uchopte boční části rámu a **roztáhněte vozík směrem ven**.
2. Zatlačte příčné tyče po stranách sedáku **směrem dolů**, dokud není vozík zcela rozložen.
3. Zkontrolujte, že je sedák plně napnutý a vozík stabilní.

12.2 Složení vozíku

Postupujte opačným způsobem než při rozložení vozíku.

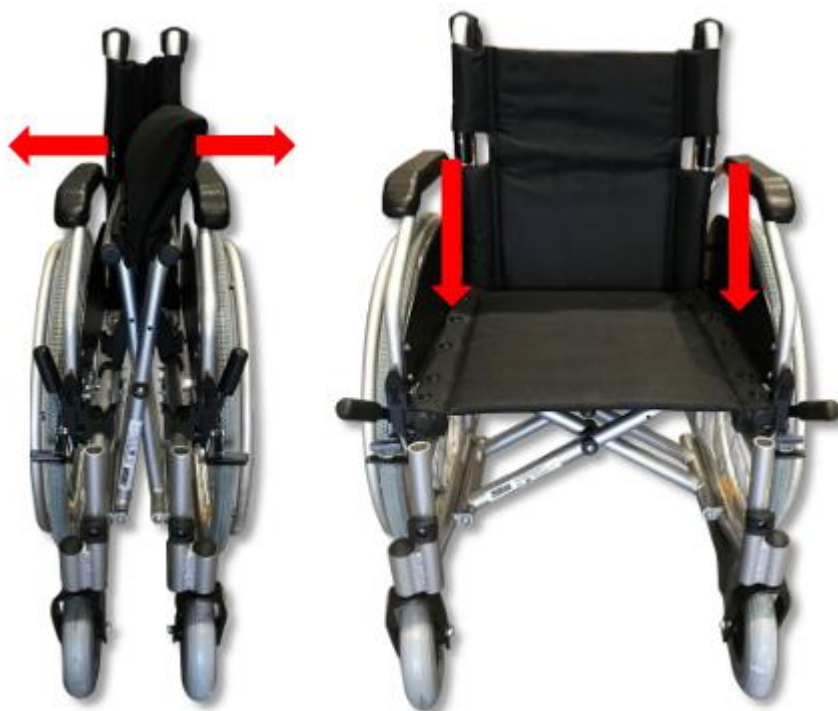

Montáž a nastavení podnožek

13.1 Montáž podnožek

1. Nasadíte podnožku do úchytů na rámu vozíku.
2. Zatlačíte směrem dolů, otočte podnožku směrem dovnitř a **zajistěte ji pojistným mechanismem**.
3. Stejný postup opakujte u druhé podnožky.

13.2 Demontáž podnožek

1. Stiskněte uvolňovací páčku.
2. Otočte podnožku směrem ven.
3. Zvedněte podnožku a vyjměte ji z držáků.

13.3 Nastavení délky podnožek


- Pomocí nástroje dodaného v balení uvolněte upevňovací šroub.
- Nastavte požadovanou délku.
- Šroub opět pevně utáhněte



Po montáži podnožek použijte **pásek podnožek**, aby byla chodidla správně umístěna.

Područky

Pro zvednutí sklopné područky stiskněte **bezpečnostní páčku** a zvedněte područku směrem nahoru.

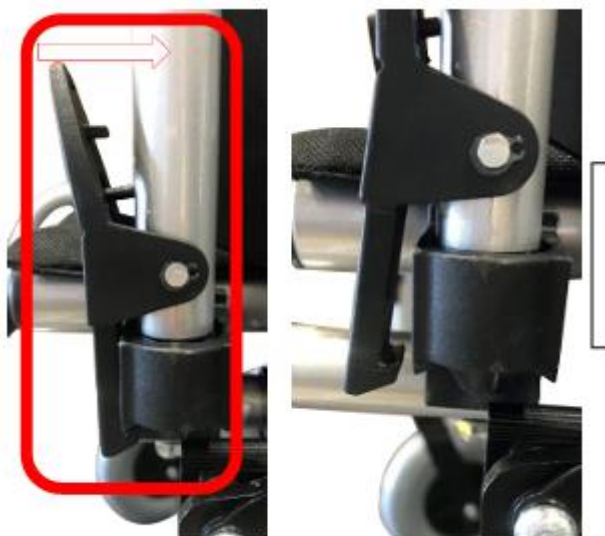

Brzdy


Parkovací brzdy

Parkovací brzdy slouží k **zajištění vozíku v klidové poloze** a zabráňují samovolnému pohybu.

- **Zajištění brzdy:** zatlačte brzdovou páku směrem dopředu.
- **Uvolnění brzdy:** zatáhněte brzdovou páku směrem dozadu.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Nikdy nepoužívejte parkovací brzdy během jízdy.
- Nepoužívejte parkovací brzdy ke zpomalování vozíku.
- Při manipulaci držte prsty mimo pohyblivé části.

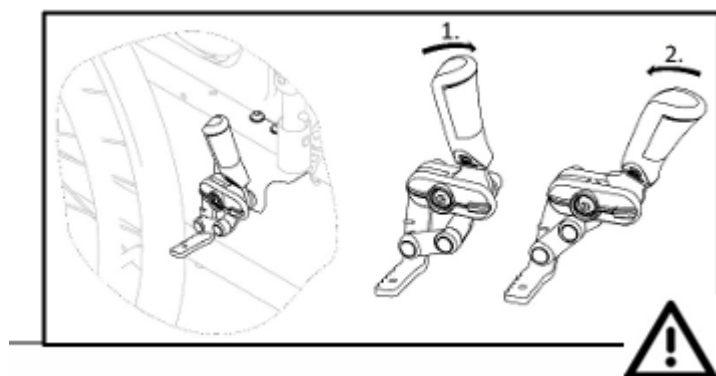

Brzdy doprovodu

Brzdy doprovodu umožňují doprovodné osobě **brzdit vozík během pohybu** a mohou být použity i jako parkovací brzdy.

- **Brzdění:** zatáhněte brzdovou páku **A** na rukojetích.
- **Zajištění (parkování):** zatáhněte páku a držte ji, dokud se nezajistí pojistná páčka **B**.
- **Uvolnění:** zatáhněte páku a uvolněte pojistnou páčku pod brzdovou pákou.

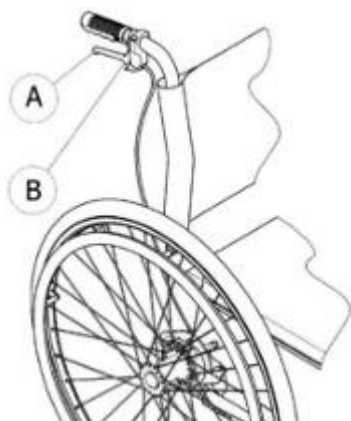

Rychloupínací zadní kola

Invalidní vozík je vybaven systémem **rychloupínacích zadních kol**, který umožňuje snadnou demontáž a zmenšení rozměrů při skladování nebo přepravě.

Demontáž kol

1. Stiskněte **tlačítko uprostřed kola**.
2. Současně vytáhněte kolo směrem ven z osy.
3. Postup opakujte u druhého kola.

Montáž kol

Postupujte opačným způsobem než při demontáži.



Technická specifikace

(Technické údaje se mohou lišit podle konkrétního modelu)

Modely: 0810840 / 0810841 / 0810842 / 0810843

Parametr	Hodnota
Materiál rámu	Hliník
Typ vozíku	Mechanický invalidní vozík
Použití	Vnitřní i venkovní
Šířka sedáku	dle modelu
Hloubka sedáku	dle modelu
Výška sedáku	dle modelu
Celková šířka	dle konfigurace
Hmotnost vozíku	cca dle modelu
Maximální nosnost	do 120 kg (pokud není uvedeno jinak)
Zadní kola	20"–24" (v závislosti na modelu)
Přední kola	otočná
Brzdy	parkovací / brzdy doprovodu (dle výbavy)
Podnožky	odnímatelné, nastavitelné
Područky	sklopné
Skládací konstrukce	ano

⚠ UPOZORNĚNÍ

Přesné technické údaje pro konkrétní model jsou uvedeny na výrobním štítku vozíku.

OBRÁZEK 10 – rozměrový náčrtek

0810840	44 cm	41 cm	41 cm	45 cm	58.4 cm	111 cm	95.5 cm	51 cm	24" 7"	120 Kg	13,7 Kg
0810841	46 cm	43 cm	41 cm	45 cm	61 cm	111 cm	95.5 cm	51 cm	24" 7"	120 Kg	13,7 Kg
0810842	49 cm	46 cm	41 cm	45 cm	63.5 cm	111 cm	95.5 cm	51 cm	24" 7"	120 Kg	13,7 Kg
0810843	51 cm	48 cm	41 cm	45 cm	66.5 cm	111 cm	95.5 cm	51 cm	24" 7"	120 Kg	13,7 Kg

Skládání a přeprava

- Vozík skladujte v **suchém a čistém prostředí**.
- Chraňte před **vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením**.
- Při přepravě doporučujeme vozík **složit** a zajistit proti pohybu.
- Při dlouhodobém skladování uvolněte brzdy.

Ochrana životního prostředí

Po ukončení životnosti výrobku:

- nevyhazujte vozík do komunálního odpadu,
- odevzdejte jej na **sběrné místo** nebo specializované zařízení,
- oddělte kovové a plastové části dle místních předpisů.

Správnou likvidací přispíváte k ochraně životního prostředí.

Záruka

- Záruka činí **24 měsíců** od data nákupu.
- Záruka se vztahuje na **výrobní vady**.
- Nevztahuje se na:
 - běžné opotřebení,
 - poškození způsobené nesprávným použitím,
 - neautorizované úpravy,
 - nedodržení tohoto návodu.
- Záruční opravy smí provádět pouze **autorizovaný servis**.

Hlášení incidentů (MDR)

Jakýkoli **závažný incident** vzniklý v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku musí být neprodleně nahlášen:

- výrobci
 - distributorovi
 - příslušnému orgánu členského státu (v ČR: SÚKL)
-

Prohlášení o shodě

Tento výrobek je **zdravotnický prostředek třídy I**

a je v souladu s **Nařízením (EU) 2017/745 (MDR)**

a příslušnými harmonizovanými normami.

Označení **CE** potvrzuje shodu výrobku s platnými předpisy EU.

Symbody na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením