

DSF 130



Obsah

Předmluva	23
Prohlášení o shodě	23
Životnost.....	23
Likvidace.....	23
Identifikační štítek	23
Opakované použití.....	23
Záruka	23
Součásti výrobku	24
Zamýšlený účel	24
Indikace.....	24
Obsah dodávky.....	24
Bezpečnostní pokyny.....	24
Montáž.....	25
Nastavení výšky nohou.....	25
Čištění a údržba.....	25
Technické údaje.....	25

Předmluva

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek od společnosti Drive DeVilbiss.

Konstrukce, funkčnost a kvalita výrobku vás určitě nezklamou.

Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití. Obsahuje důležité bezpečnostní informace a užitečná doporučení pro správné používání a údržbu. Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete více informací, obraťte se na specializovaného prodejce Drive DeVilbiss, kde jste výrobek zakoupili.

Tento návod k použití obsahuje všechny důležité informace týkající se nastavení a obsluhy výrobku. Nejaktuálnější návod k použití je dostupný ve formátu PDF na webu, případně si jej můžete vyžádat přes zákaznický servis.

Osoby se zrakovým postižením si mohou návod zobrazit ve větším formátu. Nevidomé pacienty musí poučit jejich doprovodná osoba. Opravy a také některé změny nastavení vyžadují zvláštní technické školení, a proto je musí provádět dodavatel zdravotnických prostředků.

Prohlášení o shodě

Společnost DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG prohlašuje, že popisovaný výrobek vyhovuje požadavkům nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.

Životnost

Naše společnost předpokládá životnost výrobku v délce pěti let, pokud bude používán zamýšleným způsobem a bude na něm prováděna veškerá předepsaná údržba a servis.


Uváděná životnost může být podstatně delší, pokud je s výrobkem zacházeno pečlivě a je správně opravován, udržován a používán. V podstatě neexistují žádná technická omezení s ohledem na budoucí vývoj vědy a techniky.

Avšak životnost může být také výrazně kratší v případě velmi častého nebo nesprávného používání. Stanovení životnosti naší společností proto nelze chápat jako poskytnutí další záruky.

Likvidace

Pokud výrobek již nepotřebujete, obraťte se na specializovaného prodejce nebo jej odneste do místního střediska pro likvidaci odpadu.

Identifikační štítek

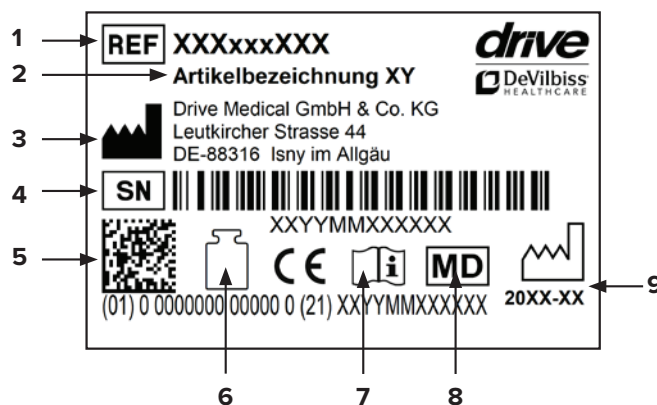

1 Číslo artiklu | 2 Název artiklu | 3 Výrobce | 4 Sériové číslo
5 Kód UDI | 6 Max. zatížení | 7 Dodržujte návod k použití
8 Zdravotnické zařízení | 9 Datum výroby (rok/měsíc)

Opakované použití

Tento výrobek lze používat opakovaně.

Nezapomeňte novému uživateli rovněž předat veškerou technickou dokumentaci potřebnou k bezpečnému používání.

Výrobek musí zkontrolovat specializovaný prodejce, vyčistit jej a uvést do optimálního stavu.

Vždy dodržujte pokyny výrobce během přípravy výrobku; jsou k dispozici na vyžádání.

Příslušenství je dostupné na webové stránce **www.drivedevilbiss.com** nebo u specializovaného prodejce.

Záruka

Záruční lhůta na námi dodaný výrobek činí 24 měsíců ode dne zakoupení. Vadné součásti budou bezplatně vyměněny, pokud se prokáže, že se jedná o vadu materiálu nebo zpracování.

Standardní záruční lhůta se obecně nevztahuje na součásti podléhající opotřebení, pokud tyto součásti nevyžadují opravu nebo výměnu evidentně v přímém důsledku vady materiálu nebo zpracování.

Vyhrazujeme si právo na chybu a změny vyplývající z technických vylepšení a konstrukčních změn.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Součásti podléhající opotřebení (mimo jiné): pryžové nohy

Součásti výrobku



DSF 130

1. **Opěradlo**
2. **Područka**
3. **Zámek části sedátka**
4. **Nastavitelná noha**
5. **Sedací část**

Zamýšlený účel

K pomůckám do sprchy patří židličky do sprchy, sedátka, křesla, opěrky, mobilní sprchovací opěrky, které jsou určeny výhradně pro domácí použití. Pomůcky do sprchy se používají u osob s omezenými pohybovými funkcemi, které jim nedovolí denní osobní péči ve sprše bez použití dalších pomůcek. Pomůcky do sprchy jsou vydávány na lékařský předpis, jakmile se zhorší stabilita uživatele. Pokud je omezena i stabilita při sedu (např. paralýza trupu) nebo schopnost se posadit/vstát, je zapotřebí rovněž použít opěrku zad a područky.

Indikace

INDIKACE:

Nemožnost bezpečně stát ve sprše z důvodu omezené nebo žádné pohyblivosti dolních končetin a oslabených svalů anebo zhoršené vestibulární funkce či tendence padat z důvodu jiné etiologie při současné přiměřené stabilní poloze trupu při sezení a dostatečně zachovaných funkcích horních končetin.

Obsah dodávky

1 x	Židle do sprchy
1 x	Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

- Pozorně si přečtěte tento návod k použití.
- Před použitím zkontrolujte, že žádné součásti nejsou poškozeny a že jsou bezpečně sestaveny. Nepoužívejte výrobek, je-li vadný!
- Při usedání nebo vstávání a během zamykání sedátka ve vybrané poloze se může oděv nebo části těla přiskřípnout.
- Pozor – nebezpečí uklouznutí/pádu!
- Výrobek je výrazně méně stabilní než běžné židle, proto zamezte náklonu do strany – hrozí převrácení!
- Vždy se posaďte doprostřed sedátka a opřete se celými zády o opěrku zad, nesedejte na okraj – hrozí převrácení a uklouznutí!
- Chraňte výrobek před dlouhodobým vystavením teplotám vyšším než 60 °C (např. při používání v sauně apod.).

- Dodržujte maximální povolenou hmotnost uživatele. Tento údaj najdete v technických parametrech v tomto návodu k použití a také na identifikačním štítku.

Montáž


Křeslo do sprchy je předem sestavená; je nutné smontovat pouze 4 nastavitelné nohy (viz další část).

Rozložte ho dle vyobrazení a sedátko zvedněte nahoru. Otočte obě boční části dopředu a sedátko položte dolů, až dosedne na přídržné svorky (**obr. 1+2**).



Nyní sedátko pevně zatlačte dolů, až slyšitelně zacvakne do levé i pravé přídržné svorky (**obr. 3**).


Zkontrolujte správné umístění sedátka na přídržných svorkách (**obr. 4**).

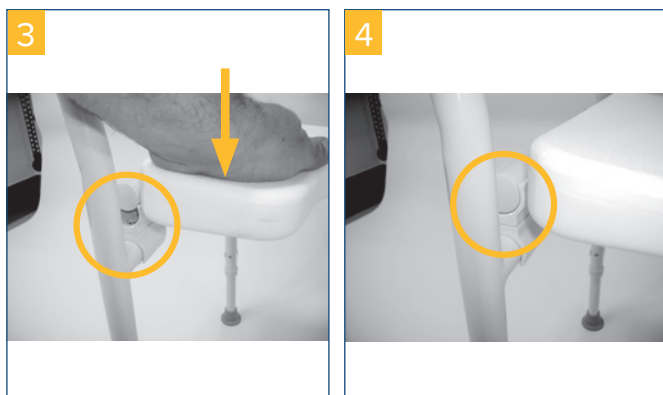

Nastavení výšky nohou

Než výrobek použijete, nastavte ho do požadované výšky (**obr. 5**). Nastavení výšky nohou:

Stiskněte tlačítko (1) a současně vytáhněte nohu nebo ji zatlačte, až tlačítko zaklapne na místo v požadované poloze (2). Zkontrolujte, že tlačítko správně zacvaklo na místo.

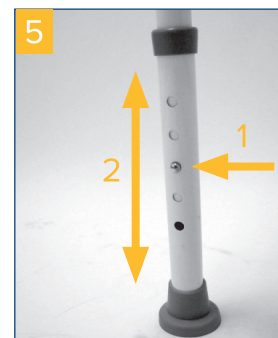

Zkontrolujte, že jsou všechny čtyři nohy nastaveny na stejnou výšku.

Čištění a údržba

- Výrobek pravidelně čistěte vlhkým hadrem!
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!
- Nepoužívejte abrazivní čističe!
- Nepoužívejte čističe s vysokým obsahem chloru nebo na bázi octu!
- K desinfekci lze použít desinfekční sprej jako např. Descosept AF nebo Bacillol AF.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.
- Chraňte výrobek před dlouhodobým vystavením teplotám vyšším než 60 °C (např. při používání v sauně apod.).
- Vyskytne-li se na výrobku závada, obraťte se na specializovaného prodejce, kde jste výrobek zakoupili.


Technické údaje

Výrobek	DSF 130
Číslo artiklu	550200100
Č. HMV (registr zdravotnických prostředků)	04.40.03.2021
Celková hloubka	45 cm
Celková šířka	51 cm
Celková výška	96 - 104 cm
Výška opěradla	48 cm
Sedátko (Š/H/V)	41 cm / 53 cm / 45 - 53 cm
Nastavení sedátka	5
Hmotnost	4,3 kg
Maximální nosnost	130 kg
Materiál rámu	hliník
Krycí materiál sedátka/područky	PP (polypropylen) / PU (polyuretan)

[illegible]

[illegible]

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Ihr Fachhändler:



Irrtum und Änderungen vorbehalten
Stand: 22/02/2026
Version: MDR-1.0

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu • Njemačka
T +49 7562 9724 0 • F +49 7562 9724 25
www.drivemedical.de • info@drivemedical.de