

SK:

ELEKTROLYT-SALBE CS Ochranná masť, chráni a regeneruje pokožku.

• Podporuje hojenie rán • Znižuje opuch • Znižuje bolesť • Znižuje tvorbu jaziev • Ošetrovanie zjazveného tkaniva • Zabraňuje infekciám • Vhodné pre deti • Na ochranu okrajov rán • Na ochranu pokožky • Vytvára optimálne fyzikálne prostredie • Znižuje hematómy a opuchy • Podporuje tvorbu nového tkaniva • Vhodné pre citlivú pokožku • Vyživuje • Upokojuje • Znižuje začervenanie pokožky • Znižuje pocit napätia • Upokojuje podráždenie • Zmierňuje svrbenie, pálenie • Chladi

Oblasti použitia: Poranenia pokožky (napr. rezné rany, odreniny, tržné rany a pomliaždeniny), popáleniny 1. a 2. stupňa (aj pri spálení slnkom), poranenia, podráždenie alebo zápal pokožky v okolí konečníka (napr. análne trhliny, hemoroidy I. stupňa), na ošetrovanie zjazveného tkaniva a tupého poranenia. Tiež na starostlivosť o namáhanú alebo suchú, popraskanú pokožku a starnúcu pokožku, na starostlivosť o okraje rán a na ochranu pokožky.

Charakteristika

ELEKTROLYT-SALBE CS sa používa na vytvorenie optimálneho fyzikálneho prostredia na hojenie poranenej pokožky. To urýchľuje zmenšovanie krvných podliatin a edémov, znižuje opuch, a tým zmierňuje bolesť. Podporuje sa tvorba nového tkaniva, zlepšuje sa hojenie po operáciách alebo poraneniach (rany, popáleniny, spálenia od slnka) a redukuje sa jazvy.

Použitie: **ELEKTROLYT-SALBE CS** je vhodný pre deti od 2 rokov, dospievajúcich do 18 rokov a všetkých pacientov nad 18 rokov. Pred ošetrením a po ňom si umyte ruky. V prípade potreby ranu vyčistite (napr. sprejom na rany). Pred každou aplikáciou na konečník by mal byť análny otvor očistený a suchý. Na poranenú pokožku naneste **ELEKTROLYT-SALBE CS** v hrúbke približne 2 mm až do vzdialenosti približne 2 cm za okrajom rany. Aplikujte viackrát denne počas prvých troch dní po poranení. Použitie závisí od typu a závažnosti poranenia. **ELEKTROLYT-SALBE CS** sa môže používať aj v kombinácii s komerčne dostupným obväzovým materiálom. Prekrytie poranenej pokožky obväzom navyše chráni ranu pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli narušiť hojenie. **ELEKTROLYT-SALBE CS** neobsahuje žiadne látky dráždiace pokožku a môže sa aplikovať na ústa a sliznice (napr. nos).

Kontraindikácia a nežiaduce vedľajšie účinky

Prípravok by sa nemal používať, ak máte známu alergiu alebo podozrenie na alergickú reakciu na niektorú zo zložiek.

Upozornenia: Len na externé použitie. Nepožívajcie. Dbajte na hygienické odstránenie. Po použití tubu uzavrite, aby ste zabránili kontaminácii. Ak sa otvor tuby dostal do kontaktu s ranou alebo je inak kontaminovaný, tuba sa musí okamžite zlikvidovať. Používajte iba nádoby, ktoré sú v bezchybnom stave a nepoškodené. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Chráňte pred deťmi. Pri popáleninách stupňa 2b a vyššie je potrebné vyhľadať lekára. U tehotných žien, dojčiacich matiek, dojčiat a malých detí sa môže prípravok používať len po konzultácii s lekárom. Chráňte pred slnečným žiarením. Nepoužívajte po dátume expirácie. Dbajte na obmedzenie teploty. Skladujte v suchu. Dodržujte návod na použitie. Každý závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s produktom, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je používateľ usadený. Ak zistíte vedľajšie účinky alebo zhoršenie vášho stavu, prestaňte liek používať a obráťte sa na lekára.

Trvanlivosť: 3 roky od výroby **Veľkosť balenia:** Tuby 20 g, 100 g

Doba použiteľnosti: Po otvorení sa má **ELEKTROLYT-SALBE CS** spotrebovať do 3 mesiacov.

Označenie šarže/  a dátum expirácie/  : vytlačené na dne krabičky a vyrazené v záhybe tuby

Likvidácia

ELEKTROLYT-SALBE CS a všetky použité obväzové materiály sa môžu zlikvidovať v rámci zvyškového odpadu, nie je potrebná ich oddelená likvidácia.

Zloženie (INCI)

Čistená voda, oktyldodekanol, hydrogenované palmové glyceridy, PEG-200 hydrogenovaný glycerylpalmát, cetylalkohol, Aloe Barbadensis prášok z listovej šľavy, Panthenol, kyselina dehydrooctová, stopové prvky (zinok, železo)

Vyrobeno v Nemecku



NAWA HEILMITTEL GmbH
Ostendstraße 100
D-90482 Norimberk
Telefon: +49 (0) 911-544 41-0
Fax: +49 (0) 911-544 41-11
E-mail: info@nawa.com
www.elektrolyt-salbe.de



Distributor ČR:
PHARMCARE CZ, s.r.o.
Modřická 979/75, 664 48
Moravany, CZ
Telefon: +420 530 515 577
Email: info@pharmcare.cz
www.pharmcare.cz



Distribútor pre SR:
PHARMACARE
SLOVAKIA, s.r.o.

Cabaj 504, 951 17 Cabaj - Čápor
Telefón: 037/658 00 66
email: info@pharmcare.sk
www.pharmcare.sk

CZ:

ELEKTROLYT-SALBE CS Ochranná mast, chrání a regeneruje kůži

• Podporuje hojení ran • Snižuje otoky • Zmírňuje bolest • Snižuje tvorbu jizev • Ošetřuje zjizvenou tkáň • Zabraňuje infekci
• Vhodné pro děti • Pro ochranu okrajů ran • Pro ochranu pokožky • Vytváří optimální fyzikální prostředí • Snižuje hematomy a edémy • Podporuje tvorbu nové tkáně • Vhodná pro citlivou pokožku • Vyživuje • Zklidňuje • Snižuje zarudnutí kůže • Snižuje pocit prnutí • Zklidňuje podráždění • Zmírňuje svědění, pálení • Chladí

Oblasti použití

Poranění kůže (např. řezné rány, odřeniny, natržení a pohmožděnin), popáleniny 1. a 2. stupně (také na spáleniny od slunce), poranění, podráždění nebo záněty kůže v okolí konečníku (např. anální trhliny, hemoroidy 1. stupně), k ošetření jizev a tupých poranění. Také k péči o namáhanou nebo suchou, popraskanou pokožku a stárnoucí pokožku, k péči o okraje ran a k ochraně pokožky.

Vlastnosti

Přípravek **ELEKTROLYT-SALBE CS** se používá k vytvoření optimálního fyzikálního prostředí pro hojení poraněné kůže. Tím se urychlí odbourávání hematomů a edémů, otok se zmenší, a tím se zmírní bolesti. Podporuje se tvorba nové tkáně, zlepšuje se hojení po operacích nebo poraněních (rány, popáleniny, spáleniny od slunce) a snižuje se tvorba jizev.

Použití

Přípravek **ELEKTROLYT-SALBE CS** je vhodný pro děti od 2 let, mládež do 18 let a všechny pacienty starší 18 let. Před ošetřením a po něm si umyjte ruce. V případě potřeby ránu vyčistěte (např. sprejem na rány). Před každou aplikací na konečník by měl být konečník očištěn a osušen. Na poraněnou kůži naneste přípravek **ELEKTROLYT-SALBE CS** v tloušťce asi 2 mm až do vzdálenosti asi 2 cm za okraje rány. Aplikujte několikrát denně po dobu prvních tří dnů po poranění. Použití závisí na typu a závažnosti poranění. Přípravek **ELEKTROLYT-SALBE CS** lze použít také v kombinaci s komerčně dostupným obvazovým materiálem. Překrytí poraněné kůže obvazem navíc chrání ránu před vnějšími vlivy, které by mohly narušit hojení. Přípravek **ELEKTROLYT-SALBE CS** neobsahuje žádné látky dráždivé pokožku a lze jej aplikovat na oblast úst a v oblasti sliznic (např. nos).

Kontraindikace a nežádoucí vedlejší účinky

Přípravek by se neměl používat v případě známých alergií nebo podezření na alergické reakce na některou ze složek.

Varování

Pouze k vnějšímu použití. Nepožívejte. Dbejte na hygienické odebírání. Po použití tubu uzavřete, aby nedošlo ke kontaminaci. Pokud se otvor tuby dostal do kontaktu s ránou nebo je jinak kontaminován, tubu okamžitě zlikvidujte. Používejte pouze bezvadná a nepoškozená balení. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při popáleninách od stupně 2b nebo vyššího je třeba vyhledat lékaře. Těhotné ženy, kojící matky, kojenci a malé děti by měli přípravek užívat pouze po konzultaci s lékařem. Chraňte před slunečním světlem. Nepoužívejte po uplynutí expirace. Dodržujte teplotní limit. Skladujte na suchém místě. Dodržujte návod k použití. Všechny závažné události, ke kterým došlo v souvislosti s přípravkem, musí být nahlášeny výrobcí a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel sídlí. Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky nebo zhoršení svého stavu, přestaňte přípravek užívat a obraťte se na lékaře.

Trvanlivost: 3 roky po výrobě

Velikosti balení: Tuby 20 g, 100 g

Doba použitelnosti: Po otevření by měl být přípravek **ELEKTROLYT-SALBE CS** spotřebován do 3 měsíců

Označení šarže/  **a datum expirace/**  : vytištěno na dně skládací krabičky a vyraženo v záhybu tuby

Likvidace: Přípravek **ELEKTROLYT-SALBE CS** a veškeré použité obvazové materiály lze likvidovat v rámci zbytkového odpadu, není nutná oddělená likvidace.

Složky (INCI):

Aqua purificata, oktyldodekanol, hydrogenované palmové glyceridy, PEG-200 hydrogenovaný glycerylpalmát, cetylalkohol, Aloe Barbadensis prášek z listové šťávy, panthenol, kyselina dehydrooctová, stopové prvky (zinek, železo)

Vyrobeno v Německu

