



Popis použitých symbolů:

	Výrobce
	Datum výroby
LOT	Šarže
	Varování
	Viz návod k použití
	Chraňte proti vlhkosti
	Chraňte před slunečním zářením
REF	Katalogové číslo
MD	Zdravotnický prostředek
UDI	Jedinečný identifikátor prostředku
CE	V souladu s nařízením (EU) 2017/745
	Doporučeno prát krátce a důkladně v ruce na 30 °C, nepoužívat bělidla, nežehlit, chemicky nečistit, nepoužívat odstraňovače skvrn obsahující rozpouštědla, nepoužívat sušičku

Návod k použití



Qmed[®]
BY MEYRA

CE

CZ

ACTIVE-SHOULDER ORTÉZA NA PAŽI A RAMENO

Výrobce:
MDH Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
tel. +48 42 636 81 44
www.qmedbymejra.pl

Vydání 17.06.2024

MDH[®]
Sprzet Medyczny

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQJ0C

Indikace:

Pooperační léčba zlomenin hlavičky humeru, dutiny glenoidální, luxací ramene. Degenerativní změny ramene a související bolest. Běžné vykloubení ramene. Zotavení po glenohumerální kapsulární rekonstrukci. Ochrana proti vykloubení ramene při obrtné horní končetiny různé etiologie.

Kontraindikace:

Stavy vyžadující imobilizaci ramene. Rány a kožní léze v oblasti ortézy.

Popis ortézy:

- ortéza je vyrobena z prodyšného materiálu,
- popruhy zajišťují stabilizaci ramene a akromioklavikulárního kloubu a umožňují individuální nastavení ortézy,
- univerzální velikost.

Cílová skupina pacientů:

Ortéza je určena pro pacienty vyžadující stabilizaci v oblasti ramene.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Prostředek musí být zlikvidován v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Jak nasadit ortézu:

1. Nasadte ortézu na paži a rameno.
2. Upevněte pás okolo paže.
3. Paži dejte do fyziologického postavení.
4. Poté upevněte popruh na hrudi.

Tabulka velikostí: Univerzální velikost.

Návod na čištění:

Před praním vyjměte výztuhy umístěné ve stabilizátoru ortézy. Ortézu lze prát ručně při nízkých teplotách (30°) s jemným pracím prostředkem, bez aviváže. Nepoužívejte bělidla ani silné čisticí prostředky. Pro vysušení položte ortézu rozprostřenou na ručník a vysušte na vzduchu. Ortézu nepřekrucujte ani nemačkejte. Nesušit v sušičce nebo na topení. Po každém mytí zkontrolujte stav ortézy.

Složení:

PA, SBR, PE

Typ uživatele:

Zdravotnický prostředek je určen jak pro laiky (neprofesionální uživatele), ale také pro odborníky.

**VAROVÁNÍ!**

Ortézu nepoužívejte, pokud máte poruchy krevního oběhu. Ortézu nepoužívejte, pokud je poškozená nebo zdeformovaná. Nepokoušejte se ortézu opravit sami. Nepoužívejte ortézu nesprávné velikosti nebo způsobem, pro který není určena.

Pokud zaznamenáte jakékoli problémy související s používáním produktu, kontaktujte prosím svého lékaře.

Nedodržování správné osobní hygieny a nevhodné prací prostředky mohou způsobit oděrky nebo jiné neduhy spojené se zvýšeným pocením a růstem bakterií.

Ortézu nepoužívejte s hřejivými gely nebo mastmi.

Jakákoli závažná událost v souvislosti s prostředkem musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel a/nebo pacient sídlo.

PŘED POUŽITÍM ORTÉZY DOPORUČUJEME PORADIT SE S ODBORNÍKEM!

