

Typ uživatele:

Zdravotnický prostředek je určen jak pro laiky (neprofesionální uživatele), ale také pro odborníky.



VAROVÁNÍ!

Ortézou nepoužívejte, pokud máte poruchy krevního oběhu.

Ortézou nepoužívejte, pokud je poškozená nebo zdeformovaná.

Nepokoušejte se ortézu opravit sami.

Nepoužívejte ortézu nesprávné velikosti nebo způsobem, pro který není určena.

Pokud zaznamenáte jakékoli problémy související s používáním produktu, kontaktujte prosím svého lékaře.

Nedodržování správné osobní hygieny a nevhodné prací prostředky mohou způsobit oděrky nebo jiné neduhy spojené se zvýšeným pocením a růstem bakterií.

Ortézou nepoužívejte s hřejivými gely nebo mastmi.



Jakákoli závažná událost v souvislosti s prostředkem musí být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel a/ nebo pacient sídlo.

PŘED POUŽITÍM ORTÉZY DOPORUČUJEME PORADIT SE S ODBORNÍKEM!




1

2,3

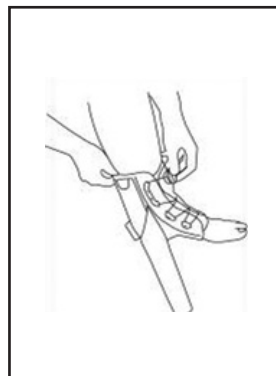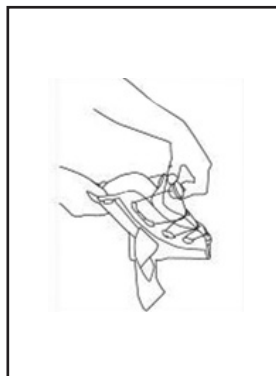

4

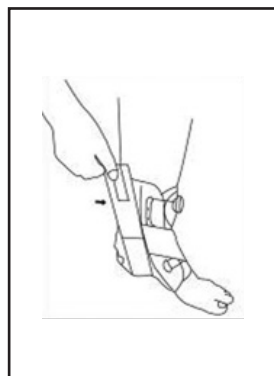

Popis použitých symbolů:

	Výrobce
	Datum výroby
	Šarže
	Varování
	Viz návod k použití
	Chraňte proti vlhkosti
	Chraňte před slunečním zářením
	Katalogové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Jedinečný identifikátor prostředku
	V souladu s nařízením (EU) 2017/745
	Doporučeno prát krátce a důkladně v ruce na 30 °C, nepoužívat bělidla, nežehlit, chemicky nečistit, nepoužívat odstraňovače skvrn 30° obsahující rozpouštědla, nepoužívat sušičku

Návod k použití



Qmed[®]
BY MEYRA

CE

CZ

AEROFIT ORTÉZA NA KOTNÍK

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQI7G

Výrobce:

MDH Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
tel. +48 42 636 81 44
www.qmedbymejra.pl

Vydání 17.06.2024

MDH[®]
Sprzęt Medyczny

Indikace:

Používá se při poranění kotníku: výrony prvního a druhého stupně, poškození vazů. Stabilizace v případech trvalé nebo dočasné nestability kotníku. Chrání klouby před nadměrnými everzními a inverzními pohyby. Běžné podvrtnutí kotníku. Prevence poranění a přetížení oblasti kotníku.

Kontraindikace:

Nestabilní zlomeniny vyžadující sádrovou fixaci. Výrobek je určen k nošení přes bavlněnou ponožku. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy související s používáním produktu, kontaktujte prosím svého lékaře. Opatrní musí být zejména pacienti s poruchou prokrvení končetin, např. cukrovkou nebo onemocněním periferních cév. Ortézu nenoste na otevřené rány.

Popis ortézy:

- ortéza je vyrobena z distanční tkaniny s vynikající propustností vzduchu a vlhkosti,
- knoflíkový šněrovací systém,
- stabilizaci zajišťují tvarované boční výztuhy,
- měkké polstrování chrání měkkou tkáň v oblasti kloubu,
- univerzální model pro pravý i levý kotník.

Cílová skupina pacientů:

Ortéza je určena pro pacienty vyžadující stabilizaci v oblasti kotníku.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Prostředek musí být zlikvidován v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Výběr ortézy:

Ortéza by měla být vybrána na základě rozměrů uvedených v tabulce velikostí.

Jak nasadit ortézu:

1. Povolte knoflíkový systém zatažením za knoflík, povolte tkaničky a vložte nohu.
2. Stiskněte knoflík a otáčejte jej ve směru hodinových ručiček, dokud nebude dostatečně utažená.
3. Pokud potřebujete ortézu znovu nastavit, vytáhněte knoflík, poté mírně povolte tkaničky a opakujte výše uvedené kroky.
4. Pevně utáhněte elastický pásek křížem a upevněte jej suchým zipem.

Tabulka velikostí:

Velikost	S	M	L
Obvod kotníku (cm)	15–22	22–30	30–36

Návod na čištění:

Před praním vyjměte výztuhy umístěné ve stabilizátoru ortézy. Ortézu lze prát ručně při nízkých teplotách (30°) s jemným pracím prostředkem, bez aviváže. Nepoužívejte bělidla ani silné čisticí prostředky. Pro vysušení položte ortézu rozprostřenou na ručník a vysušte na vzduchu. Ortézu nepřekrucujte ani nemačkejte. Nesušit v sušičce nebo na topení. Po každém mytí zkontrolujte stav ortézy.

Složení:

PE, PA, PU, PP, Bavlna