

Složení:

PU, PE, PA, PET

Typ uživatele:

Zdravotnický prostředek je určen jak pro laiky (neprofesionální uživatele), tak pro profesionální uživatele.

VAROVÁNÍ!

Ortézou nepoužívejte, pokud máte poruchy krevního oběhu.  
Ortézou nepoužívejte, pokud je poškozená nebo zdeformovaná.  
Nepokoušejte se ortézu opravit sami.  
Nepoužívejte ortézu nesprávné velikosti nebo způsobem, pro který není určena.  
Pokud zaznamenáte jakékoli problémy související s používáním produktu, kontaktujte prosím svého lékaře.  
Nedodržování správné osobní hygieny a nevhodné prací prostředky mohou způsobit oděry nebo jiné neduhy spojené se zvýšeným pocením a růstem bakterií.  
Ortézou nepoužívejte s hřejivými gely nebo mastmi.  
Jakákoli závažná událost v souvislosti s prostředkem musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel a/ nebo pacient sídlo.

PŘED POUŽITÍM ORTÉZY DOPORUČUJEME PORADIT SE S ODBORNÍKEM!



Popis použitých symbolů:

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Výrobce                                                                                                                                                                        |
|  | Datum výroby                                                                                                                                                                   |
|  | Šarže                                                                                                                                                                          |
|  | Varování                                                                                                                                                                       |
|  | Viz návod k použití                                                                                                                                                            |
|  | Chraňte proti vlhkosti                                                                                                                                                         |
|  | Chraňte před slunečním zářením                                                                                                                                                 |
|  | Katalogové číslo                                                                                                                                                               |
|  | Zdravotnický prostředek                                                                                                                                                        |
|  | Jedinečný identifikátor prostředku                                                                                                                                             |
|  | V souladu s nařízením (EU) 2017/745                                                                                                                                            |
|  | Doporučeno prát krátce a důkladně v ruce na 30 °C, nepoužívat bělidla, nežehlit, chemicky nečistit, nepoužívat odstraňovače skvrn obsahující rozpouštědla, nepoužívat sušičku. |

Návod k použití



Qmed<sup>®</sup>  
BY MEYRA



CERVICOMFORT KRČNÍ LÍMEC S VÝZTUHOU - TYP FLORIDA

Výrobce:  
 MDH Sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104  
94-007 Łódź  
tel. +48 42 636 81 44  
www.qmedbymejra.pl

Vydání 17.06.2024

MDH<sup>®</sup>  
Sprzęt Medyczny

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQA0D

**Indikace:**

Onemocnění krční oblasti, která nevyžadují rigidní imobilizaci, poškození svalů a vazů, přetížení a záněty pohybového aparátu, dysfunkce meziobratlových kloubů s traumatem i bez, poškození meziobratlové ploténky, artrózy, revmatoidní onemocnění, hojení zlomenin .

**Kontraindikace:**

Silná bolest u deformujících lézí a diskopatií páteře, pooperačních stavů, zlomenin a luxací krčních obratlů.

**Popis prostředku:**

Lehký, jednodílný, anatomicky tvarovaný límec z polyuretanové pěny. Zapínání a nastavení obvodu na suchý zip. Límec má antibakteriální a protiplísňové vlastnosti. Výztuha zvyšuje stabilizační účinek.

**Cílová skupina pacientů:**

Ortéza je určena pro pacienty s onemocněními krční oblasti, které nevyžadují rigidní plnou imobilizaci.

**Likvidace zdravotnického prostředku:**

Prostředek musí být zlikvidován v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Výběr ortézy:**

Správné použití límce je stejně důležité jako správná velikost k dosažení optimální imobilizace a pohodlí. Použijte suchý zip k mírnému utažení a upevnění límce.

**Tabulka velikostí:**

| Velikost | Obvod krku<br>(cm) | Výška límce<br>(cm) |
|----------|--------------------|---------------------|
| XS       | 25–32              | 6.4                 |
| S        | 32–38              | 7.6                 |
| M        | 38–46              | 9.9                 |
| L        | 46–51              | 10.2                |
| XL       | 51–56              | 11.4                |

**Návod na čištění:**

Límec lze prát ručně ve vlažné vodě s jemným pracím prostředkem. Neperte v pračce ani nepoužívejte prostředky s obsahem chlóru. Neždímejte, vodu jen jemně vymačkejte. Sušte rozložené mimo umělé zdroje tepla.