

Jak nasadit ortézu:

1. Rozepněte všechny popruhy.
2. Posadte se a pokrčte nohu v úhlu 30°.
3. Nasadte si kolenní ortézu.
4. Klouby přiložte ve výšce osy otáčení kolena.
5. Upevněte popruh 1 za lýtkem. Poté upevněte popruh 2 nad kolenem.
6. Ujistěte se, že přední část ortézy přiléhá ke stehnu a upevněte popruh 3.
7. Poté upevněte popruh 4 vpředu pod kolenem.
8. Upevněte zadní lýtkový popruh 5.
9. Nezapomeňte upevnit všechny popruhy ve správném pořadí.
10. Ve stoje poté zapněte popruh 6 vpředu nad kolenem.

Návod na čištění:

Před praním sejměte vycpávku ze stabilizační dlahy. Vycpávky a stahovací popruhy by se měly prát ručně při nízkých teplotách (30°) s jemnými pracími prostředky, bez aviváže. Nepoužívejte bělidla ani silné čisticí prostředky. Neodstředovat, nežmýkat, před sušením jemně vyždímat. Pro vysušení rozložte vycpávkové části na ručník a osušte na vzduchu. Uchovávejte mimo dosah umělých zdrojů tepla. Po každém mytí zkontrolujte stav ortézy. Výrobek čistěte systematicky, nejméně dvakrát měsíčně, v případě potřeby i častěji.

Složení:

PE, EVA, PA, PU, POM, AL, ABS, bavlna



Typ uživatele:

Zdravotnický prostředek je určen jak pro laiky (neprofesionální uživatele), tak i pro odborníky.

VAROVÁNÍ!

Ortézu nepoužívejte, pokud máte poruchy krevního oběhu. Ortézu nepoužívejte, pokud je poškozená nebo zdeformovaná. Nepokoušejte se ortézu opravit sami. Nepoužívejte ortézu nesprávné velikosti nebo způsobem, pro který není určena. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy související s používáním produktu, kontaktujte prosím svého lékaře. Nedodržování správné osobní hygieny a nevhodné prací prostředky mohou způsobit oděrky nebo jiné neduhy spojené se zvýšeným pocením a růstem bakterií. Ortézu nepoužívejte s hřejivými gely nebo mastmi. Jakákoli závažná událost v souvislosti s prostředkem musí být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel a/nebo pacient sídlo.

PŘED POUŽITÍM ORTÉZY DOPORUČUJEME PORADIT SE S ODBORNÍKEM!

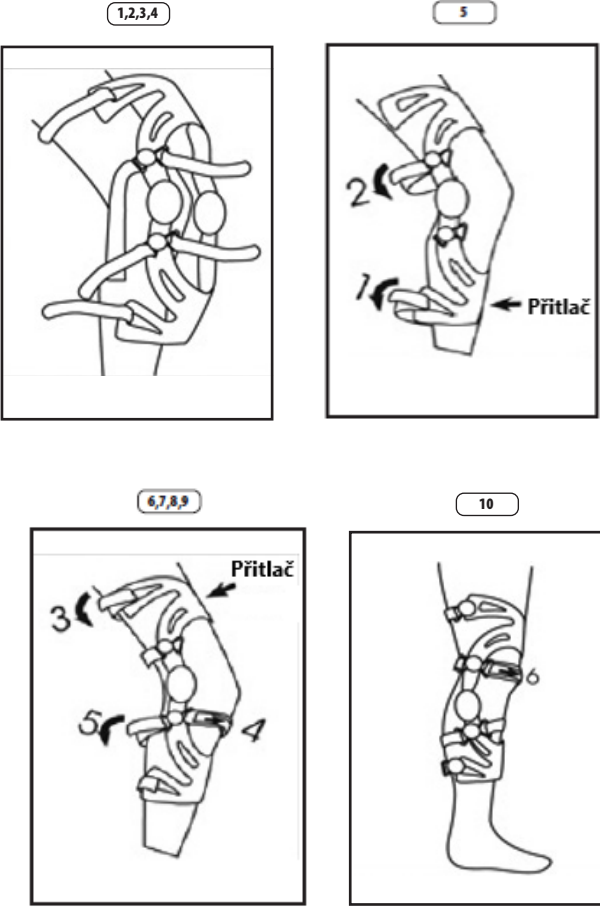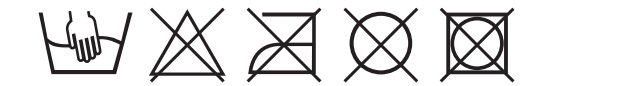

Popis použitých symbolů:

	Výrobce
	Datum výroby
	Šarže
	Varování
	Viz návod k použití
	Chraňte proti vlhkosti
	Chraňte před slunečním zářením
	Katalogové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Jedinečný identifikátor prostředku
	V souladu s nařízením (EU) 2017/745
	Doporučeno prát krátce a důkladně v ruce na 30 °C, nepoužívat bělidla, nežehlit, chemicky nečistit, nepoužívat odstraňovače skvrn 30° obsahující rozpouštědla, nepoužívat sušičku.

Návod k použití



CZ STRIDE SUPPORT RÁMOVÁ ORTÉZA NA KOLENO S PŘEDNÍ OPOROU

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQI7C

Výrobce:
MDH Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
tel. +48 42 636 81 44
www.qmedbymejra.pl

Vydání 17.06.2024



Návod k použití:

Funkční kolenní ortéza účinně stabilizuje koleno a chrání jeho vazy po úrazech, operacích a při návratu ke sportovním a profesionálním aktivitám po úrazu.

Indikace:

- poúrazové snížení funkce muskuloskeletálního systému stabilizujícího koleno,
- stav po rekonstrukci ACL, PCL, MCL, LCL,
- problémy s ACL a PCL,
- slabost kvadricepsu,
- návrat ke sportovní aktivitě po zranění kolene.

Kontraindikace:

Stavy vyžadující úplnou imobilizaci kolena, obtížně se hojící rány nebo kožní léze v oblasti ortézy.

Popis ortézy:

- anatomický design, lehký hliníkový rám,
- polycentrický kloub s možností omezení úhlového rozsahu pohybu ve flexi (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) a extenzi (0°, 10 °, 20°, 30°, 40°) a imobilizace při 0°, 10°, 20°, 30°,
- stabilizační popruhy zajišťující správné umístění a funkčnost ortézy,
- silikonové vyměkčení na popruzích zabraňující sklouzávání ortézy z dolní končetiny,
- zapínání umožňující rychlé nasazování a sundávání ortézy,
- ortéza je k dispozici pro levou a pravou končetinu.

Cílové skupiny pacientů:

Ortéza je určena pro pacienty s dysfunkcí kolena, po úrazech, onemocněních, k podpoře léčby a rehabilitace zajištěním omezení flexe a extenze končetiny a mediolaterální stabilizace kolena.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Prostředek musí být zlikvidován v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Výběr ortézy:

1. První nasazení ortézy by mělo být provedeno na předpis a pod dohledem kvalifikovaného zdravotnického personálu.
2. Ortéza by měla být vybrána na základě rozměrů uvedených v tabulce velikostí.
3. Pokud se ortéza příliš uvolní nebo změní svou polohu, je třeba ji nasadit zpět počínaje prvním krokem v části „Jak nasadit ortézu“.

Tabulka velikostí:

Ortéza je k dispozici pro levou i pravou končetinu.

Velikost	S	M	L	XL
Obvod stehna [cm]	39–47	47–53	53–60	60–67
Obvod lýtky (cm)	29–37	37–43	43–50	50–57

Měření obvodu stehna – 15 cm nad středem česky

Měření obvodu lýtky – 13 cm pod středem česky