

NÁVOD K POUŽITÍ

BrownGuard 700 pás břišní typ 01 je vyroben z pružného materiálu a zapíná se na suchý zip. Elastický materiál je prodyšný a umožňuje dobrý odvod potu. Materiály použité na výrobu pásu jsou nedráždivé a neobsahují latex. Mechanismus účinku břišního pásu je založen na zpevnění břišní stěny, čímž dochází k potřebnému terapeutickému efektu. Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Při delších klidových přestávkách byste měli pás sundat, neurčí-li Vás ošetřující lékař jinak.

Název zdravotnického prostředku:

BrownGuard 700 pás břišní typ 01

Varianty zdravotnického prostředku:

- vel. S – XL

Uživatelský profil:

BrownGuard 700 pás břišní typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

Určený účel použití zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek určený ke zpevnění břišní stěny.

Indikace:

- pooperační doléčení ventrálních nebo pupečních kýl
- doléčení po operacích recidiv kýl
- plastické operace v oblasti břicha
- podpora břišní stěny u obézních pacientů
- doléčení po operaci venter pendulum (převislé břicho)
- zabránění rozvoje nebo uskřínutí kýl u inoperabilních pacientů
- diastáza (rozestup) přímých břišních svalů
- ochrana jizev po břišních operacích
- zhmoždění břišní stěny
- zpevnění břišní stěny
- podpora břišního lisu

Pokud břišní pás používáte poprvé, je vhodné jeho použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, příp. aby byl zdravotní stav pravidelně lékařem kontrolován.

Kontraindikace:

- podrážděná nebo jinak porušená pokožka
- akutní mokvající kožní projevy
- přecitlivělost na použité materiály

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití břišního pásu a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

Cílová skupina pacientů:

Pacienti s bolestivými a pooperačními syndromy v oblasti břicha a dále pacienti s výše zmíněnými indikacemi. Břišní pás je určen k použití na zdravou, neporušenou pokožku a pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví. V těhotenství použití pásu konzultujte s Vaším lékařem.

Vedlejší účinky:

Vedlejší účinky se mohou projevit především při nesprávně zvolené velikosti nebo při používání břišního pásu mimo zátěž. Při nesprávně zvolené velikosti pásu může dojít k nedostatečné fixaci a tím i k nedostatečnému terapeutickému účinku. Příliš malý pás může tlakem zvýšit u indikovaných stavů bolestivé projevy. U vnímavých a přecitlivělých jedinců může dojít k iritaci pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiálem, ze kterého je břišní pás vyroben.

Jak zvolit správnou velikost břišního pásu:

Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit pouze změřením obvodu pasu v místě označeném na obrázku.

Upozornění:

Jakékoliv syndromy či nestability v oblasti břicha by měl posoudit lékař. Pokud jste problémy v oblasti břicha pozorovali poprvé, poraďte se před používáním břišního pásu s Vaším lékařem. Nezačínejte samoléčbu břišním pásem, pokud neznáte příčinu problému v oblasti břicha.

- k měření používejte krejčovský metr
- požádejte o pomoc druhou osobu
- naměřené hodnoty se v průběhu léčby mohou měnit - ověřte vždy správnou velikost před použitím nového balení břišního pásu

velikost	obvod pasu v cm (bod t)
S	65 - 85
M	85 - 105
L	105 - 125
XL	125 - 145



Pokud jsou naměřené hodnoty na rozhraní dvou velikostí, zvolte tu větší. Pokud si s volbou velikosti břišního pásu nejste jisti, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo kontaktujte přímo výrobce.

Správně zvolená velikost:

- pociťujete znatelný, nikoliv však nepříjemný tlak v oblasti břicha
- břišní pás nesjíždí a neshrnuje se

Aplikace břišního pásu:

Břišní pás nasadte přes záda na oblast břicha a pomocí suchého zipu dotáhněte tak, aby tlak nebyl nepříjemný. Při oblékání by pás neměl být v kontaktu s ostrými předměty (např. šperky) nebo dlouhými nehty. Pokud používáte tělovou kosmetiku, vyčkejte s oblékáním pásu cca 15 min. po aplikaci. V případě viditelného mechanického poškození pás dále nepoužívejte a nejlépe vyměňte za nový.


Ošetřování a údržba:

BrownGuard 700 pás břišní typ 01 je zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití jednou osobou. Svou účinnost a bezpečnost si zachovává po dobu 12-ti měsíců od prvního použití při dodržení následujících pravidel:

- břišní pás lze prát v pračce (maximální teplota praní 30°C, mírný postup) mýdlovým roztokem nebo speciálním přípravkem pro praní kompresivních punčoch a bandáží, v ochranném obalu (prací sáček)
- při praní nechte suché zipy vždy zapnuté
- nepoužívejte aviváž
- nepoužívejte odstředování, mokré břišní pás vymačkejte mezi dvěma ručníky
- sušte ve vodorovné poloze mimo přímý zdroj tepla (radiátor, slunce)
- břišní pás nežehlete
- maximální možný počet pracích cyklů je 60
- skladujte v suchu a temnu, nejlépe v originálním obalu
- do břišního pásu nijak mechanicky nezasahujte, neopravujte místa poškozená používáním, nenastřihávejte okraje
- břišní pás nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, bělicími přípravky

Zdravotnický prostředek smí být bezpečně používán 36 měsíců od data výroby. Datum výroby i expirace jsou uvedeny na obalu zdravotnického prostředku.

Ošetrovací symboly:

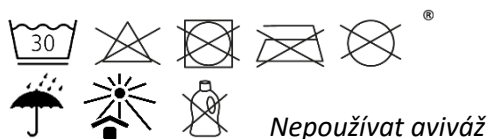

Kdy nepoužívat:

Zdravotnický prostředek ihned přestaňte používat, pokud pozorujete zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít souvislost s používáním břišního pásu - v takovém případě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Materiálové složení:

PU, PA, PES

Tento zdravotnický prostředek neobsahuje léčivou látku, včetně derivátů lidské krve nebo plazmy, tkáně nebo buňky lidského původu nebo jejich deriváty, tkáně nebo buňky zvířecího původu nebo jejich deriváty.

Likvidace:

Břišní pás je možno likvidovat s běžným komunálním odpadem, případně odložit do kontejneru určeného na textil. Ačkoliv je výrobek určen pro použití na zdravou, neporušenou pokožku, není vyloučeno, že během používání došlo ke kontaminaci tělními tekutinami. V takovém případě by měl být břišní pás zlikvidován jako infekční materiál.

Použitý materiál není toxický, pokud nedojde k jeho hoření. Použitý břišní pás nikdy nespalujte.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

Výrobce:

 **ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec**

Datum poslední revize textu: 11.07.2024

